

# PACKAGING | EMBALAGEM



## EMBALAGEM ÚNICA

1 Practi-Man Advance, 1 manual e FAQ, 5 pulmões, 2 válvulas, saco de transporte

## CERTIFICADO DE GARANTIA



Este produto passou com sucesso os mais rigorosos controlos de qualidade antes de sair da fábrica. Contudo, em caso de qualquer avaria devido a montagem ou componentes, leia as condições de garantia e contacte o seu distribuidor autorizado mais próximo. VICEDO MARTÍ S.L. garante que este produto está livre de defeitos de fabrico a partir da data de fabrico por um período de dois anos. Se, durante o período de garantia, ocorrer um defeito atribuível a processos de fabrico ou materiais, o cliente deve informar o distribuidor oficial no prazo de dez dias após a primeira aparição do defeito e, a critério do distribuidor oficial, o produto será reparado ou substituído.

## CONDIÇÕES DE GARANTIA

Detalhes e documentação: É necessária uma cópia da factura de compra para beneficiar da garantia. Para além das especificações do produto adquirido, a factura DEVE também conter o nome e o endereço do comprador.


**Exclusões:** Esta garantia exclui especificamente:  
 - Danos e/ou defeitos do produto resultantes de utilização indevida, negligência do utilizador, incluindo a utilização do produto para outros fins que não os previstos.  
 - Danos e/ou defeitos causados pela utilização de agentes externos, tais como ficheiros ou outros produtos químicos corrosivos.  
 - Danos e/ou defeitos devidos a manutenção inadequada ou falha de limpeza  
 - Danos e/ou defeitos devidos à utilização de partes não originais do manequim.  
**Cobertura geográfica:** A garantia é estendida a todos os países em que este produto é vendido pelo distribuidor, VICEDO MARTÍ S.L. ou autorizado pelo mesmo.  
**Cancelamento da garantia:** a garantia do produto é cancelada:  
 - Em caso de danos causados por reparações efectuadas por pessoal não autorizado pelos agentes de VICEDO MARTÍ S.L. e/ou se tiverem sido utilizadas peças ou acessórios que não sejam originais ou não produzidos por VICEDO MARTÍ S.L.  
 - Alteração da data na factura, recibo de venda ou embalagem

# CPR MANIKIN PRACTI-MAN Advance

## CARACTERÍSTICAS E PRINCIPAIS FUNÇÕES




➤ **SIMULADOR 2 EM 1**  
 Simulador pediátrico e de adultos num só produto

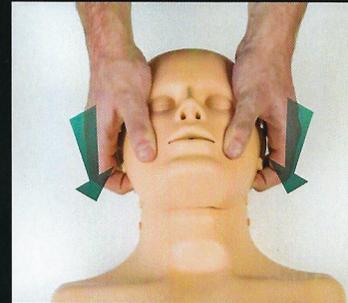


➤ **HIPEREXTENSÃO DAS VIAS AÉREAS**




➤ **FUNÇÃO RESPIRATÓRIA: SISTEMA REALISTA**  
 Sistema de respiração único, o que faz um verdadeiro caso de trabalho

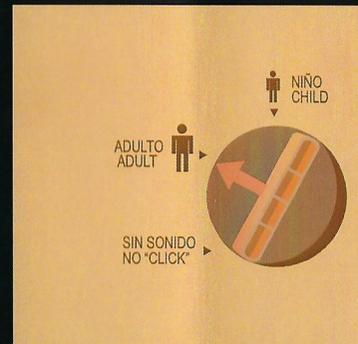

➤ **SELECTOR EXCLUSIVO DE 3 POSIÇÕES**  
 Posição de adulto, criança e teste (sem clique)

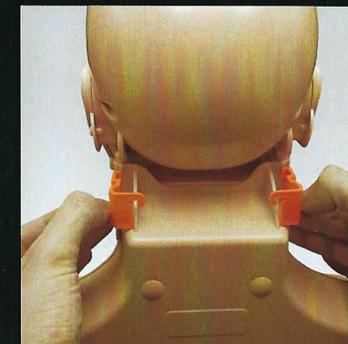

➤ **CLIQUE DE BLOQUEIO DA CABEÇA**

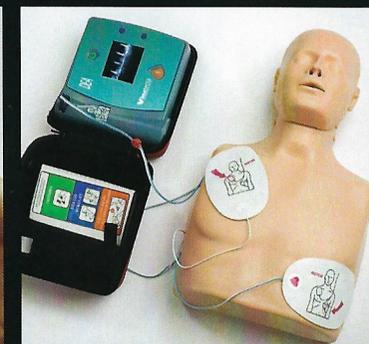

➤ **FORMAÇÃO DAE**  
 A utilização de eléctrodos não deixa resíduos na pele.

# COMO MONTAR O PRACTI-MAN

# RECOMENDAÇÕES PARA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO


Para garantir as melhores condições de higiene possíveis, o fabricante recomenda a limpeza do PRACTI-MAN ADVANCE após cada utilização, de acordo com as seguintes instruções.



1 Remoção da cobertura torácica




2 Retirar a tampa facial

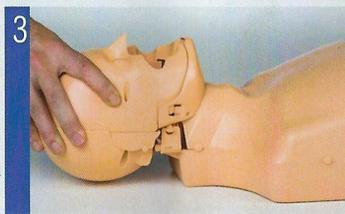

3 Assegurar que a cabeça está correctamente presa aos dois ganchos do tronco.




4 Passar o pulmão por baixo da mandíbula.

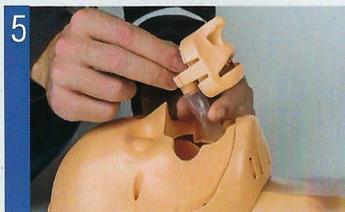

5 Ligar a válvula ao pulmão.



6 Assegurar que a válvula está correctamente ligada à cabeça.

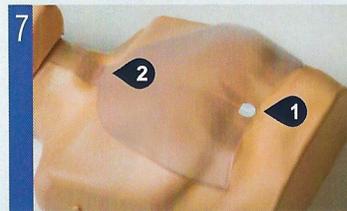


7 Assegurar que o pulmão:  
1- está correctamente posicionado como indicado pelas marcas adesivas  
2- está a estendido solto no peito




8 Posicionar a cobertura facial e assegurar que o nariz, a boca e a língua superior se encaixam correctamente.




9 Posicionar a tampa torácica e prendê-la aos ganchos fornecidos.

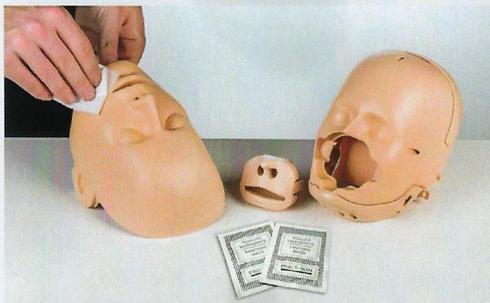


É necessário limpar o manequim desinfectando os lábios e o rosto, separando a cobertura facial da cabeça após cada exercício realizado pelos alunos.

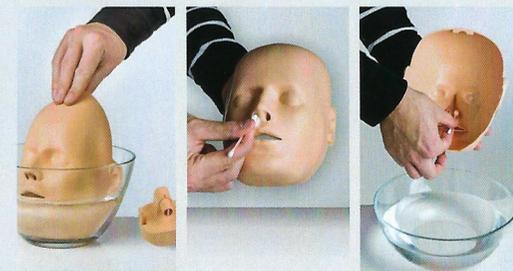

Para uma desinfecção mais completa, mergulhar a tampa facial num recipiente contendo uma solução desinfectante, limpar cuidadosamente e mantê-la seca para uma utilização adequada.

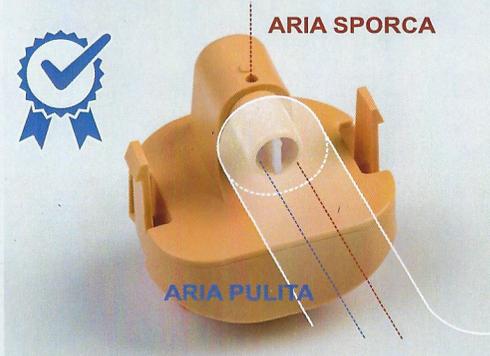

Após cada utilização, a válvula do PRACTI-MAN ADVANCE deve ser desinfetada e deixada a secar para um bom funcionamento.

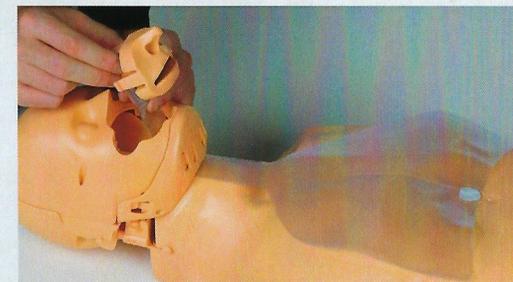

O pulmão do PRACTI-MAN ADVANCE é semi-utilizável e é adequado para dirigir uma sessão de ensino para um grupo de várias pessoas sem ter de o mudar. Se o peito parar de se levantar durante o exercício, verifique se o pulmão não está molhado, se for o caso deve ser substituído por um novo.

## PEÇAS SOBRESSALENTES DO PRACTI-MAN ADVANCE




PULMÃO  
(Ref. SP-001 (AD))



VÁLVULA  
(Ref. SP-002 (AD))




COBERTURA FACIAL  
(Ref. Face-MB (AD))

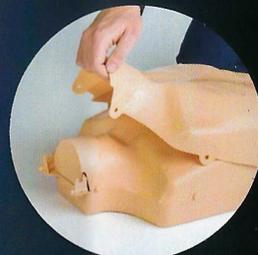

COBERTURA TORÁCICA  
(Ref. Chest-MB)

## PROTECÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DO RCP

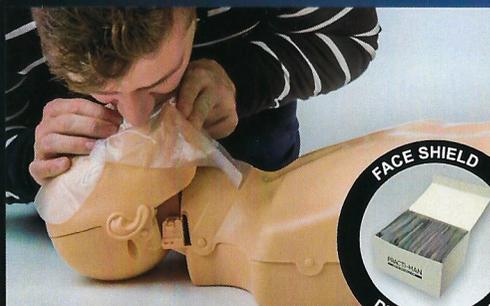

A protecção durante a formação é complementada pela utilização de máscaras de protecção respiratória



Dispenser da 100 unitã

A protecção durante a formação é complementada pela utilização de máscaras de protecção respiratória