

**Finalidade:**

Almofadas anti-decúbito viscoelástico e colchão de tatami quadrado e quadrado com furo de offset. Este modelo de almofada é feito à medida para casos bariátricos.

Grau de risco : Elevado

**Características:**

Saniluxe Poliuretano (60% poliéster, 40% poliuretano)

Interior: Viscoelástico e tatami - Espuma de poliuretano comprimido (5+3cm)

Anti escara, anti ácaros, impermeável, anti fungo, antiodor, antifogo, macio, lavável.

**Peso máximo:** 100 kg

**Dimensões:** 42x42x8 cm

**Cor:** Preto

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Modelo:** 102250

**Marca:** UBIO Qualitylife

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:** C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:**  
Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR -  
qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:**

Deve ser evitado o contacto da almofada com produtos corrosivos, decapantes, dissolventes e objetos "pontiagudos-cortantes". Evitar o contacto prolongado com líquidos. Conservar a almofada preferencialmente na posição horizontal, protegidos da luz natural e da humidade. Capa lavável à mão ou na máquina com detergente neutro a uma temperatura máxima de 90°C . Não usar centrifugação. Não usar lixívia.

**Não molhar o enchimento da almofada.****Instruções de Utilização:**

Adaptada a diferentes tipos de assentos, o que permite utilizar cadeira de rodas, sofás, etc. Posicionar a almofada sobre uma base plana. Escovar ou sacudir periodicamente a capa de fibra para manter a almofada em condições ótimas. Limpar a mão com pano húmido e com produtos neutro.

**Imagens do Artigo:**