

Finalidade: Facilitar/permitir a deslocação de pessoas com dificuldades de locomoção e pode ser utilizada por condução autónoma ou com a ajuda de outra pessoa;

Características: Rodas dianteiras em diâmetro: 20 cm; Rodas Grandes traseiras em diâmetro: 60 cm; Peso: +- 26Kg

Lote: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Data de produção: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Cor: Estrutura em azul;

Caixa: 1 unidade;

Declaração de Conformidade: Diretiva 93/42/CEE;

Classificação: Classe 1;

Modelo:

CP300-50 – Assento: 50cm

CP300-55 – Assento: 55cm

CP300-60 – Assento: 60cm

Marca: Ardea (Moretti);

Peso máximo do utilizador: 200 kg;

Fabricante: Moretti S.p.A;

Morada do fabricante: Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo);

Importador e Distribuidor: Gerimais;

Morada do Importador e Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Armazenamento: Guardar num local seco, longe de fontes diretas de calor, como a luz solar. Temperatura recomendada: entre +10 C° / + 40 C°;

Manutenção: O estofos, partes metálicas e as rodas podem ser limpos com água e sabão neutro, depois secar com um pano macio para não riscar a pintura da armação. Atenção à secagem das rodas, pode ser perigoso utilizar a cadeira de rodas com as rodas ainda húmidas;

Instruções de Utilização:

1. Aproxime a cadeira de rodas o mais perto possível, de modo a colocá-la ao seu lado;
2. Bloqueie os travões das rodas traseiras; para facilitar a subida para a cadeira de rodas;
3. É aconselhável remover o apoio de braços do lado onde estas operações são realizadas;
4. Apoie-se na estrutura do quadro fazendo força nos braços, em seguida, desça lentamente em direção ao assento.

Imagens do Artigo:

