

Finalidade:

Máscara de proteção facial indicada para uso desportivo, para lesões no septo nasal, bochechas, sobrancelhas e/ou testa. Protege seletivamente a área nasal e orbital do rosto do impacto sem impedir a visão periférica. Permite ao utente uma visão máxima.

Características:

Carcaça da máscara de material leve e transparente, a sua conceção permite ao utilizador a máxima visão, as zonas de amortecimento feitas de espumas adaptáveis permitem um ajuste personalizado, a peça têxtil traseira fornece um sistema de cinta ajustável e adaptável à área occipital, barreira ao impacto durante a prática desportiva. Todos os materiais foram testados e cumprem as normas europeias para a máxima segurança e conforto durante a utilização. Certificado oko-tex standard 100. Rótulo ecológico têxtil atribuído após o preenchimento de um catálogo de critérios de análise que garantem a ausência de substâncias nocivas para a saúde.

Cor: Transparente

Dimensões: Tamanho Único

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: MSK100

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar com um pano húmido e álcool. Não utilizar solventes. Lavar a parte têxtil à mão com sabão neutro, o velcro deve ser colado ou mantido fechado. Secar à temperatura ambiente. Não exponha a ortose ao calor direto.

Instruções de utilização:

Colocar a carcaça sobre a testa e maçãs do rosto, e verificar se a área a ser protegida está livre e se não há contacto em nenhum ponto da carcaça. Se a curvatura das asas laterais tiver de ser modificada, aquecer ligeiramente a área a ser modificada com um ventilador, usando luvas de proteção térmica, e deixar arrefecer antes de voltar a colocar no utilizador.

Imagens do Artigo: