

ESTETOSCÓPIO CABEÇA DUPLA DM540B/540R GeriMais

PEDIÁTRICO

Finalidade: Estetoscópio Pediátrico de cabeça dupla, em aço inoxidável, adequado para sons de alta e baixa frequência, em particular para a auscultação da cardiologia;

Características: Material de aço inoxidável acetinado;

Tubo em pvc em y de uma peça: diâmetro 5mm, comprimento 60cm

Dimensões: Diâmetro da cabeça – 40/26 mm;
Altura da cabeça – 20 mm;

Lote: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Data de produção: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Cor: Azul; Vermelho

Caixa: 1 unidade;

Declaração CE: Diretiva - 93/42/CEE;

Classificação: Classe 1;

Modelo: DM540B; DM540R

Marca: Logiko (Moretti);

Fabricante: MORETTI S.p.A.;

Morada do fabricante: Via Bruxelles, 3 – Meleto
Reg. Imp. Arezzo 3932 52022 Caviglia (Arezzo);

Importador e Distribuidor: Gerimais, Lda;

Morada do Importador e Distribuidor: Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior -
qualidade@gerimais.com;

Manutenção e armazenamento: Antes de qualquer utilização, controle o estado das pontas dos ouvidos. Uma vez desgastado, as pontas dos ouvidos devem ser substituídas para evitar danos no canal auditivo. Evite calor e frio extremo. Evite esterilização a quente. Os estetoscópios podem ser limpos com álcool ou água com sabão;

Instruções de Utilização:

1. Ajuste a tensão de mola do auricular às suas necessidades;
2. Para reduzir a tensão da mola no auricular, segure cada protetor auricular na curva perto da ponta do ouvido e afaste-se gradualmente até se esticar completamente;
3. Para aumentar a tensão da mola, agarre o auricular com uma mão onde os auriculares entram na tubagem e aperte até que a tubagem no auricular toque a outra;
4. Para rodar a cabeça dupla, basta manter o tubo Y em correspondência com a cabeça e rode-o 180° até ouvir CLICK.

Imagens do Artigo:

