

## SANITIZED

**Finalidade:** Lençol/ Resguardo de sujeição, impede que o utilizador tenha acesso à fralda e sua sujeição. Fornece segurança em caso de risco de vazamento em pacientes com demência senil ou alzheimer.

**Características:** Sem manga. Para cama com 90 cm. Fecho de correr.

Sanitized – Piqué (50% algodão, 50% poliéster) Cozido (tecido elástico) – É antialérgico

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Branco

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 203100

**Marca:** UBIO

**Dimensões:** 90x20x190 cm

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:** C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:** Lavável à mão ou à máquina. Temperatura máxima 60°C (branco); Não usar lixívia. Pode ser engomado. Pode ser limpo a seco.

**Instruções de Utilização:** Evita a manipulação da fralda por parte do utilizador. Recomendado para doentes com doença de Alzheimer ou outras doenças degenerativas que resultam em manipulação indesejada de fraldas, feridas, etc. Recomendado para uso noturno. É utilizado para substituir os imobilizadores tradicionais, tais como os cintos de retenção.

Abra o fecho e coloque a folha de retenção no colchão. A parte do fecho correspondente à parte do utilizador deve permanecer na parte superior da cama. Coloque o utilizador na cama. Coloque os braços do utilizador nas mangas dos resguardos. Feche o fecho da zona do peito do utilizador e nos pés da cama. O resguardo dispõe de um furo para colocar tubos de cateteres ou Drenagens.

### Imagens do Artigo:

