

Finalidade:

Imobilização do suporte da articulação glenoumeral. Distribui o peso do braço tratado e sobrecarga da zona cervical. indicado para: Fraturas do subcapital humero, correção do manguito rotador, fratura da clavícula, subluxação da articulação glenoumeral, deslocamento acromio-clavicular, tratamento de traumatismos nos ombros e braços, Pós-cirurgia

Efeitos: Imobiliza a articulação do ombro em rotação interna. Controla a flexão-extensão, rotação, abdução e adução do ombro. Mantém o cotovelo em flexão de 90° e pronação intermédia.

Características:

Imobilização do suporte da articulação glenoumeral. Distribui o peso do braço tratado evitando a sobrecarga da zona cervical. Tiras cruzadas nas costas para melhorar o apoio.

Fixa-se confortavelmente ao tronco por meio de velcro e adapta-se à posição escolhida do ombro. Faixa larga removível adequada para deslocamentos, subluxações e imobilização do ombro. Pode ser usado como uma faixa ou como um imobilizador. Muito confortável e eficaz. Bilateral

Dimensões (comprimento do cotovelo à flexão de dedos):

S (26-29)

L (29-34)

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: SH150

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Durante a lavagem, se a peça tem Velcro, eles devem ser coladas umas às outras ou mantê-los fechados. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde ou ferro a roupa. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário. Não expor diretamente a uma fonte de calor direto.

Instruções de utilização:

A escolha correcta do tamanho é essencial para a eficácia máxima do tratamento.

Imagens do Artigo: