

Finalidade:

Para relaxar os pés, este esalda-pés oferece 3 funções: massagem vibratória, massagem borbulhante e manutenção da temperatura da água. Protetor de respingos removível, apoio de pés de massagem suspenso.

Dica:

- Adição de arnica, alecrim ou extratos de sal marinho á água quente do banho dos pés estimulará a circulação.
- Adição de lavanda ou tomilho á água morna do banho de pés trará alívio aos pés cansados.

Pés antiderrapantes. 60 W.

Dimensões: 38 x 34,5 x 13 cm.

Peso 1,3kg.

Características:

Este spa para os pés está equipado com:

- . Descanso para os pés com sestras de massagem,
- . Acessório de massagem,
- . 3 funções: massagem vibratória, massagem com bolhas de ar e mantém o controlo da temperatura da água.

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 861054

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Instruções de Utilização:

Ponha-se confortável numa cadeira e coloque os pés sobre o descanso para os pés e aplique uma ligeira pressão. Nunca se levante no banho de pés. Os pés de borracha na base da unidade impedem-no de deslizar. Ligar o dispositivo. Para o fazer, premir o botão de função [2] A massagem vibratória, a massagem com bolhas e a manutenção do controlo da temperatura da água são iniciadas simultaneamente.

Manutenção e armazenamento:

Após a utilização, enxaguar a unidade com água da torneira. O banho de pés pode ser limpo com um produto de limpeza suave, sem espuma, por exemplo, vinagre neutro. Para secar a linha de ar após a limpeza, ligar o ajuste da bolha de ar durante aproximadamente 10 segundos. As gotas de água que emergem da barra da bolha podem ser limpas com um pano.

Nota

- Não permitir que a água penetre no interior do lava-pés.
- Armazenar o lava-pés na sua embalagem original numa área seca.
- Não a deixe aberta durante um período prolongado.

Imagens do Artigo:

