

Finalidade:

As almofadas Anti Escaras são projetadas para serem usadas por pessoas sujeitas a longos períodos de tempo sentadas e em sedação, com mobilidade limitada, por exemplo, usuários de cadeiras de roda. O principal objetivo é prevenir as úlceras de pressão nos tecidos superficiais e criar conforto.

Indicada para prevenção de Escaras, Úlceras de Pressão, proporciona estabilidade, alcança uma distribuição homogênea das pressões. Ajuda a manter a postura e absorver os impactos.

Características:

Almofada Antiderrapante com cobertura exterior lavável, com alguma resistência ao fogo. Tampa com pega para fácil manuseamento. Estética, confortável, resistente e fiável. Não desliza sobre o assento. Adapta-se facilmente a todas as cadeiras de rodas do mercado. Composto por uma espuma de células abertas através do qual flui um líquido viscoso. Com base no "princípio da flutuação"

Utilização recomendada até 100 Kg

Dimensões:

42 x 42 x 6cm

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: CF142

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia), Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

A Almofada vem com um invólucro exterior de tecido lavável e zíper. Deve ser lavado à mão com sabão neutro e água. Não use solventes ou qualquer produto químico que possa prejudicar as propriedades do material. O contacto com pomadas, cremes, e álcoois, podem danificar a peça.

Instruções de utilização:

A Almofada deve ser colocada sobre o banco e as nádegas do utilizador, deixando a base deslizamento na parte inferior (em contacto com a cadeira)

As alças laterais facilitam o transporte e manuseio do mesmo.

