

Finalidade: Cadeira de casa de banho destina-se a facilitar o sentar de pessoas com deficiência ou com dificuldades de mobilidade durante as operações na casa de banho.

Características: Capacidade máxima: 110 kg. Estrutura alumínio, assento e encosto em HDPE (polietileno de alta densidade), altura ajustável e pontas de borracha antiderrapante. Montagem sem ferramentas.

Cor: Branco

Data de produção: Verificar embalagem

Caixa: 1 unidade

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: RS834

Marca: Mopedia

Dimensões: 73x47x45,5 a 56,3cm;

Assento: 41 x 67 cm

Declaração de Conformidade: Regulamento UE2017/745

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Para limpar a estrutura utilize uma solução de álcool e sabão neutro (em partes iguais) misturada com água. Se for necessário desinfetar o produto, utilize um detergente neutro desinfetante comum

Instruções de Utilização: Ajuste de altura: Pressione o pino para ajustar o assento, trazendo-o para os orifícios de acordo com a altura desejada e a manobrabilidade subjetiva do paciente. Reposicione o trinco no orifício para prender o cano. Verifique se todas as quatro pernas têm a mesma altura. Coloque o assento sobre uma superfície plana e regular. Verifique a estabilidade do assento antes de utilizar.

Imagens do Artigo:

