




BANCO DE DUCHE MÉDICO BORA DOBRÁVEL
Manual de instruções - DISPOSITIVO MÉDICO



REF. 812031 – 812031.GRIS



	Endereço do fabricante		Consultar o manual de utilização
	Data de fabrico		Respeitar as instruções de segurança
	Número do lote		Conformidade CE
	Referência do produto		Teme a humidade
	Peso máximo do utilizador		Dispositivo médico



IMPORTANTE

Leia atentamente esta instrução antes de qualquer utilização deste produto e conserve-a para futura referência.

Utilizador : se não conseguir ler ou compreender os avisos, precauções ou instruções, contacte o seu profissional de saúde ou distribuidor antes de utilizar este produto, sob risco de danos ou acidentes.


Consulte o seu médico ou especialista de saúde antes de utilizar um dispositivo de ajuda técnica. Ele(a) poderá aconselhá-lo e informá-lo sobre a utilização mais adequada ao seu caso.

Distribuidor : esta instrução deve ser entregue aos utilizadores deste produto.

DESTINAÇÃO DO PRODUTO

O banco de duche Bora dobrável é um dispositivo médico. Trata-se de uma ajuda técnica para a higiene destinada a pessoas idosas, com mobilidade reduzida, com deficiência, lesionadas ou que possam perder facilmente o equilíbrio.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

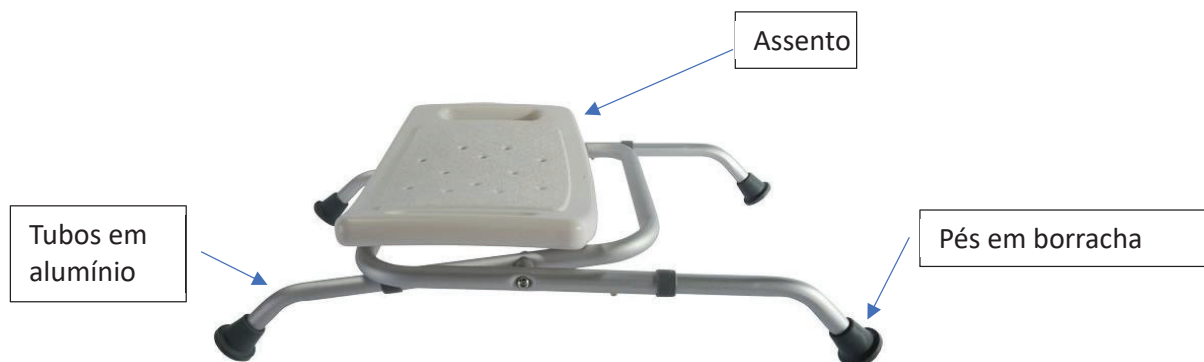

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



O não cumprimento das precauções de utilização pode causar riscos de lesões graves.

- Nunca ultrapassar o peso máximo suportado de 100 kg.
- Certifique-se de que todos os componentes estão devidamente fixos antes da utilização.
- Certifique-se de que o produto se encontra em bom estado de funcionamento.
- Efetue uma verificação visual do produto.
- Antes de cada utilização, o estado do assento deve ser verificado.
- Verifique a estabilidade do banco antes da utilização.
- Utilize apenas sobre uma superfície plana.
- Nunca se incline quando estiver sentado no produto.
- Atenção ao risco de beliscadura durante a abertura e o fecho do produto.
- Em caso de peças danificadas, partidas, gastas ou em falta, contacte o revendedor.

MONTAGEM E UTILIZAÇÃO

- Desembale cuidadosamente e examine o produto para garantir que está completo.
- Antes da utilização, verifique qualquer sinal de danos, como soldaduras fissuradas, tinta lascada, assento rachado ou danificado, ou tubos dobrados. Se identificar algum destes problemas, contacte-nos e não utilize o produto.
- Monte os 4 pés e ajuste o banco à altura desejada.

MANUTENÇÃO



A falta de manutenção do produto pode causar riscos de lesões graves.

- Limpar regularmente o produto (tubos, pés de borracha, assento e fixações) com um pano húmido e um desinfetante. Não utilizar produtos abrasivos, detergentes ou solventes.
- Secar com um pano macio, limpo e seco.
- O banco deve ser totalmente revisto uma vez por ano.
- Recomenda-se efetuar uma manutenção do produto pelo menos uma vez por ano. Se o produto for sujeito a uma utilização intensiva e/ou num ambiente de múltiplos utilizadores, recomendamos revisões mais frequentes.
- Em caso de avaria, não tente reparar o produto por conta própria. Consulte um revendedor autorizado.

- **Lista de controlo :**

Para manter o produto em bom estado, verifique antes de cada utilização e realize controlos regulares, conforme indicado :

Tipo de controlo	Método	Frequência
Controlo do assento	Ajuste / Controlo visual	Antes de cada utilização
Controlo das fixações	Ajuste	1 vez/mês
Controlo dos pés de borracha	Ajuste / Controlo visual	1 vez/mês

O produto pode ser reutilizado. Deve primeiro ser limpo e desinfetado de acordo com as normas de higiene. Durante a transferência do produto, certifique-se de entregar toda a documentação técnica necessária ao novo utilizador. Antes da reutilização, o produto deve ser inspecionado por um técnico autorizado.

RECICLAGEM

Quando o produto estiver inutilizável e tiver de ser descartado: contacte o seu revendedor especializado. Se pretender efetuar a reciclagem por si próprio, solicite informações à empresa local de gestão de resíduos sobre os procedimentos de eliminação adequados.

ARMAZENAMENTO



O não cumprimento das condições de armazenamento pode provocar danos no produto e, conseqüentemente, riscos de lesões graves.

- Não armazenar o produto por longos períodos perto de fontes de calor ou ao sol (ex. : atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de fontes de frio.
- Manter afastado de qualquer chama ou fonte de faíscas.
- Respeitar as condições adequadas de arrumação e armazenamento do produto.
- Armazenar num local seco e temperado.
- Proteger o produto contra pó, corrosão (ex.: materiais abrasivos, areia, água do mar, ar salino).
- Armazenar todas as peças desmontadas juntas, no mesmo local (ou identificá-las, se necessário) para evitar misturá-las com peças de outros produtos durante a remontagem.
- Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não colocar objetos pesados sobre eles, não os prender, etc.).

DURAÇÃO DE UTILIZAÇÃO

A vida útil prevista deste produto é de 5 anos em condições normais de utilização, segurança e manutenção para um único utilizador. Após este período, o produto pode continuar a ser utilizado desde que se encontre em bom estado. Se o produto for utilizado num ambiente de múltiplos utilizadores (lares de idosos, hospitais), a sua vida útil poderá ser reduzida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões no solo	Largura 53 cm × Profundidade 43/47 cm
Dimensões do assento	Largura 51 cm × Profundidade 30 cm × Altura 43/47 cm
Peso	2,1 kg
Peso máximo autorizado	100 kg

GARANTIA

Este produto possui uma garantia de dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. A IDENTITÉS fornecerá peças de substituição para qualquer componente que apresente quebra devido a um defeito de fabrico, de conceção ou de material. Contacte o distribuidor onde adquiriu o produto caso necessite de fazer uma reclamação. As falhas resultantes de danos acidentais, má utilização, modificações ou desgaste normal não estão cobertas por esta garantia. Para acionar a garantia, contacte o revendedor onde comprou o produto.



Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'Anjou



Peso máximo autorizado
100 kg

