











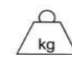
**BANCO DE DUCHE BORA**  
*Manual de instruções - DISPOSITIVO*  
**MÉDICO**



**REF. 812267.B – 812267.G**



## SÍMBOLOS PRESENTES NO RÓTULO OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES

	<i>Endereço do fabricante</i>		<i>Convite para ler o manual de instruções</i>
	<i>Data de fabricação</i>		<i>Respeitar as instruções de segurança</i>
	<i>Número do lote</i>		<i>Conformidade CE</i>
	<i>Referência do produto</i>		<i>Dispositivo médico</i>
	<i>Peso máximo do utilizador</i>		



## IMPORTANTE

Lire Leia atentamente este manual antes de utilizar este produto e guarde-o para futuras referências.

Usuário: se não conseguir ler ou compreender os avisos, precauções ou instruções, entre em contato com seu profissional de saúde ou distribuidor antes de usar este produto, pois o uso inadequado pode causar riscos e danos.

Consulte seu médico ou especialista de saúde antes de utilizar um dispositivo de ajuda técnica. Ele poderá aconselhá-lo e informá-lo sobre o uso mais apropriado para o seu caso.

Distribuidor: este manual deve ser entregue aos usuários deste produto.

## DESTINAÇÃO DO PRODUTO

O banco de banho Bora é um dispositivo médico. Ele é um auxílio técnico para higiene pessoal, destinado a idosos, pessoas com mobilidade reduzida, deficientes físicos, pessoas feridas ou aquelas que podem perder o equilíbrio facilmente.

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO



## PRECAUÇÕES DE USO



O não cumprimento das precauções pode causar ferimentos graves.

- Nunca exceda o peso máximo suportado de 100 kg.
- Certifique-se de que todos os componentes estão bem fixados antes do uso.
- Verifique se o produto está em boas condições de funcionamento.
- Faça uma inspeção visual do produto regularmente.
- Antes de cada uso, verifique o estado do assento.
- Certifique-se da estabilidade do banco antes de usá-lo.
- Utilize somente em superfícies planas.
- Nunca se incline para frente ao usar o produto.
- Se houver peças danificadas, quebradas, desgastadas ou faltando, entre em contato com o revendedor.

## MONTAGEM & USO

- Desembale cuidadosamente e verifique se todas as peças estão presentes.
- Antes de usar, inspecione sinais de danos, como soldas trincadas, descascamento de tinta, rachaduras no assento ou tubos dobrados. Se identificar qualquer um desses problemas, não utilize o produto e entre em contato conosco.
- Instale e fixe os tubos de alumínio utilizando as porcas fornecidas (4 porcas cinza curtas e 1 porca azul longa para a junção dos tubos).
- Monte as 4 pernas e ajuste a altura do banco conforme necessário.
- Certifique-se de que todas as fixações estão bem apertadas e verificadas regularmente.
- Assegure-se de que os pinos de travamento das pernas estejam corretamente encaixados.

## MANUTENÇÃO & CUIDADOS



A falta de manutenção pode causar riscos de lesões graves.

- Limpe o produto regularmente com um pano úmido e desinfetante. Não utilize produtos abrasivos, detergentes ou solventes.
  - Seque com um pano macio e seco.
  - O banco deve ser revisado anualmente.
  - Recomenda-se realizar a manutenção pelo menos uma vez por ano. Em casos de uso intenso ou em ambientes multiusuários, recomenda-se revisões mais frequentes.
  - Em caso de mau funcionamento, não tente consertar o produto por conta própria. Procure um revendedor autorizado.
  - Lista de verificação :

Para manter o produto em boas condições, faça inspeções antes de cada uso e regularmente conforme indicado abaixo :

Tipo de controle	Método	Frequência
Controle do assento	Ajuste/Inspeção visual	Antes de cada uso
Controle das fixações	Ajuste	1 vez/mês
Controle dos pés de borracha	Ajuste/Inspeção visual	1 vez/mês

## TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE

O produto pode ser reutilizado, desde que limpo e desinfetado corretamente.

Ao transferir o produto, entregue também toda a documentação técnica ao novo usuário. Antes da reutilização, o produto deve ser inspecionado por um especialista autorizado.

## RECICLAGEM

Quando o produto não puder mais ser utilizado e precisar ser descartado:

Entre em contato com um revendedor especializado.

Caso prefira realizar a reciclagem por conta própria, consulte a empresa local de gestão de resíduos para obter orientações sobre descarte adequado.

## ARMAZENAMENTO



O não cumprimento das condições de armazenamento pode causar deterioração do produto e riscos de lesões graves.

- **Não armazene** o produto por longos períodos próximo a **fontes de calor ou sob luz solar direta** (ex: atrás de uma janela ou perto de um aquecedor).
  - Mantenha-o **longe de chamas e fontes de faísca**.
  - Armazene em um local **seco e com temperatura adequada**.
  - Proteja o produto contra **poeira, corrosão, areia e umidade**.
  - Guarde todas as peças desmontadas juntas, para evitar que sejam confundidas com peças de outros produtos.
  - Não coloque **objetos pesados** sobre o produto armazenado.

## VIDA ÚTIL DO PRODUTO

A vida útil prevista para este produto é de 5 anos, considerando uso, segurança e manutenção adequados.

Após esse período, o produto pode continuar sendo usado, desde que ainda esteja em boas condições.

Se o produto for utilizado em um ambiente multiusuário (ex: lares para idosos, hospitais), a vida útil pode ser reduzida.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões no chão	Largura 43 cm x Profundidade 44/49,5 cm
Dimensões do assento	Largura 48,5 cm x Profundidade 33 cm x Altura 35/53 cm
Peso	1,8 kg
Peso	100 kg

## GARANTIA

Este produto possui uma garantia de dois anos a partir da data de compra pelo usuário.

A IDENTITÉS fornecerá peças de reposição para qualquer componente que quebrar devido a um defeito de fabricação, design ou material. Para acionar a garantia : Entre em contato com o distribuidor onde o produto foi adquirido.

A garantia não cobre falhas causadas por: Danos acidentais, uso inadequado, modificações ou desgaste natural.

Caso tenha dúvidas ou precise de assistência, consulte seu revendedor autorizado.



Identités – ZA Pole 49  
Bd de la Chanterie  
49124 Saint Barthélemy d'Anjou



**Peso máximo permitido: 100 kg**