



CADEIRA DE DUCHE BORA
Manual de instruções Dispositivo
Médico

REF. 812033.B – 812033.G



SÍMBOLO QUE APARECE NO RÓTULO OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES

	Endereço do fabricante		Convite para ler o manual do utilizador
	Data de produção		Siga as instruções de segurança
	Número do lote		Conformidade CE
	Referência do produto		Dispositivo médico
	Peso máximo do utilizador		

MANUAL DE INSTRUÇÕES PT

IMPORTANTE

Leia atentamente as instruções antes de utilizar este produto e guarde-as, se necessário.

Utilizador: Se não conseguir ler ou compreender quaisquer avisos, precauções ou instruções, contacte o seu profissional de saúde ou distribuidor antes de utilizar este produto ou podem resultar riscos e danos.

Consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de utilizar qualquer dispositivo de assistência. Ele / ela irá aconselhá-lo e informá-lo sobre o uso mais adequado no seu caso.

Distribuidor: Este manual de instruções deve ser fornecido aos utilizadores deste produto.

DESTINO DO PRODUTO

A cadeira de duche Bora é um dispositivo médico. Trata-se de um sanitário técnico para idosos, pessoas com mobilidade reduzida, deficientes, feridos ou que perdem o equilíbrio com facilidade.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



O não cumprimento das precauções de segurança pode resultar no risco de ferimentos graves.

- Não exceda o peso máximo suportado de 100 kg
- Certifique-se de que todos os componentes estão protegidos antes de usar.
- Certifique-se de que o produto está em boas condições de funcionamento.
- Verifique visualmente o produto.
- Antes de cada utilização do produto, deve verificar-se o estado do assento.
- Verifique a estabilidade da cadeira antes de usar.
- Use apenas em terreno plano.
- Nunca se dobre ao usar o produto.
- Em caso de peças danificadas, partidas, gastas ou em falta, contacte o concessionário.

MONTAGEM E USO

- Desembale cuidadosamente e examine o produto para garantir que está completo.
- Antes de usar, verifique se há sinais de danos, como soldagem rachada, tinta descascada, assento rachado ou danificado ou tubo dobrado. Se você notar algum desses problemas, entre em contato conosco e abstenha-se de usar o produto.

- Instale e fixe os tubos de alumínio com os botões fornecidos (incluindo 4 botões curtos cinzentos e 1 botão azul longo para unir os tubos)
- Monte as 4 pernas e ajuste o banco à altura necessária.
- Todos os elementos de fixação devem ser devidamente apertados e verificados regularmente.
- Certifique-se de que os dedos de bloqueio nas extensões das pernas estão corretamente engatados.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO



A falta de cuidados e manutenção do seu produto pode resultar no risco de ferimentos graves.

- Limpe o produto regularmente com um pano húmido e desinfetante. Não utilize produtos abrasivos, detergentes ou solventes.
- Seque com um pano limpo, macio e seco.
- O Banco deve ser completamente reparado todos os anos.
- Recomenda-se a manutenção do produto pelo menos uma vez por ano. Se o produto estiver sujeito a uso intenso e/ou em um ambiente multiusuário, recomendamos que ele seja reparado com mais frequência.
- Em caso de avaria, não repare o produto sozinho. Consulte um revendedor autorizado.

- Lista de verificação :

Para manter o produto em boas condições, verifique antes de cada uso e verifique regularmente o seguinte:

Tipo de controlo	Método	FREQUÊNCIA
Controlo do assento e do encosto	Ajuste/Verificação Visual	Antes de cada utilização
Verificação dos elementos de fixação	Ajustamento	Uma vez por mês
Verificação dos pés de borracha	Ajuste/Verificação Visual	Uma vez por mês

MUDANÇA DE PROPRIEDADE

O produto pode ser reutilizado. Em primeiro lugar, deve ser limpo e desinfetado de acordo com as instruções de higiene. Ao transferir o seu produto, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos necessários ao novo utilizador. De antemão, o produto deve ser inspecionado por um especialista autorizado.

RECICLAGEM

Quando o produto se tornar inutilizável e tiver de o deitar fora: contacte o seu revendedor especializado. Se desejar realizar a reciclagem por conta própria, peça orientações sobre a eliminação à sua empresa local de gestão de resíduos.

ARMAZENAGEM



A não observância das condições de conservação pode conduzir à deterioração do produto e, por conseguinte, ao risco de lesões graves.

- Não guarde o seu produto durante um longo período de tempo perto de uma fonte de calor ou ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de uma fonte fria.
- Manter afastado de todas as chamas e fontes de faíscas.
- Respeite as condições de armazenamento do seu produto:
- Em lugar seco e temperado
- Proteja o seu produto de poeira, corrosão (por exemplo, elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salgado).
- Guarde todas as peças removidas juntas no mesmo local (ou localize-as, se necessário) para evitar misturá-las com outros produtos durante a remontagem.
- Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não coloque quaisquer objetos que sejam muito pesados sobre os elementos do produto, não emperre nada...).

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO

A expectativa de vida deste produto é de 5 anos em condições normais de uso, segurança e manutenção para um usuário. Para além deste período, o produto pode ser utilizado desde que ainda esteja em boas condições.

Se o dispositivo for utilizado num ambiente multiutilizador (como um lar de idosos ou um hospital), a vida útil pode ser reduzida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Requisitos de espaço no chão	Largura 43 cm x Profundidade 44/49,5 cm
Dimensões do assento	Largura 48,5 cm x Profundidade 33 cm x Altura 35/53 cm
Dimensões do encosto	Largura 38 cm x Altura 22 cm x Altura do assento 33 cm
Peso	1,8 kg
Peso máximo do utilizador	100 quilogramas

GARANTIA

Este produto tem garantia de dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. A IDENTITIES fornecerá peças de reposição para qualquer peça que tenha quebrado devido a deficiências de fabricação, projeto ou fabricação. Entre em contato com o distribuidor de quem você comprou o produto para o caso de precisar fazer uma reclamação. Falhas resultantes de danos acidentais, uso indevido, alteração ou desgaste não são cobertas por esta garantia. Entre em contato com o revendedor de quem você comprou o produto para aplicar a garantia.