

Finalidade:

É uma compressa de Gel quente e fria ideal para utilização em casa e na clínica durante aplicações terapêuticas. Alívio rápido da dor

Indicado para: Inchaços, inflamação, nódoas negras, entorses, lesões de desporto, dores de cabeça, enxaqueca, dores musculares, tratamento de beleza e relaxamento.

Aplicação a Frio: olhos irritados, lacrimejantes ou vermelhos, comichão ou inchaço das pálpebras, dores de cabeça, enxaquecas, alergias, febre dos fenos, irritação da pele, por exemplo, após tratamentos cosméticos,

Aplicação a Quente: bloqueio dos seios nasais, preparação para tratamentos, relaxamento.

Medida: 26 x 15cm

Cor: Saco transparente com Gel Azul no interior

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: Pack Hot - Cold

Fabricante: Calvo Izquierdo S.L.

Morada do fabricante: C/ De la forja 4, Pol. Ind. El Romeral) Requena, Valencia (SPAIN) ;
www.calvoizquierdo.es// www.calvoizquierdo-medica.es

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR -
qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Manter limpo. Nunca deixar o saco aquecer no microondas sem supervisão.

Instruções de Utilização:

Aplicação a frio: Guardar o saco no congelador, para que esteja pronto a ser utilizado em caso de lesão. É necessária pelo menos uma hora para que o gel atinja uma temperatura adequada. Embrulhar o pacote de gel numa toalha e não aplicar por mais de 30 minutos. **Recomendações adicionais:** Parte do gel é água, pelo que congelará se o saco for mantido abaixo dos -18°C, após algum tempo congelará no congelador. Se precisar que o saco seja rígido e completamente congelado, coloque o seu congelador a -18°C a uma temperatura mais baixa para acelerar o processo de congelação do gel. Se, por outro lado, precisar que o gel permaneça flexível e não congele, ajuste a temperatura do seu congelador para -15°C.

Aplicação de calor: Microondas: submergir completamente o pacote de gel numa tigela de água no microondas durante aproximadamente 3 minutos a 600w. Se for necessário mais aquecimento, aquecer em intervalos de 15 segundos até ser atingida a temperatura desejada. Embrulhar o pacote de gel numa toalha e aplicar. **CUIDADO: NÃO SOBREAQUEÇA.** Os tempos são baseados num microondas de 600w. Ajuste os tempos de aquecimento de acordo com a potência do seu microondas.

Água quente: Ferver a água, retirar do calor e mergulhar o pacote de gel durante aproximadamente 8-10 minutos. Em seguida, verificar se o gel atingiu a temperatura correta. Embrulhe o saco numa toalha e aplique-o.

Imagens do Artigo:

