

**Finalidade:**

O Elevador de sanita MOPEDIA é um dispositivo que tem como objetivo auxiliar utilizadores que tenham dificuldades de movimento. Enquadram-se nesta categoria os idosos, pessoas com problemas motores ou lesões que dificultem a locomoção, assim como os deficientes e as pessoas submetidas á cirurgia do quadril. É usado para elevar a altura do assento da sanita a um nível confortável, facilitando sentar e levantar.

**Características:**


Composição: Polipropileno; Altura 5cm  
Peso máximo do utilizador : 136Kg

**Dimensões:**

Dimensões internas: A: 27,3cm x B: 20,3cm



Dimensões externas: L: 39cm x P: 39cm

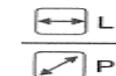

**Cor:** Branco

**Lote:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Declaração de Conformidade:** Dir. CE 93/42

**Modelo:** RP415-5

**Marca:** Mopedia

**Fabricante:** Moretti S.p.A.

**Morada do fabricante:** Via Bruxelles 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão  
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior  
2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com)

**Manutenção e armazenamento:**

Todas as partes do elevador de sanita poderão ser limpas com sabão e água quente ou desinfetadas com produtos específicos. Não utilizar produtos de limpeza agressivos. Verificar regularmente os parafusos e apertar novamente, se necessário.

**Instruções de Utilização:**

O elevador pode ser montado em segurança em todos os tipos de sanitários. O desenho ergonómico do assento proporciona maior conforto ao utilizador, reduzindo a pressão sobre o assento. Certifique-se de que o elevador de sanita está bem ajustado antes de colocar peso sobre o mesmo. O alteador de sanita ser verificado periodicamente para garantir que se encontra encaixado com segurança

- Não se apoie no alteador enquanto se senta ou levanta da sanita.

**Imagens do Artigo:**