

ÍNDICE

1. CÓDIGOS.....	PAG.3
2. INSTRUÇÕES.....	PAG.3
3. UTILIZAÇÃO.....	PAG.3
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE.....	PAG.3
5. ADVERTENCIAS GERAIS.....	PAG.4
6. SIMBOLOGIA UTILIZADA.....	PAG.4
7. CONSTITUIÇÃO.....	PAG.4
8. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO.....	PAG.5
9. CUIDADOS E HIGIENIZAÇÃO.....	PAG.5
10. CUIDADOS.....	PAG.6
11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	PAG.6
12. PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO E ACESSÓRIOS.....	PAG.6
13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO.....	PAG.6
14. GARANTIA.....	PAG.6
15. REPARAÇÃO.....	PAG.6
15.1 Reparação em garantia.....	pag. 6
15.2 Reparação não coberta pela garantia.....	pag. 7
15.3 Produtos sem defeito.....	pag. 7
16. PEÇAS DE REPOSIÇÃO.....	PAG.7
17. CLÁUSULAS EXONERATIVAS.....	PAG.7

CE Dispositivo médico de classe I
 REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO
 CONSELHO, de 5 de abril de 2017 relativo aos dispositivos médicos

1. CÓDIGOS

RP405-5	Alteador de sanita universal (5 cm)
RP415-5	Alteador de sanita universal com tampa (5 cm)
RP405-10	Alteador de sanita universal (10 cm)
RP415-10	Alteador de sanita universal com tampa (10 cm)
RP405-15	Alteador de sanita universal (15 cm)
RP415-15	Alteador de sanita universal com tampa (15 cm)

2. INSTRUÇÕES

Obrigado por adquirir alteador de sanita MOPEDIA da Moretti fabricados com o objectivo de auxiliar utilizadores com dificuldade de movimento. O seu desenho e qualidade garantem o máximo conforto, responsabilidade e segurança. MOPEDIA by Moretti alteadores de sanita são fabricados para satisfazer todas as suas necessidades. Este manual de instruções contém algumas dicas úteis para utilização correta do dispositivo, bem como alguns conselhos importantes para sua segurança. Em cas o de dúvidas, entre em contato com seu revendedor, que poderá ajudá-lo corretamente.

3. UTILIZAÇÃO

O alteador de sanita universal MOPEDIA é um dispositivo que tem como objetivo de ajudar os utilizadores que tenham dificuldades de movimento na utilização do WC.

AVISO!



- Não utilize o produto para uma finalidade não indicada neste manual.
- A Moretti S.p.A declina todas as responsabilidades por quaisquer consequências resultantes da utilização incorreta deste produto e de alterações não autorizadas na estrutura do produto.
- O fabricante reserva-se ao direito de alterar as informações contidas neste documento sem aviso prévio.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

A MORETTI SpA declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que os produtos fabricados e comercializados pela MORETTI SpA e fazendo parte da família de ELEVADORES DE SANITA estão em conformidade com as disposições aplicáveis do Regulamento 2017/745, de 5 de abril de 2017, relativo a DISPOSITIVOS MÉDICOS.

Para o efeito, a MORETTI SpA garante e declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, o seguinte:

1. Os dispositivos em objeto satisfazem os requisitos gerais de segurança e desempenho do anexo I do Regulamento 2017/745, conforme previsto no anexo IV do regulamento supracitado.
2. Os dispositivos em objeto NÃO SÃO INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO.
3. Os dispositivos em objeto NÃO SE DESTINAM A ESTUDOS CLÍNICOS.
4. Os dispositivos em objeto são comercializados em embalagens NÃO ESTÉREIS.
5. Os dispositivos em objeto devem ser considerados como pertencendo à classe I, em conformidade com as disposições do anexo VIII do regulamento supracitado.

6. A MORETTI SpA conserva e coloca à disposição das autoridades competentes, durante um prazo mínimo de 10 anos a partir da data de fabrico do último lote, a documentação técnica que comprova a conformidade com o Regulamento 2017/745.

Nota: Os códigos completos do produto, o código de registo do fabricante (SRN), o código UDI-DI de base e eventuais referências às normas utilizadas são indicados na Declaração de Conformidade UE emitida pela MORETTI SPA e disponibilizada através dos canais apropriados.

5. ADVERTENCIAS GERAIS

LEIA cuidadosamente o manual inteiro antes de utilizar o dispositivo

- Certifique-se de que o produto é entregue completo e mantenha-o longe de fontes de calor,
- Recomendamos que o produto seja usado por um utilizador,
- O dispositivo deve ser higienizado antes e depois de qualquer reutilização,
- O tempo de vida útil do dispositivo é definida pelo desgaste dos componentes não substituíveis/reparáveis, não sendo, de qualquer maneira, superior a 10 anos,
- NÃO permita que crianças brinquem ou manuseiem o dispositivo.
- O utilizador e/ou o paciente deve informar o fabricante e a autoridade competente do estado-membro onde se encontra sobre qualquer acidente grave que ocorra com o dispositivo.
- Não utilizar o produto em caso de defeito
- Cuidado - Perigo de escorregamento/queda
- A tampa aberta não deve ser utilizada como um encosto
- A tampa fechada não deve ser sujeita a cargas
- Verifique regularmente se a tampa da sanita assenta firmemente sobre a sanita. Apertar os parafusos de fixação, se necessário.

6. SIMBOLOGIA UTILIZADA

- | | |
|---|--|
|  | Código do produto |
|  | Identificador exclusivo do dispositivo |
|  | Marca CE |
|  | Fabricante |
|  | Lote de produção |
|  | Ler o manual de instruções |
|  | Dispositivo médico |
|  | Condições de eliminação |

7. CONSTITUIÇÃO



(imagens para fins ilustrativo)

8. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Insira os suportes laterais procedendo da seguinte forma: vire o alteador de sanita MOPEDIA ao contrário e coloque-o sobre uma superfície plana. Insira os suportes nos nas guias laterais apropriadas. Empurre-os e gire a manopla do parafuso no sentido horário para encaixar os suportes no alteador de sanita. Coloque os suportes na parte mais externa para evitar problemas com a colocação do elevador na sanita.



AVISO!

Se o parafuso ficar solto encaixe-o firmemente contra a ranhura da guia, na zona superior. Mantenha-o pressionado nessa posição para garantir o bom ajuste.

N.B. Nesta fase, não aperte os suportes, caso contrário, não será possível posicionar o elevador de sanita MOPEDIA na sanita.

2. Levante a tampa e o assento da sanita e coloque o elevador de sanita universal MOPEDIA na cerâmica. Os suportes devem ser posicionados na zona trasera da sanita. Certifique-se de que o bordo interno fica colocado do lado de dentro da sanita e o bordo externo fica do lado de fora. Por favor, note que o elevador de sanita tem que se encaixar na cerâmica.

N.B. O elevador de sanita deve ficar encaixado perfeitamente na sanita

3. Aperte os suportes no sentido horário até que o elevador de sanita MOPEDIA esteja bem ajustado.



AVISO!

O sistema de bloqueio lateral foi concebido para permitir um ajuste facilitado.

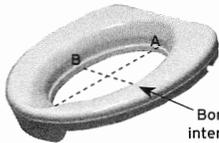
9. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Limpar regularmente à mão com um pano húmido
- Não utilizar agentes de limpeza agressivos
- Não utilizar produtos de limpeza abrasivos
- Não utilizar agentes de limpeza com elevado teor de cloro ou vinagre
- O spray desinfetante à base de álcool pode ser utilizado para desinfecção
- Verificar regularmente os parafusos e apertar novamente, se necessário.
- O produto não deve ser submetido a temperaturas superiores a 60 °C durante longos períodos (por exemplo, em saunas, etc.).
- Em caso de defeito, queira contactar o revendedor a quem adquiriu o produto.

10. CUIDADOS

- O elevador de sanita não deve ser utilizado em utilizadores com mais de 136 kg,
- Certifique-se de que o alteador de sanita está bem ajustado antes de colocar peso sobre o mesmo. O alteador de sanita ser verificado periodicamente para garantir que se encontra encaixado com segurança
- Não se apoie no alteador enquanto se senta ou levanta da sanita.

11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGOS	RP405-5 RP415-5	RP405-10 RP415-10	RP405-15 RP415-15
Dimensões externas	↔ L: 39 cm		
	↗ P: 39 cm		
Bordo interno  (imagens para fins ilustrativo)	A: 27,3 cm	A: 28,5 cm	A: 27,3 cm
	B: 20,3 cm	B: 21,5 cm	B: 20,3 cm
Max. peso do utilizador	136 kg		

12. PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO E ACESSÓRIOS

Para peças substituição e acessórios, consulte o catálogo da Moretti.

RP431 Kit de parafusos

13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO

Em caso de eliminação do dispositivo, nunca utilize os sistemas normais de eliminação de resíduos sólidos urbanos. Em vez disso, é recomendável eliminar o dispositivo utilizando as ilhas ecológicas municipais comuns previstas para as operações de reciclagem de materiais usados.

14. GARANTIA

Os produtos Moretti têm garantia de falhas materiais ou de fabrico por um período de dois anos. A garantia não se aplica em caso de danos causados por uso indevido ou se as instruções não forem rigorosamente seguidas. A correta utilização está especificada neste manual.

A Moretti não se responsabiliza por qualquer dano resultante de lesão corporal, instalação incorreta ou uso indevido. A Moretti Moretti não garante os produtos contra danos ou defeitos nas seguintes condições: desastre natural, manutenção ou reparo não autorizado, danos devido a problemas de fornecimento de energia (quando fornecidos), uso de peças de reposição não fornecidas pela Moretti, uso indevido, alteração não autorizada, danos no transporte (outros que não a embalagem original da Moretti), ou em caso de manutenção insuficiente, conforme indicado no manual. A garantia não cobre componentes sujeitos a desgaste durante o uso correto do dispositivo.

15. REPARAÇÃO

15.1 Reparação em garantia

No caso de um produto Moretti estar com defeito no que diz respeito a falhas de material ou de fabrico durante o período de garantia, a Moretti confirmará com o cliente se a falha pode ser coberta pela garantia. A Moretti, a seu exclusivo critério, pode consertar ou substituir o item sob garantia num revendedor Moretti ou na própria sede. Nestes casos os custos de reparação são cobertos pela Moretti. A reparação ou substituição não renovam ou estendem a garantia.

15.2 Reparação não coberta pela garantia

No caso do produto não se encontrar dentro do período de garantia, os custos de reparação não são suportados pela Moretti. Os custos de mão-de-obra e envio para a reparação será totalmente suportado pelo cliente ou revendedor. A reparação destes produtos tem garantia de seis (6) meses a partir da data em que você receber o produto reparado. Produtos sem defeito.

15.3 Produtos sem defeito

O cliente será informado se, após ter examinado e testado os produtos devolvidos, a Moretti alega que o produto está sem defeito. Neste caso, o produto será devolvido ao cliente e todos os custos de envio serão pagos pelo cliente.

16. PEÇAS DE REPOSIÇÃO

As peças de reposição originais da Moretti são garantidas por 6 (seis) meses a partir da data de receção.

17. CLÁUSULAS EXONERATIVAS

Exceto quando especificamente especificado nesta garantia e dentro dos limites da lei, a Moretti não estabelece nenhuma outra declaração, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo quaisquer declarações, garantias ou condições de comercialização, adequação a um propósito específico, não violação e não interferência. A Moretti não garante que o uso do produto seja ininterrupto ou livre de erros. A duração de quaisquer garantias implícitas que possam ser impostas por lei é limitada ao período garantia, dentro dos limites da lei. Alguns estados ou países não permitem limitações na duração de uma garantia implícita ou a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequentes em conexão com produtos para consumidores. Nesses estados ou países, algumas exclusões ou limitações desta garantia podem não se aplicar ao utilizador. Esta garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 - Melegnano
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com