



Manual de Utilizações

Ref.ª 150.015 – Saco Hot-Cold Soft Pack 40x28



Utilização a Frio:

Manter o produto no congelador entre 15 a 18º C

Retirar após 2 Horas

Para a utilização a frio: Olhos irritados, lacrimejantes ou vermelhos, comichão ou inchaço nas pálpebras, dores de cabeça, enxaquecas, alergias, febre dos fenos, irritação da pele, por exemplo, após tratamentos cosméticos.



Utilização a Quente:



Levar a água a ferver numa panela, depois de fervida, retirar do calor e mergulhar o saco na água a ferver durante 7 a 10 minutos



Aquecer no micro-ondas com a potência de: 600 Watts – Retirar a o saco após 1 minuto, mexer bem e se necessário prolongar o tempo de aquecimento em intervalos curtos.

Para a utilização a quente: Bloqueio dos seios nasais, preparação para tratamentos, relaxamento.

Indicações/Finalidade:

A Almofada Sissel – Saco Hot-Cold Soft Pack, pode ser colocada precisamente no local onde o tratamento é necessário. A embalagem dá um alívio num instante. Pode ser usado para tratamento no pescoço, costas, ombros e rins.

Áreas de aplicação:

Inchaços, inflamação, nódoas negras, entorses, lesões de desporto, dores de cabeça, enxaqueca, dores musculares, tratamento de beleza e relaxamento.

Precauções:

- . Evitar o contacto directo com a pele (por exemplo, envolver o saco numa toalha);
- . Não aplicar o saco em áreas sensíveis;
- . Não utilizar o saco caso esteja danificado;
- . Não é adequado para utilizar em crianças pequenas;
- . Se o conteúdo do saco entrar em contacto com a pele ou olhos, enxaguar cuidadosamente. Caso ficar avermelhado ou notar irritação, consulte um médico:
- . Limpeza: Água com sabão ou um desinfetante suave.

