

**Finalidade:** As pirâmides tripé são auxiliares manipulados por um braço, que servem para amparar e/ou ajudar a mobilidade das pessoas com dificuldade de locomoção.

**Características:** Alumínio anodizado com pega anatômica de apoio ao antebraço, ponteira em borracha antiderrapante. Regulável em altura de 2,5 em 2,5 cm. Peso máximo do utilizador 100 kg.

**Data de inspeção:** (Quando Aplicável)

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Cinzento e metalizado

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** RP719

**Marca:** Mopedia

**Dimensões:** Ajustável em altura: 76 a 98 cm

Base: 37 x 27 cm

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** Moretti S.p.A.

**Morada do fabricante:** Via Bruxelles 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:** Recomendamos que deixe verificar o aparelho pelo fabricante ou por laboratório autorizado de 2 em 2 anos. Em caso de reparação, utilize apenas peças sobressalentes originais e acessórios. se precisar de desinfetar o dispositivo, utilize um detergente desinfetante suave.

**Instruções de Utilização:** Agarre o dispositivo com a mão oposta ao da perna debilitada e com o lado mais amplo da base de apoio virado para dentro. Avance a pirâmide ao mesmo tempo que avança com a perna debilitada, carregando todo o peso sobre a perna mais forte. Durante a locomoção, tenha o cuidado de não apoiar o dispositivo muito perto do corpo, para evitar tropeçar numa das ponteiros nem muito afastado, para evitar desequilibrar-se. No caso de utilização de escadas, verifique se o tamanho dos degraus é suficiente para a base do auxiliar. Em caso afirmativo, avance primeiro a perna mais forte, depois o dispositivo e, por último, a perna mais debilitada. Para descer as escadas, deve avançar o dispositivo, a perna doente e por último a perna sã. Se for necessário, deixe-se ajudar por um assistente.

**Imagens do Artigo:**

