

Finalidade: Grua / elevador destina-se a elevar e transferir pessoas com dificuldades motoras, com o auxílio de um assistente que aciona os comandos. Não deve ser utilizado por uma única pessoa.

Características:

Estrutura desmontável em aço pintado retangular.

Rodas giratórias de 10cm, duas das quais com travão.

Motor a bateria TiMotion. Kit elétrico.

Base regulável em largura para garantir a estabilidade e facilitar o acesso a espaços apertados.

Botão de paragem de emergência. Aviso acústico e visual de fim de bateria no controlo remoto.

Bateria amovível. Mais de 40 ciclos em carga máxima.

Descida manual de emergência. Segurança anti esmagamento. Abertura da perna com pedal.

Punhos: Poliuretano

Peso do elevador com estrutura e kit elétrico: 36 kg

Peso máximo suportado 200Kg.

Cesta incluída RP881 – Tamanho único

Lote: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo

Cor: Cinzento e Azul

Modelo: RI826

Caixa: 1 Unidade

Certificado: 805287964202104Q5

Diretiva 93/42/EEC;

Classificação: Dispositivo médico - Classe I;

Marca: Moretti;

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada: Via Bruxelles, 3 – Meleto. 52022 Cavriglia (Italia)

Importador e Distribuidor: Gerimais,Lda.

Morada do Importador e Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção: Para limpar os arneses e a estrutura, utilize uma solução de álcool e sabão neutro em partes iguais misturados com água.

Siga o manual de instruções atentamente

Instruções de Utilização:

Para uma utilização correta do dispositivo, consultar o Manual de instruções. Prestar especial atenção à manutenção e às precauções a ter antes de cada utilização.

Garantir que a montagem é feita seguindo o manual de instruções.

Para efetuar a deslocação do paciente, garanta sempre, que o paciente se encontra na posição correta e que não existe qualquer obstáculo.

Não exceda a capacidade máxima permitida.

Imagens do Artigo:

