



MA RP881 02 B_ENG_10 2021

Cesta(sling) para Gruas
Manual de Instruções

PORTUGUÊS

INDICE

1.CÓDIGO.....	PAG.3
2.INTRODUÇÃO.....	PAG.3
3.UTILIZAÇÃO PREVISTA	PAG.3
4.DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	PAG.3
5.ADVERTÊNCIAS GERAIS	PAG.4
6. SÍMBOLOS.....	PAG.4
7. DESCRIÇÃO GERAL	PAG.5
8.ANTES DA UTILIZAÇÃO	PAG.5
9.ADVERTÊNCIA DE USO	PAG.5
10.COMO USAR	PAG.6
10.1 De uma posição sentada	pag. 6
10.2 De uma posição deitada	pag. 6
11.MANUTENÇÃO.....	PAG.6
12.LIMPEZA E DESINFEÇÃO	PAG.7
13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO	PAG.7
14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PAG.7
15.GARANTIA	PAG.8
16.CLÁUSULAS ISENTAS	PAG.8

 Dispositivo médico de classe I

REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 5 April 2017 concerning medical devices

1. CÓDIGO

RP881 Cesta standard com apoio de cabeça

2. INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir uma cesta(sling) MOPEDIA da gama de produtos Moretti S.p.A. Este manual do utilizador fornece algumas sugestões sobre como utilizar corretamente o produto que escolheu e dá alguns conselhos valiosos para a sua segurança. Por favor, leia atentamente o manual antes de utilizar o produto. Se tiver alguma dúvida, contacte o seu revendedor para aconselhamento e assistência.

Em caso de dúvidas, recomendamos que contacte o concessionário que o pode ajudar e aconselhar adequadamente.

3.UTILIZAÇÃO PREVISTA

As cestas(slings) MOPEDIA da MORETTI são projetados para transportar pacientes com dificuldade de mobilidade.



- Não utilizar o produto para um fim não indicado neste manual.
- A Moretti S.p.A. declina qualquer responsabilidade por quaisquer consequências resultantes de uma utilização incorreta deste produto e de alterações não autorizadas à estrutura do produto
- O fabricante reserva-se o direito de alterar as informações contidas neste documento sem aviso prévio

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Moretti S.p.A. declara, sob sua exclusiva responsabilidade, que o produto fabricado e comercializado pela Moretti S.p.A. e pertencente ao grupo de "SLINGS STANDARD" está em conformidade com as disposições do regulamento 2017/745 sobre DISPOSITIVOS MÉDICOS de 5 de abril de 2017.

Para o efeito, a Moretti S.p.A. garante e declara sob a sua exclusiva responsabilidade o seguinte:

- Os dispositivos satisfazem os requisitos gerais de segurança e desempenho exigidos pelo anexo I do Regulamento 2017/745, conforme estabelecido no anexo IV do regulamento acima referido.
- Os dispositivos NÃO SÃO INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO.
- Os dispositivos NÃO SÃO FEITOS PARA TESTES CLÍNICOS.
- Os dispositivos são embalados em CAIXA NÃO ESTÉRIL.
- Os dispositivos pertencem à classe I, em conformidade com as disposições do anexo VIII do regulamento acima referido
- A Moretti S.p.A. fornece às Autoridades Competentes a documentação técnica para comprovar a conformidade com o regulamento 2017/745, durante pelo menos 10 anos a partir da produção do último lote.

Nota: Os códigos completos dos produtos, o código de registo do fabricante (SRN), o código UDI-DI e quaisquer referências aos regulamentos utilizados estão incluídos na declaração UE de conformidade que a Moretti S.p.A. divulga e disponibiliza através dos seus canais

5. ADVERTÊNCIA GERAL

- NÃO use este produto ou qualquer equipamento opcional disponível sem primeiro ler e entender este manual de instrução.
- Aconselhar com o médico ou terapeuta para determinar o ajuste de correto e a correta utilização da cesta.
- Desinfete o artigo após cada utilização.
- VIDA ÚTIL: O limite de utilização da cesta é definido pelo desgaste das peças
- O utilizador e/ou o doente terá de notificar qualquer acidente grave que tenha ocorrido relacionado com o dispositivo ao fabricante e autoridade competente do Estado a que pertence o utilizador e/ou doente .



- Leia atentamente o manual do elevador de pacientes ou do elevador de pé e siga as instruções sugeridas no mesmo.
- Em caso de utilização de arneses com uma carga máxima diferente da fornecida para o elevador ou o elevador de pé, utilizar sempre a carga máxima mais baixa.

6. SIMBOLOS



CÓDIGO DO PRODUTO



Identificação única do dispositivo



Marca CE



Fabricante



Lote



Leia o Manual de Instruções



Dispositivo Médico



Condições de Eliminação



Temperatura máxima de lavagem 30°, processo muito suave



Enxaguar muito suavemente, não torcer



Não Branquear



Não passar a ferro




Não secar na máquina de secar roupa



Não lavar a seco

7 DESCRIÇÃO GERAL

Cesta (Sling) para todo o tipo de elevador de pacientes. Fabricado em poliéster (100%), especialmente adequado para contacto com a água, resistente e respirável, costurado com linha de poliéster. A borda é feita por uma fita forte (100% nylon), que faz três ilhós em cada extremidade para garantir um equilíbrio perfeito, o cinto continua e gira em torno de todo o perímetro da cesta(sling) para garantir maior resistência. As costuras são feitas usando fio de poliéster de alta resistência.

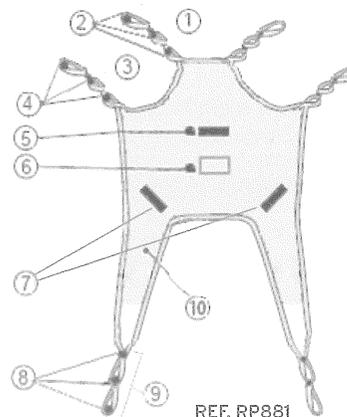

REF. RP881

1. Ilhó superior
2. Laços/anéis
3. Ilhó Intermédio
4. Laços/anéis
5. Pega de movimento
6. Etiqueta
7. Pega de movimento
8. Ilhó inferior
9. Laços/anéis

8. UTILIZAÇÃO

Verificar sempre se a funda está em perfeitas condições, verificar cuidadosamente as costuras e os anéis/laços.

9. Utilização do aviso

- Antes de utilizar, certifique-se de que o dispositivo não está danificado: o tecido, o rebordo, a costura e os anéis de suspensão devem estar intactos;
- Verificar periodicamente a existência de danos ou de usura, pelo menos de 6 em 6 meses, em especial se limpar frequentemente a cesta (sling)
- Assegurar que os laços estão corretamente engatados no suporte.
- Armazenar e utilizar longe de chamas ou fontes de calor.
- Não exceder a carga máxima



- Consulte sempre o manual do utilizador do elevador de pacientes ou do suporte em que instala o arnês e siga rigorosamente as instruções fornecidas



- Avaliar o risco, a fim de garantir a unidade de apoio corporal exata para o paciente, de acordo com as dimensões, tipologia e forma corretas para o mesmo.
- Em caso de utilização de uma cesta (sling) com uma carga máxima diferente da fornecida para o elevador ou o elevador de pé, utilizar sempre a carga máxima mais baixa.

10. COMO UTILIZAR

As cestas(slings) MOPEDIA da Moretti podem caber em todos os elevadores/gruas de elevador de pacientes, fixos e móveis.



Fig.1

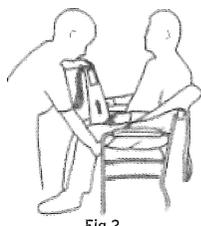


Fig.2



Fig.3

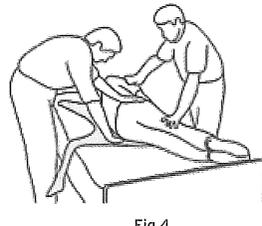


Fig.4

10.1 De uma posição sentada

1. Assegurar que as precintas estão viradas para fora. Puxar a cesta(sling) para baixo até às costas do utilizador, deixando a abertura da funda na base da coluna vertebral.
2. Verificar se a cesta (sling) está corretamente alinhada à altura do ombro. (Fig.1)
3. Levantar a perna do doente, passar a precinta por baixo dela e puxá-la para cima entre as pernas, certificando-se de que a funda não fica dobrada por baixo da coxa. (Fig.2)
4. Repetir o procedimento com a outra perna.
5. Cruze as correias sobre as pernas e prenda-as às argolas frontais da barra de suporte do guincho.
6. Levante ligeiramente a talha e prenda as correias de ombro mais curtas à barra de suporte. Mova a talha na direção do doente enquanto faz isto. (Fig.3)



ATENÇÃO! As alças compridas são para as pernas e as curtas para os ombros

10.2 Da posição deitada

1. Virar o doente para o lado e posicionar a funda na cama (Fig.4) (a funda tem de ser lisa, sem rugas, e estar alinhada corretamente à altura dos ombros)
2. Certifique-se de que a abertura na parte inferior da funda está posicionada na base da coluna vertebral.
3. Voltar a deitar o doente de costas (posição supina)
4. Cruzar as bandas por baixo das pernas do doente e ajustar a funda como indicado para a posição sentada (Fig.2), mantendo as bandas dos ombros o mais curtas possível. 5. Está agora pronto para pendurar as bandas no berço (Fig.3).

NOTA: Moretti recomenda a utilização de dois assistentes (um de cada lado da cama) quando posicionar o doente numa cesta(sling).



ATENÇÃO! Assegurar que a cabeça do doente está sempre apoiada

11. Manutenção

Os dispositivos MOPEDIA da MORETTI são cuidadosamente controlados e fornecidos com a marca CE, uma vez lançados no mercado.

Para a segurança do paciente e do médico, recomendamos que o aparelho seja verificado pelo fabricante ou por um laboratório autorizado de 6 em 6 meses.

12. LIMPEZA E DESINFECÇÃO



Temperatura máxima de lavagem 30°C; processo muito suave



Enxaguar muito suavemente, não torcer



Não branquear



Não passar a ferro



Não secar na máquina de secar roupa



Não limpar a seco

13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO


Em caso de eliminação, não utilizar o contentor de inserção para resíduos urbanos. Recomendamos que a funda seja depositada nas áreas de eliminação adequadas para reciclagem.

14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REF. RP881

MATERIAL 100% poliéster e cinta 100% nylon (tecido retardador de chama EN)
 PESO MÁXIMO 1021) 200 Kg

Size	A	B	C	D
ONE SIZE	143 cm	80 cm	93 cm	35 cm

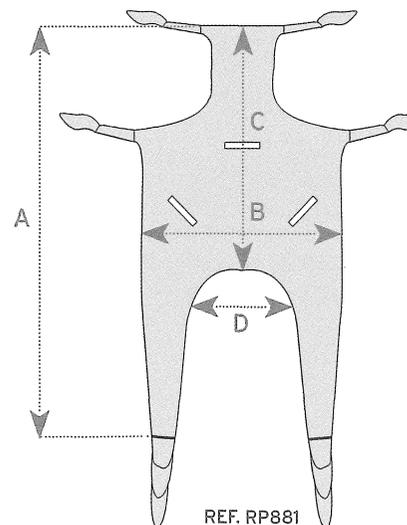

REF. RP881

15. GARANTIA

Os produtos Moretti são garantidos contra defeitos de material ou de fabrico durante 2 anos a partir da data de compra, exceto no caso de possíveis exclusões ou restrições como se segue. A garantia não será aplicada nas possíveis situações causadas por uso impróprio, abuso ou alteração, e a garantia não será válida se as instruções de uso não forem estritamente respeitadas.

A utilização correcta prevista é especificada neste manual.

A Moretti não se responsabiliza por danos consequentes, lesões pessoais ou danos causados por ou em relação a uma instalação incorrecta ou utilização inadequada.

A garantia Moretti não cobre danos resultantes de: desastres naturais, manutenção ou reparações não autorizadas, falhas causadas por problemas no fornecimento de energia eléctrica (quando necessário), uso de peças sobressalentes não cobertas pela Moretti, uso irresponsável, manutenção não autorizada, danos causados por electricity supply (quando necessário), uso de peças sobressalentes não cobertas por Moretti, uso improprio ou alteração não autorizada, danos de transporte (diferente do envio original de Moretti), ou em caso de manutenção insuficiente como indicado no manual.

A garantia não cobre componentes sujeitos a desgaste durante a utilização correcta do aparelho.

16. CLÁUSULAS DE ISENÇÃO

A Moretti não oferece qualquer outra declaração, explicação ou garantia ou condições, incluindo possíveis declarações, garantias ou condições de comercialização, adequação a um objetivo específico, não infração e não interferência, tudo exceto o expressamente especificado nesta garantia. A Moretti não garante a utilização ininterrupta e sem falhas do artigo.

A duração das possíveis garantias implícitas que podem ser impostas pela lei é limitada pelo período de garantia, nos limites da lei. Alguns estados ou países não permitem a limitação da garantia ou a exclusão ou limitação de danos acidentais.

A presente garantia pode ser modificada sem notificação prévia.



certificado de garantia

Product _____

Purchased on (date) _____

Retailer _____

Address _____ Town/city _____

Sold to _____

Address _____ Town/city _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.