

**Finalidade:** Esta cadeira de rodas é indicada para a mobilidade de pessoas com limitações motoras e pode ser utilizada de forma autopropulsora (caso equipada com rodas traseiras grandes) ou com o auxílio de um acompanhante.

Em todas as situações, é necessário o auxílio de um operador para realizar os ajustes necessários.

**Características:** Estrutura estabilizadora em aço pintado em cruz simples, assento e encosto em nylon preto acolchoado e lavável, bolso de documentos na parte traseira. Rodas traseiras (Ø 30 cm), pneus de PU pretos. Rodas dianteiras pretas de PU (Ø 20 cm – 3 cm de espessura) com garfo de aço. Apoios de braço curtos dobráveis com acolchoamento de PU. Apoios de pés removíveis ajustáveis em comprimento com apoio para os pés e tira de calcanhar em plástico preto.

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** CP500B-48

**Marca:** ARDEA ONE

**Dimensões:** Altura 91cm, largura do assento 48cm

Peso máximo suportado: 120Kg

Peso 16,5Kg

**Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)**  
Regulamento (UE) 2017/745

**Fabricante:** Moretti S.p.A

**Morada do fabricante:** Via Bruxelas, 3 - Meleto

52022 Cavriglia (Arezzo) – [www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda.

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira,  
nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior 2040-357 Rio  
Maior [geral@gerimais.com](mailto:geral@gerimais.com) Tel. 243 050 100

**Manutenção e armazenamento:** Os revestimentos, almofadas, estrutura, rodas e travões podem ser limpos com água e sabão neutro. Após a limpeza, secar bem, especialmente as rodas, para garantir segurança e evitar danos. Para desinfeção, utilizar um desinfetante comum. Não usar produtos ácidos, alcalinos ou solventes. Guarde em local fresco e seco, sempre longe de fontes diretas de calor.

**Instruções de Utilização:** Posicionar a cadeira de rodas junto ao utilizador e bloquear os travões traseiros antes da utilização. Auxiliar o utilizador a sentar-se lentamente, apoiando-se na estrutura da cadeira. Ajustar os apoios de pés conforme necessário, garantindo conforto e estabilidade. Durante a utilização, a deslocação deve ser feita com o auxílio de um acompanhante, utilizando as pegadas traseiras. Antes de cada utilização, verificar o correto funcionamento dos travões e o estado geral das rodas. Atenção: Não apoiar o peso do corpo nos apoios de pés durante a entrada ou saída (risco de tombamento). Garantir que as rodas estão secas antes da utilização.

**Imagens do Artigo:**

