



PT

M/A CP100X-XX_CP103X-XX_CP104-XX_CP105-XX_CP500X-XX_CP505-XX_04 A_PT_11-2025

Carrozzine Ardea One **MANUAL DE INSTRUÇÕES**

SUMÁRIO

1. CÓDIGOS	PÁG.3
2. INTRODUÇÃO.....	PÁG.3
3. FINALIDADE DE USO.....	PÁG.3
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE	PÁG.3
5. AVISOS GERAIS	PÁG.4
6. SIMBOLOGIA UTILIZADA.....	PÁG.4
7. DESCRIÇÃO GERAL	PÁG.5
7.1 Visão geral e lista de componentes	pág. 5
8. MONTAGEM/DESMONTAGEM.....	PÁG.5
8.1 Abertura	pág. 5
8.2 Fechamento	pág. 6
8.3 Instalação/remoção dos apoios de braço	pág. 6
8.4 Instalação/remoção dos apoios para os pés laterais ou elevatórios.....	pág. 6
8.5 Ajuste das plataformas laterais	pág. 7
8.6 Ajuste das plataformas elevatórias (OPCIONAL)	pág. 7
8.7 Instalação/remoção das rodas traseiras pequenas (apenas para GO!).....	pág. 7
8.8 Ajuste dos travões com rodas traseiras pequenas (apenas para GO!).....	pág. 8
8.9 Instalação/remoção das rodas traseiras grandes (apenas para START/START2 e START3)	pág. 8
8.10 Ajuste dos travões com rodas traseiras grandes (apenas para START/START2 e START3)	pág. 8
9. ANTES DE CADA USO	PÁG.9
10. ORIENTAÇÕES DE USO.....	PÁG.9
11. COMO UTILIZAR.....	PÁG.9
11.1 Subir na cadeira de rodas.....	pág. 9
11.2 Descer da cadeira de rodas.....	pág. 9
11.3 Degraus e desníveis (dicas para superá-los sozinho com mais facilidade)	pág. 9
11.4 Uso dos apoios de braço.....	pág. 10
11.5 Uso das rodas de autopropulsão	pág. 10
11.6 Uso das rodas pequenas	pág. 10
11.7 Uso das rodas pequenas para passagens estreitas (de série em modelos com sistema de liberação rápida).....	pág. 10
11.8 Transporte em meios de locomoção	pág. 10
12. MANUTENÇÃO	PÁG.10
13. LIMPEZA E DESINFECÇÃO	PÁG.11
13.1 Limpeza de revestimentos e almofadas	pág. 11
13.2 Limpeza da estrutura e partes metálicas	pág. 11
13.3 Limpeza das rodas e dos travões.....	pág. 11
13.4 Desinfecção	pág. 11
14. CONDIÇÕES PARA DESCARTE	PÁG.11
15. PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS	PÁG.11
16. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PÁG.12
16.1 Dimensões	pág. 12
16.2 Especificações técnicas	pág. 12
17. GARANTIA	PÁG.13
17.1 Reparos.....	pág. 13
17.2 Peças de reposição.....	pág. 13
17.3 Cláusulas de isenção de responsabilidade.....	pág. 13

CE Dispositivo médico classe I
REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU E
CONSELHO de 5 de abril de 2017 sobre dispositivos médicos

1. CÓDIGOS

CP100x-xx	Série START rodas 60 cm - Dobrável autopropulsável
CP103x-xx	Série START2 rodas 60 cm - Dobrável autopropulsável
CP104-xx	Série START3 rodas 60 cm -#797a7dff> Dobrável autopropulsável, dupla cruzeta, duplo encaixe
CP105-xx	Série START3 GO! rodas de 30 cm - Dobrável para transitar, dupla cruzeta, dois furos
CP500x-xx	Série GO! rodas de 30 cm - Dobrável para transitar
CP505-xx	Série GO!2 rodas de 30 cm - Dobrável para transitar com dupla cruzeta

(x = indica que o modelo está disponível em várias cores; xx = Refere-se às medidas do assento)

2. INTRODUÇÃO

Agradecemos por escolher uma cadeira de rodas **ARDEA ONE** da Moretti S.p.A., desenvolvida para facilitar o deslocamento de pessoas com dificuldades de locomoção, tanto em casa quanto em viagens ou nas tarefas do dia a dia. Este manual oferece orientações práticas para o melhor uso do produto que você escolheu, além de dicas valiosas para a sua segurança. Recomendamos a leitura atenta de todo o conteúdo antes de utilizar a cadeira de rodas. Em caso de dúvidas, entre em contato com o revendedor, que poderá auxiliá-lo da melhor forma.

Nota: Verifique se todas as partes da cadeira de rodas estão intactas após o transporte. Em caso de danos, não utilize o produto e procure o revendedor para orientações.

3. FINALIDADE DE USO

Esta cadeira de rodas é indicada para a mobilidade de pessoas com limitações motoras e pode ser utilizada de forma autopropulsora (caso equipada com rodas traseiras grandes) ou com o auxílio de um acompanhante.

Em todas as situações, é necessário o auxílio de um operador para realizar os ajustes necessários.

ATENÇÃO!



- É proibido utilizar este dispositivo para qualquer finalidade diferente daquelas descritas neste manual.
- A Moretti S.p.A. se isenta de qualquer responsabilidade por danos resultantes do uso inadequado do dispositivo ou por uso fora das recomendações deste manual.
- O fabricante reserva-se o direito de modificar o dispositivo e este manual sem aviso prévio, visando aprimorar suas características.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

A MORETTI S.p.A. declara, sob sua exclusiva responsabilidade, que os produtos fabricados e comercializados pela própria empresa, pertencentes à linha de CADEIRAS DE RODAS ARDEA ONE, estão em conformidade com as disposições aplicáveis do regulamento 2017/745 sobre DISPOSITIVOS MÉDICOS, de 5 de abril de 2017.

Para esse fim, a MORETTI S.p.A. assegura e declara, sob sua total responsabilidade, o seguinte:

1. Os dispositivos em questão atendem aos requisitos gerais de segurança e desempenho conforme exigido pelo Anexo I do regulamento 2017/745, segundo o prescrito pelo Anexo IV do mesmo regulamento.
2. Os dispositivos em questão NÃO SÃO INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO.
3. Os dispositivos em questão NÃO SÃO DESTINADOS A INVESTIGAÇÕES CLÍNICAS.
4. Os dispositivos em questão são comercializados em embalagem NÃO ESTÉRIL.











5. Os dispositivos mencionados devem ser considerados pertencentes à classe I, conforme definido no Anexo VIII do referido regulamento.
6. A MORETTI S.A. mantém e disponibiliza para as Autoridades Competentes, por pelo menos 10 anos a partir da fabricação do último lote, a documentação técnica que comprova a conformidade com o regulamento 2017/745.

Nota: Os códigos completos dos produtos, o código de registo do Fabricante (SRN), o código base UDI-DI e possíveis referências às normas utilizadas estão indicados na Declaração de Conformidade da UE, emitida e disponibilizada pela MORETTI S.A. em seus canais oficiais.

5. ADVERTÊNCIAS GERAIS

- Para utilizar o dispositivo corretamente, siga atentamente as instruções deste manual.
- Consulte sempre seu médico ou terapeuta para garantir o uso adequado do dispositivo.
- Mantenha o produto embalado longe de fontes de calor, pois a embalagem é de papelão.
- A vida útil do dispositivo depende do desgaste de peças que não podem ser reparadas ou substituídas.
- Fique atento às partes móveis, pois podem prender membros e causar lesões.
- Redobre a atenção na presença de crianças.
- Para levantar a cadeira de rodas corretamente, feche-a conforme as instruções deste manual e segure pelas alças.
- Não levante a cadeira de rodas por partes removíveis, pois podem se soltar durante o movimento.
- O usuário ou paciente deve informar ao fabricante e à autoridade competente do Estado membro sobre qualquer incidente grave relacionado ao dispositivo.


6. SIMBOLOGIA UTILIZADA

	Código do produto
	Identificador exclusivo do dispositivo
	Número de série
	Selo CE
	Fabricante
	Lote de fabrico
	Leia o manual para instruções
	Equipamento Médico
	Instruções para descarte
	Peso máximo suportado

7. DESCRIÇÃO GERAL


7.1 Visão e lista de componentes

De acordo com o modelo de cadeira de rodas escolhido, estes são os itens que a compõem:

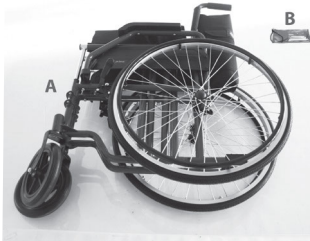


A - Estrutura base da cadeira de rodas


B - Kit de chaves para montagem

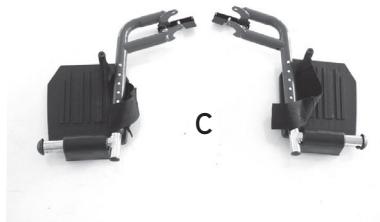

C - Apoios laterais para os pés

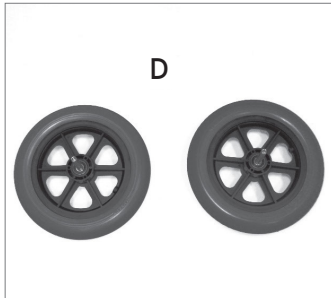

D - Rodas traseiras pequenas (diâmetro 30 cm) modelo trânsito

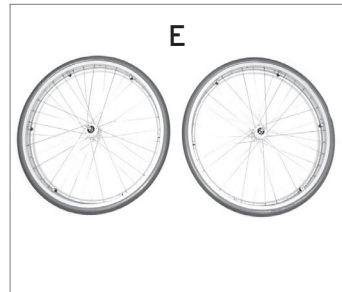

E - Rodas traseiras grandes (diâmetro 60 cm) modelo autopropulsão

8. MONTAGEM/DESMONTAGEM

8.1 Abertura



(FIG.1)

Nota: consulte as orientações de segurança deste manual de instruções.

Segure os tubos das alças e puxe para fora, pressionando o assento para baixo, garantindo que a cadeira de rodas fique completamente aberta (FIG.1)

8.2 Fechamento



- Levante o assento com firmeza e feche a cadeira de rodas aproximando as duas alças de empurrar (FIG.2)

8.3 Instalação/remoção dos apoios de braço

CP100x-xx / CP103x-xx / CP104-xx / CP105-xx / CP500x-xx / CP505-xx



(FIG.3)



(FIG.4)

Imagens meramente ilustrativas

- Encaixe os apoios de braço na fixação traseira, depois gire-os para frente e prenda-os também no suporte dianteiro (FIG.3)
- Para remover, pressione a alavanca de liberação dianteira, em seguida gire os apoios de braço para trás e puxe o botão de liberação traseiro para soltá-los (FIG.4)

8.4 Instalação/remoção das plataformas laterais ou elevatórias




(FIG.5)

- Para instalar as plataformas laterais ou elevatórias, alinhe os furos dos suportes com os pinos correspondentes no quadro da cadeira de rodas, depois gire a plataforma para dentro até que a trava se encaixe corretamente no quadro (FIG.5)
- Para remover, destrave a plataforma do quadro, gire-a para fora e puxe para cima


8.5 Ajuste dos apoios laterais para os pés

(FIG.6)

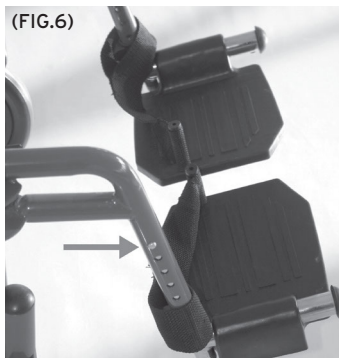

- Para ajustar o comprimento dos apoios para os pés, destrave a alavanca de segurança esquerda localizada na parte inferior, pressione o botão de mola e deslize o tubo da plataforma até que o botão encaixe novamente no orifício desejado. Em seguida, trave a alavanca de segurança mais uma vez. (FIG.6)

8.6 Ajuste das plataformas elevatórias (OPCIONAL)

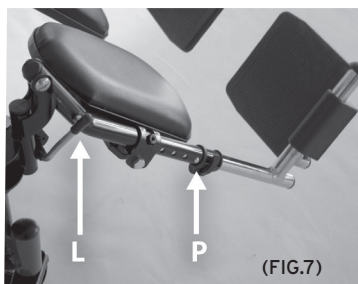

- Para ajustar o comprimento das plataformas, destrave a alavanca de segurança localizada à esquerda na parte inferior, pressione o botão de mola e deslize o tubo da plataforma até que o botão se encaixe novamente no orifício desejado. Em seguida, trave a alavanca de segurança novamente. FIG.7 (ref.P)
- Para ajustar a inclinação das plataformas, acione a alavanca destacada na FIG.7 (ref.L). Após encontrar a posição ideal, solte a alavanca para travar as plataformas definitivamente.

8.7 Instalação/remoção das rodas traseiras pequenas (apenas para GO!)

As rodas traseiras com diâmetro de 30 cm devem ser encaixadas no último orifício inferior do chassi

Rodas com eixo fixo (apenas para GO!)

- Coloque a roda pequena e prenda-a com a porca fornecida
- Para remover, desrosque a porca de fixação e puxe a roda para fora



Imagem ilustrativa

8.8 Ajuste dos travões com rodas traseiras pequenas (apenas para GO!)



(FIG.9) Imagem meramente ilustrativa

- Com rodas traseiras de 30 cm de diâmetro, o travões deve ser instalado na parte do chassi indicada na (FIG.9)

Nota: ajuste a distância entre a sapata e a roda para que, ao acionar o travão, ele aplique pressão suficiente para travar a roda com segurança.

8.9 Instalação/remoção das rodas traseiras grandes (apenas para START/START2 e START3) As rodas traseiras de 60 cm de diâmetro devem ser encaixadas no furo central do chassi e, no caso do START3 (CP104-xx), no furo superior entre os dois disponíveis.



(FIG.10)


Para rodas com sistema de liberação rápida (apenas para START2 e START3)

- Retire as tampas plásticas dos furos e encaixe as rodas pressionando em direção ao chassi até que o sistema de trava automática esteja corretamente acionado (FIG.10)
- Para remover, basta pressionar o botão no centro da roda para destravar e puxar a roda para fora (FIG.10)

Para rodas com eixo fixo (apenas para START)

- Coloque a roda grande e fixe com a porca fornecida
- Para remover, desrosqueie a porca de fixação e puxe a roda para fora

8.10 Ajuste dos travões com rodas traseiras grandes (apenas para START/START2 e START3)

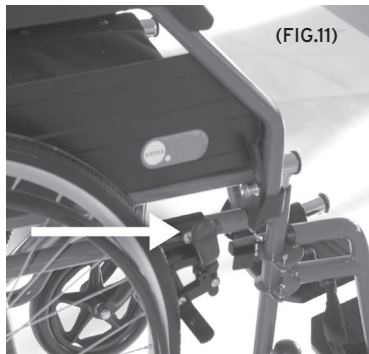

(FIG.11)

- Com as rodas traseiras de 60 cm de diâmetro, o freio deve ser posicionado na parte serrilhada do chassi, conforme ilustrado na (FIG.11), fixando a sapata do freio com os dois parafusos allen no suporte

Nota: Ajuste a distância da sapata em relação à roda para que, ao acionar o freio, ele exerça pressão suficiente para travar a roda com segurança

9. ANTES DE CADA USO

- Sempre cheque as condições das partes mecânicas para garantir o uso seguro do dispositivo para todos e tudo ao redor.
- Confirme se o dispositivo está devidamente montado, com atenção especial ao encaixe correto das rodas traseiras.
- Certifique-se de que o assento está completamente aberto e travado na posição final (se não estiver, pressione-o com firmeza para baixo até o chassi).
- Verifique se o freio das rodas traseiras está funcionando corretamente.

10. CUIDADOS NO USO

- A cadeira de rodas não deve ser usada como assento em veículos motorizados.
- Sempre confira se o freio está bem ajustado e funcionando.
- Recomenda-se atenção para não prender os dedos em partes como rodas ou travões durante o uso da cadeira.
- Lembre-se que a superfície da cadeira pode esquentar quando exposta a fontes externas de calor, como o sol.

11. COMO UTILIZAR

Atenção: Consulte as advertências gerais deste manual de instruções _____



ALERTA!

- Subir e descer da cadeira de rodas sozinho pode ser arriscado: só faça isso se estiver em boas condições físicas e sempre com cuidado
- Evite apoiar-se em partes removíveis, prefira segurar na estrutura do assento

NÃO APOIE O PESO NOS APOIOS PARA OS PÉS AO SUBIR OU DESCER DA CADEIRA DE RODAS, RISCO DE TOMBO!!!

11.1 Como subir na cadeira de rodas

1. Aproxime a cadeira de rodas o máximo possível, posicionando-a ao seu lado
2. Trave os travões das rodas traseiras; para facilitar ao máximo o acesso à cadeira, recomenda-se remover o apoio de braço do lado onde a operação será realizada
3. Apoie-se na estrutura do quadro, usando a força dos braços, e desça devagar até o assento

11.2 Descer da cadeira de rodas

1. Aproxime-se o máximo possível ao lado de um novo assento
2. Trave os travões das rodas traseiras; para facilitar ao máximo a saída da cadeira, recomenda-se remover o apoio de braço do lado onde a operação será realizada
3. Apoie os braços no quadro do assento para o qual irá se transferir e, elevando-se, deslize lentamente até ele

11.3 Degraus e desníveis (dicas para enfrentá-los sozinho com segurança)



ALERTA!

Essas técnicas são recomendadas apenas para usuários experientes de cadeiras de rodas. Nos demais casos, é aconselhável contar com o auxílio de um acompanhante!

SUBIR

Posicione-se próximo à borda da calçada ou do degrau que deseja superar.

Incline a cadeira de rodas para trás, equilibrando-a nas rodas traseiras, até que as rodas dianteiras estejam elevadas o suficiente para apoiá-las sobre o obstáculo. Incline o corpo para frente e empurre com firmeza o aro das rodas traseiras para frente. Continue empurrando até que as rodas traseiras estejam completamente sobre o obstáculo.

DESCER

Para descer o desnível, realize o procedimento inverso. Fique com a parte de trás da cadeira voltada para o desnível, segure firmemente o aro das rodas traseiras e desça o degrau ou obstáculo lentamente; em seguida, equilibre a cadeira sobre as rodas traseiras, levantando levemente as rodas dianteiras, e finalize a descida com cuidado.



ATENÇÃO!

Recomenda-se não utilizar esta técnica para superar desníveis acima de 10 cm!!!

11.4 Uso dos apoios de braço

Os apoios de braço podem ser apenas rebatíveis, apenas removíveis ou rebatíveis e removíveis: **Rebater o apoio de braço** - Essa função é muito prática para subir ou descer da cadeira de rodas. Para rebater o apoio, basta pressionar a alavanca de destrave dianteira e girá-lo para trás.

11.5 Uso das rodas de autopropulsão

As rodas traseiras grandes (60 cm) são utilizadas para conduzir a cadeira de rodas por autopropulsão. Para isso, segure o aro da roda e empurre na direção desejada.

11.6 Uso das rodas pequenas

As rodas traseiras pequenas (30 cm) são destinadas à condução da cadeira de rodas por um operador usando as alças traseiras.

11.7 Utilização das rodinhas pequenas para passagens estreitas (equipamento padrão em modelos com sistema de liberação rápida)

Essas rodinhas são destinadas exclusivamente a facilitar pequenos deslocamentos da cadeira de rodas em ambientes muito estreitos, como, por exemplo, portas de elevador. Para utilizá-las, levante a cadeira para remover as rodas traseiras maiores; em seguida, apoie a cadeira sobre as rodinhas pequenas e empurre-a até passar pelo local estreito. Depois, recoloque as rodas traseiras no lugar.

11.8 Transporte em veículos

A cadeira de rodas foi projetada para ser facilmente transportada. Após remover os apoios para os pés e os braços, ela pode ser dobrada e acomodada com praticidade, por exemplo, no porta-malas de um carro. Caso não seja possível por falta de espaço, coloque a cadeira em frente ao banco traseiro de modo que fique estável e não tombe ou deslize. Sempre que puder, prenda a cadeira utilizando o cinto de segurança do veículo.

12. MANUTENÇÃO

Os dispositivos da linha **ARDEA ONE** da Moretti S.p.A. passam por rigoroso controle de qualidade e possuem selo CE antes de serem comercializados. Para garantir a segurança do paciente e do profissional de saúde, recomenda-se verificar a adequação ao uso do produto junto ao fabricante ou laboratório autorizado a menos a cada 2 anos. Em caso de reparo, utilize apenas peças de reposição originais e

acessórios originais. Antes de utilizar o equipamento, realize todas as verificações e inspeções recomendadas no tópico “ANTES DE CADA USO” deste manual de instruções. As cadeiras de rodas ARDEA ONE precisam de manutenções simples e periódicas, listadas a seguir:

capacidade de frenagem	mensal
limpeza do assento	conforme necessário

13. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

13.1 Limpeza de revestimentos e almofadas

Os revestimentos e as almofadas são feitos de nylon e podem ser limpos facilmente com água e sabão neutro.

13.2 Limpeza da estrutura e partes metálicas

A estrutura e as partes metálicas também podem ser higienizadas com água e sabão neutro. Em seguida, seque com um pano macio para evitar riscos na pintura.

13.3 Limpeza das rodas e dos travões

Da mesma forma, as rodas podem ser limpas com água e sabão neutro. Atenção especial à secagem: usar a cadeira de rodas com as rodas ainda úmidas pode ser muito perigoso.

13.4 Desinfecção

Quando for necessário desinfetar o produto, utilize um desinfetante comum.

Atenção Jamais utilize produtos ácidos, alcalinos ou solventes, como acetona ou diluente.

14. CONDIÇÕES DE DESCARTE



Ao descartar o dispositivo, nunca use os sistemas convencionais de coleta de resíduos urbanos. Recomenda-se encaminhar o dispositivo às ecopontos municipais para reciclagem dos materiais utilizados.
















15. PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS
















Para peças de reposição e acessórios, consulte exclusivamente o catálogo geral da Moretti.

16. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

16.1 Dimensões

MEDIDAS E PESOS

Medidas em cm																Capacidade de carga MÁX	
CP100x*-38																	
CP100x*-40																	
CP100x*-43	103	85	43	91	75	50	42-56	43									
CP100x*-45																	
CP100x*-46																	
CP100x*-48																	
CP103x*-40																	
CP103x*-43	103	85	40	91	75	50	42-56	43									
CP103x*-45																	
CP103x*-48																	
CP103x*-50																	
CP104-40																	
CP104-43																	
CP104-46	103	85	40	91	75	50	42-56	43									
CP104-48																	
CP104-50																	
CP105-40																	
CP105-43	103	85	40	91	75	50	42-56	43									
CP105-46																	
CP105-48																	
CP105-50																	

Medidas em cm																Capacidade de carga MÁX	
CP500x*-40																	
CP500x*-43																	
CP500x*-45	103	75	43	91	73	50	42-56	43									
CP500B-46																	
CP500B-48																	
CP505-40																	
CP505-43																	
CP505-45	103	75	43	91	73	50	42-56	43									
CP505-48																	
CP505-50																	

* A "X" indica a cor. As medidas podem variar em $\pm 0,5$ cm.

16.2 Especificações técnicas

- Estrutura em aço
- Capacidade máxima para **CP100x-xx, CP500x-xx**: 120 kg
- Capacidade máxima para **CP103x-xx, CP104-xx, CP105-xx, CP505-xx**: 130 kg
- Rodas dianteiras em PVC de 20 cm de diâmetro para **CP100-xx**
- Rodas dianteiras em PU de 20 cm de diâmetro para **CP103x-xx, CP104-xx, CP105-xx, CP500x-xx, CP505-xx**
- Rodas traseiras em PU de 60 cm de diâmetro para **CP100-xx, CP103x-xx, CP104-xx**
- Rodas traseiras em PU de 30 cm de diâmetro para **CP105-xx, CP500x-xx, CP505-xx**

- Assento, encosto e revestimento dos apoios de braço em nylon
- Resistência ao fogo: Os materiais usados no revestimento e enchimento foram testados conforme os métodos definidos na norma EN1021-1/2
- Normas aplicáveis: EN 12183
- Temperatura do ambiente operacional: -20°C / +40°C
- Recomendação de armazenamento: Guarde em local fresco e seco, sempre longe de fontes diretas de calor, como a luz do sol. (Temperatura sugerida entre +10°C e +40°C)

17. GARANTIA

Todos os produtos Moretti possuem garantia contra defeitos de material ou fabricação por 2 (dois) anos a partir da data de venda, exceto por eventuais exclusões e limitações especificadas abaixo. Esta garantia não é válida em caso de uso inadequado, abuso, modificação do produto ou não cumprimento das instruções de uso. O uso correto do produto está detalhado no manual do usuário. A Moretti não se responsabiliza por danos decorrentes, lesões pessoais ou qualquer outro prejuízo causado ou relacionado à instalação e/ou uso do equipamento em desacordo com as instruções dos manuais de instalação, montagem e uso. A Moretti não garante seus produtos contra danos ou defeitos nas seguintes situações: desastres naturais, manutenção ou reparos não autorizados, danos causados por problemas de energia elétrica (quando aplicável), uso de peças ou componentes não fornecidos pela Moretti, não cumprimento das diretrizes e instruções de uso, modificações não autorizadas, danos de transporte (diferente da entrega original da Moretti), ou falta de manutenção conforme indicado no manual. Componentes sujeitos ao desgaste natural não são cobertos por esta garantia caso o dano seja resultado do uso normal do produto.

17.1 Reparos

Reparo em garantia: Se algum produto Moretti apresentar defeitos de material ou fabricação dentro do período de garantia, a Moretti irá avaliar junto ao cliente se o defeito está coberto pela garantia. A Moretti, conforme seu critério exclusivo, pode substituir ou reparar o item em garantia em um revendedor autorizado Moretti ou em sua sede. Os custos de mão de obra para o reparo do produto podem ser assumidos pela Moretti caso seja determinado que o reparo está dentro da garantia. A realização de reparo ou substituição não renova nem estende o prazo da garantia.

Reparo de produto fora da garantia: Produtos que não estejam mais cobertos pela garantia só poderão ser enviados para reparo após autorização prévia do atendimento ao cliente Moretti. Todos os custos de mão de obra e envio referentes ao conserto de itens fora da garantia serão totalmente arcados pelo cliente ou pelo revendedor. Os reparos realizados em produtos fora da garantia têm garantia de 6 (seis) meses, contados a partir do recebimento do item reparado.

Produtos sem defeito: Se, após análise e teste de um produto devolvido, a Moretti constatar que ele não apresenta defeito, o cliente será informado. O produto será devolvido ao cliente e os custos de envio relacionados à devolução ficarão sob sua responsabilidade.

17.2 Peças de reposição

Peças originais Moretti possuem garantia de 6 (seis) meses a partir da data de recebimento da peça.

17.3 Disposições de isenção

Exceto quando expressamente previsto nesta garantia e nos limites da legislação aplicável, a Moretti não concede nenhuma outra declaração, garantia ou condição, seja expressa ou implícita, incluindo garantias de comercialização, adequação a um propósito específico, não violação ou não interferência. A Moretti não garante que o uso do produto será contínuo ou ininterrupto.



ou sem defeitos. O prazo de eventuais garantias implícitas previstas em lei é limitado ao período da garantia, conforme as normas legais vigentes. Alguns estados ou países não permitem limitações ao tempo de garantias implícitas, nem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou indiretos relacionados a produtos de consumo. Nesses locais, algumas exclusões ou limitações desta garantia podem não se aplicar ao consumidor. Esta garantia pode ser alterada sem aviso prévio.

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

Produto _____

Data da compra _____

Revendedor _____

Rua _____ Bairro/Cidade _____

Vendido para _____

Rua _____ Bairro/Cidade _____



**MORETTI S.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

FABRICADO NA P.R.C.





MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com

