

**Finalidade:**

Cinta Sacrolombar semi-rígida.

Indicado para as seguintes patologias e/ou lesões: Lumbalgia, Hérnia, hérnia discal, protusão discal, hipotonia muscular, reabilitação muscular.

**Características:**

Tecido elástico com fácil adaptação. Incorpora quatro tiras de aço para maior eficácia. Duas faixas laterais facilitam a regulação de descarga e apoio lombar. Com duas alças que seguram a cinta, apoiam nos ombros quando o paciente precisa maior ajuste.

**Dimensões:**

S : 75-85 cm

M : 85-95 cm

L : 95-107 cm

XL : 107-120 cm

**Cor:** Cinzento

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017 /745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** FJ150

**Marca:** Lumback

**Declaração de conformidade:** Regulamento 2017/745

**Fabricante:** Especialidades Médico Ortopédicas, SL

**Morada do fabricante:**

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:**

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 º) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

**Instruções de utilização:**

Coloque o cinto na área lombo-sacra na altura correta para uso. Com bandas laterais soltas apertar e ajustar a peça sobre o abdômen. Fechar a peça de vestuário por velcro, uma vez obtida a compressão desejada. Regule depois o apoio de descarga e lombar usando as laterais e corrigindo-os sobre as faixas abdominais.

**Imagens do Artigo:**