

Finalidade:

Máscara e tampões para um melhor descanso e conforto.

Características:

Caixa constituída por 10 embalagens. Cada embalagem contém: 1 par de tampões auriculares e 1 máscara de descanso. Composição: Máscara: tecido de cetim e elásticos.

Dimensões:

19x8 cm

Cores:

Máscara: Preto

Tampões: Laranja

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Modelo: 804005

Marca: UBIO

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante:

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: - Rua Francisco Botão

Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior

2040-357 RIO MAIOR

qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Lavar à mão ou à máquina a uma temperatura máxima de 40 graus. Não utilizar produtos abrasivos ou lixívia. Não passar a ferro. Não cair em seco. Tampões: Limpar com água.

Instruções de Utilização:

Máscara: Colocá-la sobre os olhos colocando os elásticos atrás da cabeça.

Tampões auriculares:

- Pressionar os tampões auriculares com os dedos até os cilindros ficarem mais finos para facilitar a sua inserção no ouvido.
- Puxar a ponta da orelha para a frente e para trás com a mão oposta para posicionar corretamente o tampão de orelha.
- Pressionar o tampão da orelha para dentro da orelha com o dedo.
- Verificar se foi inserido corretamente, a maior parte da espuma deve ser inserida no canal auditivo.

Imagens do Artigo:

1 caixa = 10 embalagens



1 embalagem = máscara descanso + tampões auriculares