

Finalidade: Facilitar/permitir a deslocação de pessoas com dificuldades de locomoção e pode ser utilizada por condução autónoma ou com a ajuda de outra pessoa;

Características:

Largura do assento: 43 cm;

Peso: 13 Kg

Peso máximo suportado 120Kg

Dimensões máximas: 101 x 87 x 58 cm

Data de produção: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Cor: Estrutura em azul;

Caixa: 1 unidade;

Declaração de Conformidade: Diretiva 93/42/CEE;

Classificação: Classe 1;

Modelo: CP775-43;

Marca: Ardea (Moretti);

Fabricante: Moretti S.p.A;

Morada do fabricante: Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo);

Importador e Distribuidor: Gerimais;

Morada do Importador e Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Armazenamento: Guardar num local seco, longe de fontes diretas de calor, como a luz solar. Temperatura recomendada: entre +10 C°/ + 40 C°;

Manutenção: O estofos, partes metálicas e as rodas podem ser limpos com água e sabão neutro, depois secar com um pano macio para não riscar a pintura da armação. Atenção à secagem das rodas, pode ser perigoso utilizar a cadeira de rodas com as rodas ainda húmidas;

Instruções de Utilização:

1. Aproxime a cadeira de rodas o mais perto possível, de modo a colocá-la ao seu lado;
2. Bloqueie os travões das rodas traseiras; para facilitar a subida para a cadeira de rodas;
3. Lembre-se que o centro de gravidade da cadeira de rodas foi estudado com apoios para os pés na posição correta, pelo que não utilize a cadeira de rodas sem os apoios para os pés porque pode virar.
4. Lembre-se de que a temperatura da superfície da cadeira de rodas pode aumentar quando exposta a fontes de calor externos, como a luz solar.
5. •ATENÇÃO! Existe o risco de escorregar na presença de cascalho ou solo irregular ou molhado. Adaptar sempre o método de condução às condições de utilização.
6. •ATENÇÃO! Cargas adicionais penduradas

Imagens do Artigo:

