

Finalidade:

Lava Cabeças Insuflável com abertura para a colocação do pescoço. Muito prático para quem se encontra acamado ou com mobilidade muito reduzida, mulheres grávidas e o banho de bebé. Para ser utilizado com auxílio de um cuidador.

Características:

Bacia insuflável;
Suporte do pescoço e ombros confortável e ajustável.
Mangueira de drenagem .

Dimensões:

70 x 60 x 15 cm

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 812025

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior . 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Utilize um pano húmido com um produto não abrasivo e não corrosivo para limpa. Manter sempre limpo de resíduos.

Instruções de utilização:

1. Insufle a bacia com ar por boca ou com uma bomba de ar (não incluída).
2. Coloque a bacia debaixo da cabeça do utilizador com a abertura no pescoço.
3. Coloque a extremidade da mangueira de drenagem num recipiente de resíduos impermeável.
- NOTA: Certifique-se de que o recipiente para a água se encontra abaixo do nível da bacia para que a água escorra corretamente. Se necessário, existe uma tampa de drenagem fornecida no fundo da bacia.
4. Após o Cabelo molhado, aplique champô e, em seguida, enxague com água.
5. Quando toda a água tiver drenado para fora da bacia insuflável, retire a bacia debaixo da cabeça do utilizador.
6. Enxaguar e secar cuidadosamente a bacia após a utilização. Mantenha-a insuflada durante várias horas após a utilização para assegurar que está completamente seca antes de dobrar e armazenar.

Imagens do Artigo: