

**Finalidade:**

Compressa Quente e frio concebidas para serem utilizadas na termoterapia ou crioterapia. Arrefecidos no congelador, permanecem maleáveis e pode tratar a dor. Aquecidos num banho maria com água ou no micro-ondas, permitem o relaxamento muscular ou preparação para exercício.

**Características:**

Compressa composta por gel não tóxico com excelente desempenho e uma bolsa de PVC reforçado ultrarresistente.

A embalagem exterior é de plástico, poliéster ou Tecido de pelúcia. O gel interior é misturado com água, glicerol, CMC (carboximetilcelulose) ou SAP (Polímero Super Absorvente), Conservante.

**Dimensões:** 30 x 18 cm

**Cor:** Azul

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 835120

**Marca:** Identités

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** Identités

**Morada do fabricante:** ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d'Anjou, France - [www.identites.eu](http://www.identites.eu)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com)

**Manutenção e armazenamento:**

Limpeza efetuada com um pano húmido e pode ser desinfetado com uma solução hidroalcoólica. Selar a embalagem num saco e guardá-la no congelador para prolongar o seu prazo de validade

**Instruções de utilização:**

Utilização em Crioterapia:

Coloque a compressa no congelador durante pelo menos 2 horas antes de utilizar.

Verificar se a temperatura da embalagem é adequada antes da aplicação.

Utilização em Termoterapia:

No micro-ondas: aqueça até 600w durante 30 segundos e aguarde 1 minuto antes de o utilizar. Se necessário, reaqueça de 10 em 10 segundos até atingir a temperatura pretendida.

NÃO utilizar um micro-ondas com mais de 1400 watts.

Num depósito ou em banho maria: Mergulhe a compressa em água previamente aquecida a 90°C durante cerca de 5 a 7 minutos.

Verificar se a temperatura da embalagem é adequada antes da aplicação.

**Atenção:** Não coloque a compressa em contato direto com a pele. Utilize a capa fornecida.

**Imagens do Artigo:**

-

