

Finalidade: Restringe os movimentos da cabeça e pescoço. Imobiliza flexo-extensão e rotação em posição neutra. Com apoio do queixo e apoio esternal, proporciona um ligeiro apoio occipital. Com reforço anterior e posterior.

Indicações: Traumatismos graves com fraturas vertebrais, proteção em pós-operatório, metástases. Lesões cervicais altas C1-C2.

Efeitos: Apoio em posição neutra. Imobilização em flexão-Extensão, Rotação e Lateralização da Cabeça e Pescoço. Transmissão homogênea da carga para o tronco. Reduz a pressão sobre os discos intervertebrais. Alívio da tensão muscular

Características: O colar Philadelphia é fabricado em plastozote com 10mm de espessura, com reforço em termoplástico leve, mas que lhe confere a rigidez e estabilidade necessárias. O duplo aperto de velcro fecha e ajusta perfeitamente tanto na parte occipital como na mandibular. Feito em duas peças, com uma abertura na traqueia que permite tirar o pulso na carótida, ou em caso de necessidade efetuar uma traqueostomia. O suporte cervical limita a flexão, extensão e rotação, reduzindo também as irritações provocadas por outros colares. Os materiais, tanto os acolchoados como os rígidos permitem tirar raios X.

Dimensões:

Pediátrico: S (38), M (43), L (48).

Cor: Bege

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: PHI100

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR
qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Lavar manualmente com sabão neutro em água até 40°C. Não lavar ou secar em máquina. Não utilizar produtos clorados ou solventes para remover manchas. Secar à sombra, na vertical, sem torcer.

Instruções de utilização:

Posicione a curva central do colar sob o queixo. Envolve o pescoço como o colar, ajustando o fecho aderente na extremidade. A utilização deste produto deverá ser sempre orientada por um especialista. Caso ocorram irritações na pele, suspenda o uso e consulte médico.

Imagens do Artigo:

