

## BENGALA DOBRÁVEL BM120 – NEGRO / BM125 - AZUL

**Objetivo:**

Um auxiliar para caminhar serve para ajudar aqueles que têm uma capacidade de locomoção limitada.

**Características:**

Alumínio, PVC

Punho: TPR

Peso máximo: Utilizadores até 150 kg.

1 ponteira antiderrapante

**Medidas:** 80 a 93 cm

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Negro / Azul

**Data de fabrico:** Ver embalagem

**Modelo:** BM120 – Negro / BM125 – Azul

**Marca:** BMotion

**Manutenção e armazenamento:**

Método de limpeza: utilizar um pano húmido para limpar os punhos.

Limpe os punhos com um sabão suave, detergente ou produto de limpeza doméstico. Não utilize um solvente orgânico (como acetona, MEK, diluente de laca, líquido de isqueiro, líquido de limpeza a seco, gasolina ou aguarrás) que pode dissolver o plástico e provocar o desgaste do punho. As pontas deste produto contêm borracha natural seca).

1. Inspecionar periodicamente o bastão quanto a danos ou componentes soltos.

2. Verifique se as pontas estão em boas condições. Para preservar a vida útil das biqueiras, substitua-as imediatamente quando estiverem gastas.

**Instruções de utilização:**

1. Ao utilizar a bengala para manter a estabilidade, pode segurar a bengala com qualquer uma das mãos.

2. Segure a bengala com a mão oposta à perna afetada e mova-a em uníssono com a perna afetada. Sempre que der um passo com a perna afetada, mova também a bengala para apoiar a sua marcha. Quando der um passo em frente com a perna não afetada, mantenha a bengala no lugar para apoio.

3. O seu profissional de saúde pode recomendar um padrão de marcha específico.

4. Ajusta-se com um botão.

4.1. Desapertar o colar de bloqueio.

4.2. Com os sapatos calçados e o braço ao lado do corpo, o pulso deve estar ao nível da pega da bengala. Encaixe o botão de mola no colar de bloqueio.

4.3. Volte a apertar o anel de bloqueio.

5. Bastões quádruplos

5.1. Ajuste para utilizadores destros e canhotos

5.2. Desapertar o anel de bloqueio.

5.3. Pressionar a mola inferior

5.4. Rode o punho ½ volta, encaixando o botão da mola num orifício que proporcione a altura correcta.

5.5. Voltar a apertar o anel de bloqueio.

**Images du produit:**

+351 925 568 105  
+34 634 058 847



info@evoluxionhealth.com



Rua Hermano Neves 18- 3º Piso – E7  
1600-477 Lisboa, Portugal