

ARTIGO REABILITAÇÃO, BEM ESTAR E CONFORTO

Finalidade:

Concebido para uso desportivo, lúdico e terapêutico e em todas as áreas com uma maior sensibilização para a qualidade e segurança. Utilização em reabilitação, pós-operação situações, em caso de doença da coluna vertebral ou por doentes com falta de cumprimento só é admissível sob a supervisão de pessoal profissional qualificado.

Características:

As bolas são feitas de PVC (sem ftalatos). Resistente à pressão de até 400 kg. À prova de rebentamento para um peso de utilizador de até 100 kg.

Nota: Em geral, as bolas de exercício perdem ar lentamente. O diâmetro diminui de 2-3 cm por mês. Isto é normal e não indica mau funcionamento.

Medida: Diâmetro - 65 cm

Cor: Azul; Vermelho

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo:

160.062 (vermelho)

160.063 (azul)

Marca: SISSEL

Fabricante: SISSEL GmbH

Morada do fabricante:

Bruchstr. 48 - 67098 Bad Dürkheim Deutschland
(Alemanha)

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR
qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Pode ser lavada e desinfetada. Manter longe de luz direta ou outra fonte de calor, objetos pontiagudos.

Instruções de Utilização:

Antes da insuflar, abrir a bola e permitir a adaptação à temperatura ambiente para pelo menos 24 horas, o que reduz o risco de alongamento excessivo. O ideal é a temperatura ambiente não deve ser inferior a 23° Celcius (74° F). O aquecimento suficiente alivia a inflação e reduz o risco de rebentamento. Incha em várias fases até 80 % do diâmetro da esfera prescrita (por favor utilize o fita métrica fechada). Para o fazer, a melhor maneira é utilizar uma bomba manual especial (acessório opcional) ou uma bomba de fole. Se utilizar um compressor para que a o material não é esticado subitamente.

Imagens do Artigo: