

Silicoplant

Ortesis de gel viscoelástico

Viscoelastic gel orthoses
Orthèse en gel viscoélastique
Orthese aus viskoelastischem gel
Ortesi in gel viscoelastico
Ortese de gel viscoelástico



EMO

especialistas
en ortopedia

PG421

Almofada de gel
metatarsal coberta com
tecido elástico

UNIDADES
2
UNITS

LARGO LENGTH **S 9,3mm L 10,4mm**
ANCHO WIDTH **S 10mm L 10,4mm**

MADE IN SPAIN



LSD IE L E96 PE+ I sa-owa· MMM I sa-owa@owa
u1eds (epua1eA) • odI·d OOI9P ·op 'eia1en:ised el ap ou1weo_ "TS
-svo1a dOIIIO OOIO V·J S30VOIIVIO3dS3 01'113 1'''

Silicoplant
Ortesis de gel viscoelástico

**PG421 Almofada de gel
metatarsal coberta com tecido
elástico**

CARACTERÍSTICAS: Protetor de osso em gel : tecido de dupla camada com 2mm de gel dentro. Texturizado por baixo para evitar escorregar dentro do sapato. O tecido elástico e macio proporciona o máximo conforto. O gel ajusta-se ao formato do osso e dispersa-se em várias direções aquando aplicado peso ou pressão, minimizando as forças de vibração. Calçado Discreto/Par.

INDICAÇÕES: Sobrecarga metatarsal / Metatarsal cabosidades. Calos / Fricção.

EFEITOS: Amortecimento e descarregamento de dores metatarsais Calos/ Fricção. Alivia o impacto nos metatarsos causado pela marcha, reduzindo imediatamente a dor.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Lavar com água fria e sabão neutro, e deixar secar ao ar. Borrifar ligeiramente com pó de Talco. Guardar a temperatura ambiente, de preferência na embalagem original.

COLOCAÇÃO: A escolha do tamanho correto é essencial para atingir a eficácia máxima do tratamento e para estender o tempo de vida da ortose. Ponha a ortose com mostra na imagem ou na folha representativa.

REGULAMENTOS: Este dispositivo médico está em conformidade com o Regulamento

(UE)2017(745 do Parlamento Europeu e Conselho sobre dispositivos médicos e respetivos regulamentos nacionais.

A análise de Risco (UNE EN ISO14971) foi realizada, minimizando todos os riscos existentes. Dispositivo médico de classe I, sem função de medição.

PRECAUÇÕES: Se alguma reação alérgica, irritação, alteração da pele, Inchaço, ou sensibilidade ocorrer, descontinuar o uso e consultar o médico Prescritor ou profissional de saúde, não use diretamente em feridas ou cicatrizes abertas sem proteção adequada.

Não exponha o produto a chamas ou a temperaturas muito altas. A ortose deve caber confortavelmente mas não demasiado apertada. Inspeccione o produto regularmente para se assegurar do ajustamento. Não aperte demasiado. Verificar regularmente de que a circulação não se encontra comprometida. Na dúvida sobre qual tamanho escolher, escolher sempre o maior. Os utilizadores devem inspecionar regularmente o produto para assegurar a condição e o funcionamento corretos. Não use o produto se o mesmo se encontrar danificado.

AVISOS: A utilização da ortótese está comprometida às suas indicações.

É recomendada a utilização da ortótese apenas por um único paciente. Para a colocação adequada da órtese, siga as instruções do fabricante. Seguir as recomendações do

médico prescritor ou dos profissionais de saúde. Para uma adaptação personalizada consulte um especialista. O especialista fornecerá as informações necessárias para garantir que o utilizador final responsável pela colocação de produtos compreenda a utilização segura do produto. O produto não é

adequado para a esterelização. Manter fora do alcance das crianças. Eliminar o produto em caixotes do lixo sólidos.

Para a eliminação de embalagens, dependendo do material, utilize o papel/cartão adequado ou recipiente de reciclagem de plástico. Cumpra sempre com as regulacões do seu país. Qualquer incidente grave relacionado com o produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde se encontra o utilizador e o doente.

Data da última revisão 5/ 2024 V.01



FABRICANTE



DATA DE FABRICO



DISPOSITIVO MÉDICO



VALIDADE



MANTER SECO



RECICLADO



VERDE PONTO



CONSULTAR INSTRUÇÕES



LOTE CÓDIGO



REFERÊNCIA NÚMERO



CE CONFORMIDADE



DOENTE ÚNICO. MÚLTIPLOS USOS.



FAZ NÃO CONTÉM LÁTEX



MANTER AFASTADO DA LUZ

