

# MESA DE COMER NO LEITO SIMPLEX 823155 GeriMais

**Finalidade:** Apoiar refeições de pacientes acamados, facilitar atividades no leito, como leitura, uso de notebook, escrita ou medicação, promover autonomia do paciente, evitando dependência constante de terceiros além de melhorar ergonomia e conforto, tanto para o paciente quanto para o cuidador.

**Características:** Estrutura em aço com pintura em pó, tampo placa de poliestireno de alta densidade. Peso máximo suportado: 25kg.

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva** Regulamento (UE) 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 823155

**Marca:** IDENTITÉS

**Dimensões:** Largura 61 x profundidade 41 cm. Largura de passagem 51 cm. Altura ajustável de 70 a 118 cm. Tabuleiro 60 x 40 cm

Peso (sem acessórios): 6,1 kg

**Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)** Regulamento (UE) 2017/745

**Fabricante:** IDENTITES

**Morada do fabricante:** Identités – ZA Pole 49 Bd de la Chanterie 49124 Saint Barthélemy d'ANJOU

**Distribuidor:** Gerimais, Lda.

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior 2040-357 Rio Maior - geral@gerimais.com Tel. 243 050 100

**Manutenção e armazenamento:** Limpar com água morna, detergente neutro e pano macio; secar bem. Não usar produtos com fenol ou cloro. Evitar acumulação de sujidade. Verificar regularmente parafusos, desgaste e funcionamento dos travões e sistema de elevação. Substituir peças danificadas e não realizar reparações por conta própria. Guardar em local seco, limpo e com temperatura moderada. Proteger contra poeiras e agentes corrosivos. Manter componentes organizados e identificados. Não colocar peso excessivo sobre o produto.

**Instruções de Utilização:** Montar as travessas na estrutura e apertar os parafusos, garantindo que todas as rodas assentam no chão. Inserir o tubo deslizante na estrutura, ajustar à altura pretendida e apertar o botão de fixação. Introduzir a haste de apoio, posicionar a arruela de fixação na placa de travamento e inserir o painel da mesa. Apertar o botão de fixação. Regular a altura e a inclinação do tampo através dos respetivos botões de fixação. Antes da utilização, garantir que todos os sistemas de fixação estão devidamente apertados.

**Imagens do Artigo:**

