

Finalidade: O Medy Spray proporciona frio instantâneo, muito eficaz no alívio imediato da dor provocada por uma lesão. A anestesia mecânica do frio elimina temporariamente a dor; Causada por pequenas pancadas, luxações, entorses, cefaleias de tensão e picadas de insetos;

Características: Este produto é bastante simples de utilizar, no entanto não deve ser aplicado em feridas abertas, em queimaduras ou em membranas mucosas;

Componentes: Isobutano propano butano e mentol

Lote: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Data de produção: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Cor: Branco e azul;

Caixa: 1 unidade;

Diretiva: 93/42 CEE;

Classificação: Classe 1;

Modelo: ST399;

Marca: Kyara (Moretti);

Dimensões: 20x6 cm;

Certificado CE: 5637/CE001/2;

Fabricante: MorettiS.P.A.;

Morada do fabricante: Via Bruxelles, 3 – Meleto 52022 Cavriglia (Azerro);

Importador e Distribuidor: Gerimais;

Morada do Importador e Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Evitar a inalação direta do produto e o contacto com os olhos; Manter longe de fontes de calor e/ou faíscas; Manter fora do alcance das crianças; Proteger dos raios solares e não expor a uma temperatura superior a 50º C;

Instruções de Utilização:

1. Aplicar a uma distância mínima de 15-20 cm da pele e durante um tempo máximo de 3-4 segundo;
2. Suspender a aplicação quando aparecer uma película branca;
3. Se necessário repetir a aplicação.

Imagens do Artigo:

