



Medy Spray 400 ml – ST399

---

MANUAL DE INSTRUÇÃO

## **Descrição**

O Medy Spray proporciona frio instantâneo, muito eficaz no alívio imediato da dor provocada por uma lesão. A anestesia mecânica do frio elimina temporariamente a dor.

## **Indicações de Utilização**

Causada por pequenas pancadas, luxações, entorses, cefaleias de tensão e picadas de insetos. Este produto é bastante simples de utilizar, no entanto não deve ser aplicado em feridas abertas, em queimaduras ou em membranas mucosas.

## **Instruções de Aplicação**

1. Aplicar a uma distância mínima de 15-20 cm da pele e durante um tempo máximo de 3-4 segundo;
2. Suspender a aplicação quando aparecer uma película branca;
3. Se necessário repetir a aplicação.

## **Precauções**

- Evitar a inalação direta do produto e o contacto com os olhos;
- Manter longe de fontes de calor e/ou faíscas;
- Manter fora do alcance das crianças;
- Proteger dos raios solares e não expor a uma temperatura superior a 50º C.