

ALMOFADA ANATÓMICA EM VISCOELÁSTICO E GEL EV700 BLUE – EV705

Objetivo:

A camada de gel ajuda a distribuir a pressão de forma mais homogénea. Proporciona uma sensação de frescura. O visco distribui a pressão.

Risco - Elevado

Características:

Espuma viscoelástica injetada 80Kg/m³ + 3D Gel

Capa: Tecido PU, base antiderrapante, impermeável, fecho de correr.

Frente com pega para facilitar o transporte.

Correia de fixação traseira com fivela.

Base antiderrapante de qualidade superior.

Peso máximo do utilizador: 120 kg

Medidas:

EV700 Blue - 42 x 42 x 8 cm

EV705 - 45 x 42 x 8 cm

Lote: Ver embalagem

Cor: Azul

Data de fabrico: Ver embalagem

Modelo: GeliTech

Ref: EV700 Blue, EV705

Marca: Evoluxion

Manutenção e armazenamento:

Núcleo (interior - Visco+Gel) – Não lavável.

Capa amovível. Para manter a higiene e prolongar a vida útil da capa de poliuretano da sua almofada, siga estas recomendações:

1. Lavagem à mão ou à máquina:

- À mão: utilizar um pano húmido com água morna e sabão neutro. Esfregue suavemente e enxágue com um pano limpo.

- Lavagem na máquina: Utilizar um ciclo suave com água fria ou morna (máximo 30°C). Utilizar um detergente suave, sem lixívia ou amaciadores de roupa. Não misturar com roupa com texturas rugosas que possam danificar a capa.

2. Secagem: Secar ao ar, evitando a exposição direta ao sol.


3. Outras recomendações: Não passar a ferro, pois o calor pode danificar o poliuretano. Não utilizar lixívia ou produtos abrasivos, pois podem desgastar a capa. Se houver manchas difíceis, utilizar uma esponja macia com uma solução 1:1 de água e vinagre branco.

Instruções de utilização:

Coloque a almofada numa superfície firme e estável (cadeira, poltrona, cadeira de rodas ou assento de escritório). Certifique-se de que o lado do gel está virado para cima, uma vez que esta camada proporciona arrefecimento e alívio da pressão.

Ajuste a posição bem antes de se sentar para **evitar escorregar**.

Imagem do produto:

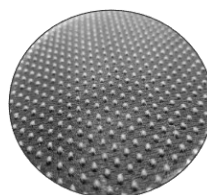

Evoluxion Health, Lda

Rua Hermano Neves 18- 3º Piso – E7
1600-477 Lisboa, Portugal

+351 925 568 105 export@evoluxionhealth.com

Green Visco Spain, S.L.

Avda Jose Maria Alcaraz y Alenda, Num.2, Esc. 1, Planta 1, Puerta 1
06011 – Badajoz, España

+34 634 058 47 comercial@greenvisco.com