

garantia limitada de dois anos

Seu produto da marca Drive possui garantia contra defeitos de fabricação e materiais por dois anos a partir da data da compra original.

Este dispositivo foi fabricado seguindo padrões rigorosos e passou por uma inspeção cuidadosa antes do envio. A **Garantia Limitada de Dois Anos** reflete nossa confiança nos materiais e na qualidade do produto, garantindo ao consumidor um serviço confiável.

Se houver algum defeito coberto por esta garantia, podemos optar por reparar ou substituir o dispositivo.

Esta garantia não cobre falhas do dispositivo causadas por uso indevido ou negligência do proprietário, nem desgaste natural. Também não inclui componentes não duráveis, como acessórios de borracha, rodízios e apoios, que se desgastam normalmente e necessitam de troca periódica.

Se tiver alguma dúvida sobre seu produto Drive ou sobre esta garantia, entre em contacto com um revendedor Drive autorizado.



Wenzel^{ite}Re/hab

© 2006 Medical Depot, Inc. Todos os direitos reservados.

Drive é uma marca registrada da Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 EUA Fabricado na China

suporte para banho

tem # OT 8020



Representante autorizado na UE:
Drive International, LLC Globe
Lane - Stockport DUKINFIELD
SK16 4RE, GB

Wenzel^{ite}Re/hab


www.drivemedical.com

drive
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

uso recomendado

O Suporte Otter Tub eleva a Cadeira de Banho Otter para uso no chuveiro. Todos os tamanhos da Cadeira de Banho Otter encaixam no Suporte para Chuveiro. Fabricado em alumínio.


instruções de montagem

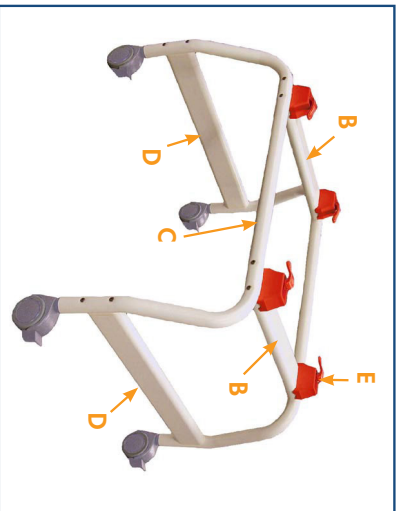

passo 1

Coloque quatro tampas plásticas (A) nas duas barras transversais do acionador (B) e conecte as barras transversais aos dois quadros laterais (C) usando os parafusos fornecidos. Não aperte os parafusos.

OBSERVAÇÃO: Todos os acionadores devem estar voltados para o centro da base.

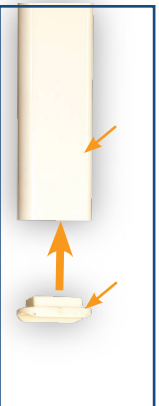

passo 2

Coloque quatro tampas plásticas (A) nas barras transversais das pernas (D) e conecte as barras aos dois quadros laterais usando os parafusos fornecidos.

etapa 3

Aperte todos os parafusos.

manutenção e cuidados

- Faça inspeções regulares no suporte de banho para verificar se há rachaduras, quebras, peças soltas, faltando ou defeitos. Se precisar de manutenção ou peças de reposição, procure um revendedor autorizado da Drive.
- Lave o suporte de banho com água e sabão ou utilize uma solução de água sanitária a 10%.

ajustes

- Para instalar a cadeira de banho Otter no Suporte de Banho, ajuste as pernas da cadeira na posição mais alta e pressione firmemente até que encaixem nas cavidades (E) do suporte. Para remover, pressione as alavancas vermelhas e puxe as pernas para cima uma de cada vez.
- Trave todas as rodas para manter o suporte imóvel e destrave para movimentar.

ATENÇÃO:

A supervisão de um adulto é indispensável durante todo o uso.

