

Finalidade: A cadeira sanitária móvel Sardenha permite sentar-se com conforto graças ao seu assento macio e impermeável. Pode ser colocada sobre uma sanita existente ou utilizada de forma independente, graças ao seu bacio removível. O ajuste de altura permite adaptá-la a diferentes alturas de utilizador. Indicada para idosos, pessoas com mobilidade reduzida, com deficiência, em recuperação de lesões ou com dificuldade de equilíbrio.

Características: Estrutura de alumínio dobrável e resistente à corrosão. Assento macio em 2 partes com almofada removível. 4 rodízios multidirecionais com freios.

Dimensões: Totais: largura 55 x profundidade 78,6 x altura. 91,5 a 94,5 cm.

Peso: 6,1 kg.

Assento: largura 43 x profundidade 43 x altura. 50 a 55 cm.

Largura entre os apoios de braço: 45 cm.

Peso máximo do usuário: 130kg.

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 811189.G

Marca: IDENTITES

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)
Regulamento (UE) 2017/745

Fabricante: IDENTITES

Morada do fabricante: ZA Pôle 49 – Boulevard de la Chanterie 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio Maior - geral@gerimais.com Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Limpe regularmente com um pano húmido e desinfetante, evitando produtos abrasivos, detergentes ou solventes. Seque com um pano macio e seco. Recomenda-se uma revisão completa e lubrificação anual, podendo ser mais frequente em caso de utilização intensiva. Antes de cada utilização, verifique rodízios, travões e fixação do assento. Limpe e seque a cadeira diariamente, pois a urina pode danificar os tubos de aço.

Instruções de Utilização: Desembale e verifique se o produto está completo e sem danos antes de utilizar. Não utilize o produto caso apresente defeitos. A instalação deve ser realizada por profissionais qualificados. Não permita a utilização por crianças ou pessoas não autorizadas sem supervisão. Evite balançar a cadeira e não utilize no exterior ou em superfícies irregulares. Não introduza dedos ou objetos nas partes tubulares expostas para evitar ferimentos.

Imagens do Artigo:

