



Cadeira sanitária móvel

Sardenha

Manual de instruções - Equipamento médico



REF. 811189



SÍMBOLO PRESENTE NA ETIQUETA OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES

	Endereço do fabricante		Consulte o manual de instruções
	Data de fabricação		Siga as instruções de segurança
	Número do lote		Conformidade CE
	Referência do produto		Não tolera ambientes úmidos Evite a umidade
	Peso máximo permitido ao usuário		Equipamento médico



MANUAL DE INSTRUÇÕES

PT

IMPORTANTE

Leia com atenção este manual antes de utilizar o produto e guarde-o para futuras consultas.



Usuário: caso não consiga ler ou entender os avisos, precauções ou instruções, entre em contato com seu profissional de saúde ou distribuidor antes de usar este produto, para evitar riscos e danos. Consulte seu médico ou especialista antes de utilizar um dispositivo de auxílio técnico. Ele irá orientar e informar sobre o uso mais adequado para sua situação.

Distribuidor: este manual deve ser entregue aos usuários deste produto.

FINALIDADE DO PRODUTO

A cadeira de banho móvel Sardaigne é um equipamento médico. Trata-se de um auxílio técnico para higiene pessoal, indicado para idosos, pessoas com mobilidade reduzida, com deficiência, em recuperação de lesões ou com dificuldade de equilíbrio.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

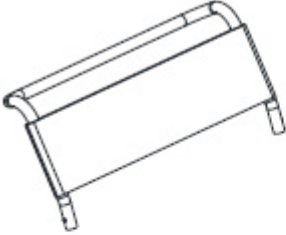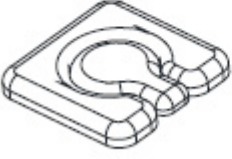	x1 Encosto		x1 Balde
	x1 Almofada		x1 Apoio para os pés

PRECAUÇÕES DE USO



O não cumprimento das precauções de uso pode causar riscos de lesões graves.

- Nunca ultrapasse o peso máximo suportado de 130 kg.
- Este produto não é indicado para pessoas com dificuldades cognitivas ou que não consigam permanecer sentadas.
- Garanta que todas as peças estejam devidamente fixadas antes do uso.
- Confira se o produto está em perfeito estado de funcionamento.
- Faça sempre uma inspeção visual no produto.
- Certifique-se da estabilidade da cadeira antes de utilizá-la.
- Utilize somente em superfícies planas.
- Antes de cada uso, confirme que os quatro pés estejam na mesma altura e que os pinos estejam bem encaixados.
- Nunca se incline enquanto estiver sentado(a) na cadeira.
- Cuidado com o risco de beliscão durante o uso.
- Se houver peças danificadas, quebradas, desgastadas ou faltando, entre em contato com o fornecedor.
- Faça revisões regulares de todos os componentes deste produto (parafusos, tubos, estrutura, assento, tampa etc.).
- Não sente antes de instalar o assento corretamente.
- Verifique se todas as conexões rosqueadas estão bem apertadas.
- Não utilize este produto para fins diferentes do recomendado: por exemplo, não fique em pé sobre a cadeira.
- SEMPRE respeite o limite de peso informado na etiqueta ou manual.
- Não faça modificações neste produto. Se precisar de reparo, utilize apenas peças originais e procure assistência especializada.

- Depois de abrir ou montar o produto, certifique-se de que ele está travado na posição ABERTA e firme no chão antes de usar.
- Não pendure objetos na cadeira. Isso pode causar desequilíbrio e levar a quedas.
- Se ficar muito tempo sem utilizar, peça ao seu revendedor especializado para fazer uma revisão no equipamento.
- Não coloque nem retire o balde enquanto o paciente estiver sentado: risco elevado de lesão íntima!
- Confira o estado da cadeira antes de cada uso. Em caso de dúvida, não utilize e procure orientação do seu revendedor especializado.
- Utilize a cadeira somente em superfícies planas e estáveis.
- Não sente nos apoios de braço da cadeira.
- Evite inclinar-se para não correr o risco de tombar.

MONTAGEM & USO


Desembale cuidadosamente e examine o produto para garantir que está completo.

Antes de usar, verifique se há sinais de danos, como solda rachada, tinta descascada, assento rachado ou danificado ou tubo dobrado. Se encontrar algum desses problemas, entre em contacto conosco e não use o produto.


INSTALAÇÃO:

A instalação deste produto deve ser feita apenas por profissionais qualificados. Em caso de dúvidas, consulte seu revendedor especializado.


ETAPA 1

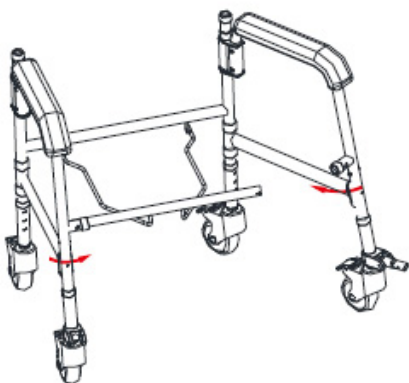

ETAPA 2

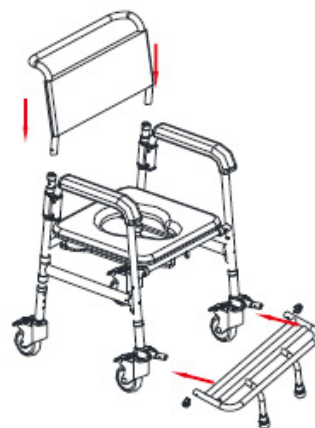

ETAPA 3

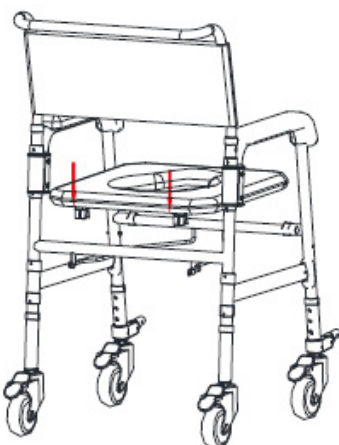

ETAPA 4



USO:

- Não permita que crianças ou pessoas não autorizadas brinquem com o equipamento ou o utilizem sem supervisão adequada. 4
- Evite balançar para frente, para trás ou para os lados ao utilizar o produto, pois isso pode gerar esforços excessivos, provocar danos ou falhas e aumentar o risco de acidentes.
- Não utilize o produto fora de casa ou em superfícies irregulares (como em jardins), pois isso pode causar sobrecarga nos pés e danificá-los.
- Não coloque os dedos ou objetos estranhos nas partes tubulares expostas, pois isso pode causar ferimentos graves.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO



A falta de cuidados e manutenção do seu produto pode gerar riscos de acidentes graves.

- Limpe o produto regularmente com um pano húmido e um desinfetante. Evite usar produtos abrasivos, detergentes ou solventes.
- Seque com um pano macio, limpo e seco.
- Antes de iniciar a limpeza, separe os componentes do quadro principal.
- A cadeira deve passar por uma revisão completa e lubrificação anual obrigatória.
- Recomenda-se fazer a manutenção ao menos uma vez por ano. Caso o produto seja utilizado intensamente ou em locais com muitos usuários, sugerimos revisões com maior frequência.
- Verifique o estado das rodas e do assento antes de cada uso.
- Cheque os freios antes de cada utilização.
- Certifique-se regularmente de que o assento e o banco estejam bem fixados.
- Atenção: a urina é extremamente corrosiva e pode danificar rapidamente os tubos de aço. Por isso, limpe e seque a cadeira todos os dias.
- Em caso de defeito, não tente consertar o produto por conta própria. Procure um revendedor autorizado.

TROCA DE PROPRIETÁRIO

O produto pode ser reutilizado. Antes disso, é necessário higienizá-lo e desinfetá-lo conforme as orientações de limpeza. Ao transferir o produto, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos ao novo usuário. Antes da troca, o produto deve ser inspecionado por um especialista autorizado.

RECICLAGEM

Quando o produto não tiver mais utilidade e precisar ser descartado: entre em contato com o seu revendedor especializado. Caso prefira realizar o descarte por conta própria, consulte a empresa local de gestão de resíduos para orientações sobre o descarte correto.

ARMAZENAMENTO



O não cumprimento das condições de armazenamento pode causar danos ao produto e até mesmo risco de acidentes graves

- Evite deixar seu produto guardado por longos períodos próximo a fontes de calor ou ao sol (ex: atrás de uma janela ou perto de um aquecedor) ou em locais muito frios.
- Mantenha afastado de chamas e fontes de faíscas.
- Siga as orientações para guardar o produto corretamente.
- Armazene em local seco e com temperatura amena.
- Proteja o produto com uma embalagem contra poeira e corrosão (ex: areia, água do mar, maresia, elementos abrasivos).
- Guarde todas as peças removidas juntas, no mesmo lugar (ou identifique-as, se necessário) para não misturar com partes de outros produtos na hora de montar novamente.
- Todos os componentes devem ser armazenados sem peso em cima (não coloque objetos pesados sobre as peças e não prenda nada).
- Não deixe ao ar livre, não exponha ao sol (atenção para não deixar dentro do carro sob sol forte).
- A cadeira é destinada ao uso interno e não deve ser armazenada em áreas externas.

DURAÇÃO DE USO

A vida útil estimada deste produto é de 5 anos, considerando condições normais de uso, segurança e manutenção para um usuário. Após esse período, o produto pode continuar sendo utilizado enquanto estiver em boas condições.

Se o produto for utilizado em ambientes com vários usuários (como casas de repouso ou hospitais), a vida útil pode ser reduzida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões totais	Largura 78,5 x profundidade 55 x altura 91,5 a 94,5 cm
Peso	5,87 kg
Peso máximo permitido	130 kg

GARANTIA

Este produto possui garantia de dois anos a partir da data de compra pelo usuário. A IDENTITÉS fornecerá peças de reposição para qualquer componente que apresentar defeito de fabricação, projeto ou material. Caso precise acionar a garantia, entre em contato com o distribuidor onde adquiriu o produto. Danos causados por acidentes, uso inadequado, alterações ou desgaste natural não são cobertos por esta garantia. Procure o revendedor onde comprou o produto para solicitar a garantia.



Identités – ZA Pole 49 Bd de la
Chanterie 49124 Saint
Barthélemy d'Anjou



Peso máximo permitido
130 kg

