

Finalidade: A cadeira de banho Tobago permite tomar banho com maior conforto e segurança na posição sentada. Está equipada com assento anatômico com abertura frontal, facilitando a higiene íntima. O encosto possui pega de transporte, que facilita a sua deslocação.

Características: Modelo sobre rodas com 2 freios traseiros e dobrável. Estrutura em alumínio anticorrosivo.

Dimensões: Assento: largura 41 x profundidade 40 x altura. 50 cm. Altura do apoio de braço 20 cm.

Largura entre os apoios de braço 48 cm.

Dimensões gerais: Largura 53 x profundidade 54 x altura. 93 cm

Peso: 7,5 kg

Peso máximo permitido 110 kg.

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 812009

Marca: IDENTITES

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)
Regulamento (UE) 2017/745

Fabricante: IDENTITES

Morada do fabricante: ZA Pole 49

Bd de la Chanterie 49124 Saint Barthélemy d'Anjou
www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,
nº 15- Zona Industrial de Rio Maior 2040-357 - Rio
Maior - geral@gerimais.com Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Guardar em local seco, limpo e com temperatura moderada, afastado de fontes de calor, frio, chamas ou faíscas. Proteger o produto do pó, humidade e corrosão. Manter as peças desmontadas juntas e sem carga, evitando colocar objetos pesados sobre o produto.

Instruções de Utilização: Retire todos os componentes da embalagem (estrutura, assento e 4 rodas reguláveis). Desdobre a estrutura e coloque o assento, pressionando até encaixar corretamente. Em seguida, instale as rodas. Antes de cada utilização, verifique se o assento e as rodas estão bem fixos. Para imobilizar a cadeira, ative os travões pressionando as alavancas; para desbloquear, levante-as. Atenção: bloqueie sempre os travões quando a cadeira estiver parada ou ao sentar-se/levantar-se. Em utilizadores não autónomos, a cadeira deve ser utilizada com supervisão de um profissional de saúde.

Imagens do Artigo:

