

Finalidade: As compressas GelPro são destinadas ao alívio de dores musculares e articulares, devendo ser aplicadas diretamente sobre a área afetada. Aplicação a frio é indicada para alívio prolongado de dores moderadas a intensas. Aplicação a quente é indicada para alívio temporário de dores leves e crônicas.

Características: Composição: embalagem externa e gel interno. Envoltório externo: 82% Chinlon e 18% Spandex. Gel interno: Resina acrílica reticulada: 15–25%, Álcool polihídrico: 40–60%, Sal eletrolítico: 2–10%, Aditivos (estabilizantes etc.): < 0,5%, Água deionizada: 20–40%.

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva Regulamento 2017/745

Classificação: Classe I

Modelos:

835187 - 835188 - 835189

835190- 835191- 835192

Marca: IDENTITÉS

Dimensões:

835187 – 17 x 10,5 cm

835188 – 24 x 14 cm (alça de velcro: 33 cm)

835189 – 25,5 x 15 cm

835190 – 28 x 17,5 cm

835191 – 34 x 24 cm (circunferência: 103,5 cm)

835192 – 29 x 35 cm (alça: 76 cm)

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)
Regulamento 2017/745

Fabricante: IDENTITÉS

Morada do fabricante: Identités – ZA Pole 49

Bd de la Chanterie 49124 Saint Barthélemy d'ANJOU
www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,
nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio
Maior - geral@gerimais.com Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: A falta de manutenção pode causar lesões graves. Após o uso, limpe com pano húmido e deixe secar ao ar. Não lave na máquina nem utilize álcool ou solventes. Em caso de desgaste ou rasgo, não repare; descarte ou contacte um revendedor autorizado.

Instruções de Utilização: Método Resfriado: Coloque o pack no congelador, dentro de um saco, por pelo menos 2 horas antes do uso. Verifique a temperatura e, se estiver muito frio, envolva-o numa toalha ou pano antes de aplicar na pele.

Método aquecido: Use o pack à temperatura ambiente e coloque-o no centro do prato do micro-ondas, sem encostar nas laterais. Aqueça em intervalos de 20 segundos em potência média até atingir a temperatura desejada, amassando o gel para distribuir o calor. Verifique a temperatura antes de aplicar. Se necessário, aqueça em intervalos de 10 segundos, girando 180°. Nunca supraqueça.

Tratamento: Escolha o produto adequado e verifique se está danificado; não utilize se estiver perfurado. Refrigere ou aqueça conforme as instruções e aplique na área afetada por até 20 minutos, com intervalos de 20 minutos. Verifique sempre o estado da compressa antes do uso.

Imagens do Artigo:

