



**COMPRESSAS GELPRO MÃO-PULSO, TORNOZELO, COTOVELO-
JOELHO, JOELHO, LOMBAR, OMBRO**

Manual de instruções - DISPOSITIVO MÉDICO



REF : 835187 – 835188 – 835189 - 835190 – 835191 – 835192



SÍMBOLOS PRESENTES NO RÓTULO OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES
SIMBOLI PRESENTI SUL L'ETICHETTA O NEL MANUALE D'USO
SYMBOLE AUF DEM ETIKETT ODER IN DER GEBRAUCHSANWEISUNG
SYMBOLEN OP HET ETIKET OF IN DE GEBRUIKSAANWIJZING
ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ Ή ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
SYMBOLE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ETYKIECIE LUB W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

	Endereço do fabricante Indirizzo del fabbricante Adresse des herstellere Adres van de fabrikant Διεύθυνση του κατασκευαστή Adres producenta		Convite para ler o manual de instruções Invito a leggere il manuale d'uso Aufforderung zur Leseanleitung Uitnodiging om de gebruiksaanwijzing te lezen Πρόσκληση για ανάγνωση των οδηγιών χρήσης Zaproszenie do przeczytania instrukcji użytkowania
	Data de fabricação Data di fabbricazione Herstellungsdatum Productiedatum Ημερομηνία κατασκευής Data produkcji		Respeitar as instruções de segurança Rispettare le istruzioni di sicurezza Sicherheitsanweisungen beachten De veiligheidsvoorschriften naleven Τήρηση των οδηγιών ασφαλείας Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
	Número do lote Numero di lotto Chargennummer Partijnummer Αριθμός παρτίδας Numer partii		Conformidade CE Conformità CE CE-Konformität CE-conformiteit Συμμόρφωση CE Zgodność CE
	Referência do produto Riferimento del prodotto Produktreferenz Productreferentie Αναφορά προϊόντος Numer referencyjny produktu		Dispositivo médico Dispositivo medico Medizinprodukt Medisch hulpmiddel Ιατρική συσκευή Wyrób medyczny
	Peso máximo do utilizador Peso massimo dell'utente Maximales Benutzergewicht Maximaal gebruikersgewicht Μέγιστο βάρος χρήστη Maksymalna waga użytkownika		Teme a umidade Teme l'umidità Fürchtet die Feuchtigkeit Vreest vochtigheid Φοβάται την υγρασία Boi się wilgoci



ATENÇÃO

Leia atentamente o manual antes de utilizar este produto e conserve-o para referência futura, se necessário.

Usuário: Se você não conseguir ler ou entender os avisos, precauções ou instruções, entre em contato com seu profissional de saúde ou distribuidor antes de usar este produto, pois o uso inadequado pode causar riscos e danos físicos.

Consulte seu médico ou especialista em saúde antes de utilizar um dispositivo de auxílio técnico. Ele poderá aconselhá-lo e informá-lo sobre a utilização mais adequada ao seu caso.

Distribuidor: Este manual deve ser entregue aos usuários deste produto.

FINALIDADE DO PRODUTO

As compressas GelPro são dispositivos médicos destinados ao alívio de dores articulares e musculares. Devem ser aplicadas diretamente na área dolorida.

Compressas frias aliviam, a longo prazo, dores de moderadas a intensas.

Compressas quentes aliviam, a curto prazo, dores leves e crônicas.

PRECAUÇÕES DE USO



O não cumprimento das precauções pode causar lesões graves.

- Verifique o estado da compressa a cada uso, especialmente se o invólucro não está perfurado.
- Não corte o produto.
- Pessoas alérgicas aos materiais externos (Chinlon, Spandex) não devem usá-lo sobre pele lesionada.
- Não aplicar em áreas sensíveis.
- Uso externo apenas. Não ingerir.
- Crianças devem usá-lo sob supervisão de um adulto.
- Evitar o uso em pessoas com disfunções circulatórias terminais ou sem autonomia.
- Consulte um médico antes do uso se for diabético, tiver má circulação, doença cardíaca, artrite reumatoide ou estiver grávida.
- Tenha cuidado ao retirar do micro-ondas, o pack pode estar muito quente. Se estiver quente demais, deixe esfriar antes de aplicar. Sempre teste a temperatura antes de usar.
- Para evitar queimaduras por frio, deixe o pack atingir uma temperatura tolerável antes da aplicação. Se estiver pouco frio, volte ao congelador por mais 20 minutos.
- Aplique calor/frio por no máximo 20 minutos com intervalos de 20 minutos entre as aplicações.
- Atenção: aquecer por mais tempo do que o recomendado pode causar lesões ou danificar o micro-ondas.
- Não usar durante o sono. Verifique frequentemente a pele. Em caso de irritação ou queimadura, interrompa o uso imediatamente.
- NÃO usar se houver vazamento ou se o invólucro estiver danificado. Em caso de contato do conteúdo com os olhos, lave a área com água e procure um profissional.
- NÃO usar com cremes ou pomadas analgésicas.
- NÃO aplicar sobre pele doente, ferida ou danificada. Não usar quente em áreas com hematomas ou inchaço recentes (até 48 horas), ou em áreas com sensibilidade térmica reduzida.
- NÃO usar em pessoas que não possam remover o produto sozinhas, como bebês, crianças, idosos ou pessoas incapazes de seguir instruções.
- NÃO exercer pressão adicional sobre o produto.
- NÃO superaquecer.
- NÃO ingerir o produto ou seu conteúdo. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Interrompa o uso e procure um médico se a dor piorar ou persistir por mais de 7 dias, ou se sentir desconforto, queimação, inchaço, erupções ou outras alterações na pele.

MODO DE USO

Instruções para resfriamento:

1. Armazene o pack no congelador dentro de um saco para mantê-lo pronto para uso a frio.
2. Refrigere por no mínimo 2 horas antes do uso.

3. Verifique a temperatura antes da aplicação.
4. Se estiver muito frio, envolva em uma toalha ou pano antes de aplicar sobre a pele.

Método de aquecimento em micro-ondas:

1. Use um pack à temperatura ambiente.
2. Coloque no centro do prato giratório limpo do micro-ondas (sem encostar nas laterais). Desative funções como “dourar”.
3. Aqueça em intervalos de 20 segundos em potência média até alcançar a temperatura desejada. Retire e amasse o gel para distribuir o calor.
4. Verifique a temperatura antes de aplicar.
5. Se precisar mais calor, aqueça em incrementos de 10 segundos. Verifique se há partes muito quentes, amasse para uniformizar, gire 180° e aqueça novamente. **NUNCA** superaqueça.

Tratamento:

1. Escolha o produto adequado.
2. Verifique se a compressa está danificada. Se sim, não utilize.
3. Refrigere/aqueça conforme o objetivo e as instruções.
4. Aplique na área afetada por no máximo 20 minutos, com intervalos de 20 minutos.

Verifique sempre o estado do produto antes do uso, principalmente se está perfurado.

MANUTENÇÃO



A falta de manutenção pode causar lesões graves.

- **Limpeza:** Após o uso, limpe com pano húmido e deixe secar ao ar completamente. Não lave na máquina.
- Não use álcool ou solventes para limpar.
- Em caso de desgaste ou rasgo, não tente reparar. Descarte ou entre em contato com revendedor autorizado para verificar suporte técnico.

MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO

O produto pode ser reutilizado, mas deve ser previamente limpo e desinfetado, respeitando as normas de higiene. Ao transferir o produto, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos necessários ao novo usuário. Antes disso, o produto deve ser inspecionado por um especialista autorizado.

RECICLAGEM

Quando o produto não puder mais ser utilizado e precisar ser descartado, entre em contato com o revendedor especializado. Se desejar realizar o descarte por conta própria, consulte a empresa local de gestão de resíduos para obter as diretrizes corretas de eliminação.

ARMAZENAMENTO



O não cumprimento das condições pode danificar o produto e causar lesões graves.

Mantenha longe de chamas e faíscas. Armazene o produto selado em saco, à temperatura ambiente.

Condições de armazenamento:

- Lugar seco e com temperatura controlada.
- Protegido por embalagem contra poeira.
- Não colocar objetos pesados sobre ele.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição: embalagem externa e gel interno. **Envoltório externo:** 82% Chinlon e 18% Spandex. **Gel interno:** Resina acrílica reticulada: 15–25%, Álcool polihídrico: 40–60%, Sal eletrolítico: 2–10%, Aditivos (estabilizantes etc.): < 0,5%, Água deionizada: 20–40%

Dimensions totales	835187 – 17 x 10,5 cm 835188 – 24 x 14 cm (alça de velcro: 33 cm) 835189 – 25,5 x 15 cm 835190 – 28 x 17,5 cm 835191 – 34 x 24 cm (circunferência: 103,5 cm, muito elástica) 835192 – 29 x 35 cm (alça: 76 cm, muito elástica)
Peso	835187 – 0,150 kg 835188 – 0,520 kg 835189 – 0,590 kg 835190 – 0,850 kg 835191 – 0,650 kg 835192 – 0,790 kg

DURAÇÃO DE USO

A vida útil prevista deste produto é de 5 anos, desde que utilizado em condições normais de uso, segurança e manutenção. Após esse período, o produto pode continuar sendo utilizado, desde que permaneça em boas condições.

GARANTIA

Este produto possui uma garantia de 1 ano a partir da data de compra pelo usuário. A IDENTITÉS fornecerá peças de reposição para qualquer componente quebrado devido a um defeito de fabricação, design ou material. Caso precise acionar a garantia, entre em contato com o distribuidor onde adquiriu o produto. Falhas decorrentes de danos acidentais, uso indevido, modificações ou desgaste natural não estão cobertas pela garantia. Para qualquer solicitação de garantia, entre em contato com o revendedor onde o produto foi comprado.



*Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU*

