

Finalidade: Este aparelho de ultrassom destina-se exclusivamente ao uso humano. É indicado para o alívio da dor, dos espamos musculares e das contraturas articulares. Promove um alívio sintomático da dor crónica persistente, e das dores pós-traumáticas e pós-operatórias.

Características: O aparelho possui uma cabeça de ultra-sons redonda que é colocada diretamente sobre a pele do paciente e transmite ondas ultra-sónicas. Para o efeito, é aplicado um gel ultrassónico que otimiza a transmissão das ondas ultra-sónicas através da cabeça. O tratamento por ultra-sons utiliza uma frequência de 1 MHz.

As ondas são geradas por um efeito piezoelétrico provocado pela vibração dos cristais no interior da cabeça do aparelho

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: 93/42/EEC

Classificação: Classe IIa/regra9

Modelo: 838038

Marca: Identités

Declaração de conformidade: 93/42/EEC

Fabricante: Zero-Plus International Limited

Morada do Fabricante: Despacho 1004, 10/F.

Join-In Hang Sing Centre, 71-75 container port road

Kwai Chung- N.T., Hong Kong

Distribuidor Europeu: Identités

Morada do distribuidor europeu: ZA Pole 49 - 49480
Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,
nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR
- geral@gerimais.com - Tel. 243 050 100

Instruções de utilização: Não utilizar o aparelho durante mais de 15 minutos de cada vez ou mais de 30 minutos por dia numa só parte do corpo.

Manter o gel de ultra-sons limpo. Deve estar isento de pó, sujidade ou similares. O gel ultrassónico é necessário para utilizar o dispositivo, a fim de estabelecer uma ligação entre a

pele e o dispositivo e, assim, garantir a sua eficácia. Coloque a cabeça de ultra-sons sobre a área do corpo que foi humedecida com gel de ultra-sons e mova-a lentamente em movimentos circulares sobre a superfície da pele. Certifique-se de que cobre uniformemente toda a área de tratamento

Manutenção e Armazenamento: Certifique-se de que não entra água nem se derrama sobre o aparelho. Não utilize produtos de limpeza abrasivos para limpar o aparelho, pois estes podem danificar a superfície. Manter o aparelho fora do alcance das crianças e dos animais, num local seco e limpo e protegido da luz solar direta quando não estiver a ser utilizado. Não o deixar ligado à corrente eléctrica.

Imagens do Artigo:

