

Finalidade: O andarilho Space tem uma estrutura única em forma de X que permite limitar o seu peso, mantendo a robustez e a rigidez. Possui rodas largas de TPE antiderrapante e freios de alto desempenho. Serve para facilitar a mobilidade de alguém com dificuldade em andar. O andarilho proporciona estabilidade, suporte e segurança durante a deambulação.

Características:

Estrutura de alumínio.

Cor cinza satélite.

Dimensões totais: largura 62 x profundidade 66 x altura. 78/102 cm em 10 posições.

Dobrável lateralmente.

Peso 5,7 kg.

Dimensões do assento: largura 46 x profundidade 17 x altura. 62 cm.

Suporte máximo de peso: 150 kg

Garantia de 7 anos

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 826276

Marca: Identités

Declaração de conformidade / Regulamento:
2017/745

Fabricante: Rehasense Sp. z o.o.

Morada do Fabricante: Sulejowska 45 gr

97-300 Piotrków Trybunalski, Polónia

Distribuidor Europeu : Identités

Morada do Distribuidor Europeu: ZA Pole 49 - 49480
Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,
nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO
MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Não guarde o andarilho durante um longo período de tempo perto de uma fonte de calor ou fontes de frio. Mantenha longe da chama e de faíscas. Mantenha-o num lugar seco. Proteja-o do pó, corrosão (por exemplo, elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salgado). Guarde todas as peças no mesmo local (ou coloque-as se necessário) para evitar a mistura com outros produtos durante a remontagem. Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não coloque objetos muito pesado sobre os elementos do andarilho. Limpe o andarilho regularmente com água morna e um pano macio. Não utilize produtos abrasivos.

Instruções de utilização:

Desdobre e monte o Andarilho (consulte o manual de instruções que acompanha o artigo). Utilize o andarilho somente em pisos planos. Não utilize em pisos irregulares ou escorregadios. Não utilize se houver alguma peça danificada. Sempre que estiver parado deve acionar os travões.

Imagens do Artigo:

