

Finalidade: Facilitar/permitir a deslocação de pessoas com dificuldades de locomoção e pode ser utilizada por condução autónoma ou com a ajuda de outra pessoa.

Características: Estrutura: alumínio leve e dobrável, com cruzamento duplo. Rodas traseiras: 24" anti-furo, com desengate rápido.

Rodas dianteiras: 8" em PU, ajustáveis. Apoios de braço: ajustáveis, rebatíveis e removíveis. Encosto: tensionável e almofadado. Assento: ajustável em profundidade. Apoio para os pés: ajustável em inclinação. Pegas de empurrar: ajustáveis. Peso máximo suportado: 130Kg

Dimensões: Largura do assento: 50 cm

Peso: 16 Kg

Dimensões máximas: 103cm x entre 97cm a 102cm x 73,5 cm

Diretiva: Regulamento (UE) 2017/745

Data da produção: Ver embalagem

Lote: Ver embalagem

Cor: Estrutura em azul

Certificado CE ou Declaração de Conformidade:

Regulamento (UE) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: CP790-50

Marca: Ardea (Moretti);

Fabricante: Moretti S.p.A;

Morada do fabricante: Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo).

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial - Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - geral@gerimais.com Tel. 243 050 100

Armazenamento e Manutenção: Guardar num local seco, longe de fontes diretas de calor, como a luz solar. Temperatura recomendada: entre +10 C°/ + 40 C°.

O estofos, partes metálicas e as rodas podem ser limpos com água e sabão neutro, depois secar com um pano macio para não riscar a pintura da armação. Atenção à secagem das rodas, pode ser perigoso utilizar a cadeira de rodas com as rodas ainda húmidas.

Instruções de Utilização:

1. Aproxime a cadeira de rodas o mais perto possível, de modo a colocá-la ao seu lado;
2. Bloqueie os travões das rodas traseiras; para facilitar a subida para a cadeira de rodas;
3. Lembre-se que o centro de gravidade da cadeira de rodas foi estudado com apoios para os pés na posição correta, pelo que não utilize a cadeira de rodas sem os apoios para os pés porque pode virar.

Imagens do Artigo:

