

**Finalidade:** A faixa crioterápica Cryo GelPro ajuda a atenuar dores associadas a dores de cabeça. Deve ser aplicada diretamente na testa e nos olhos. Este produto destina-se ao público em geral, ideal para aliviar dores de cabeça e dores de dente.

**Características:** Faixa elástica para facilitar a colocação.

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Azul

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 835202

**Marca:** Identités

**Dimensões:** Largura 23,5 x Altura 15,5 cm.

Peso: 468 gr.

**Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)**  
Regulamento (UE) 2017/745

**Fabricante:** Identités

**Morada do fabricante:** Identités – ZA Pole 49

Bd de la Chanterie 49124 Saint Barthélemy d'ANJOU

serviceclient@identites.tm.fr

**Distribuidor:** Gerimais, Lda.

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira,  
nº 15- Zona Industrial de Rio Maior 2040-357 Rio  
Maior - geral@gerimais.com Tel. 243 050 100

**Manutenção e armazenamento:** Limpar a faixa com um pano húmido e sabão neutro, evitando produtos abrasivos, solventes ou álcool. Não submergir completamente o produto em água nem lavar à máquina. Antes de guardar, certificar-se de que está completamente seca. Conservar em local seco, fresco e protegido da luz solar direta e de fontes de calor.

Não perfurar, cortar ou dobrar excessivamente, pode danificar o gel interno. Não utilizar o produto se apresentar sinais de deterioração ou fuga de gel.

**Instruções de Utilização:** Uso arrefecido: Guardar a bolsa no congelador, preferencialmente dentro de um saco de proteção, por pelo menos 2 horas antes da utilização. Verificar se a temperatura é adequada antes da aplicação. Se estiver demasiado fria, envolver numa toalha ou tecido macio antes de aplicar sobre a pele. Modo de utilização: Verificar se o produto não apresenta danos. Não utilizar em caso de perfuração ou fuga. Aplicar na zona afetada por um período máximo de 20 minutos. Respeitar intervalos de pelo menos 20 minutos entre aplicações. Recomendação: Verificar o estado do produto antes de cada utilização, assegurando que não apresenta perfurações ou desgaste.

**Imagens do Artigo:**

