

Finalidade: Dispositivo destinado a o alívio da dor muscular e articular (TENS) Estimulação e reeducação muscular (SEM)Relaxamento e bem-estar muscular
Uso indicado para ambiente doméstico ou clínico leve.

Características: Possui 64 programas pré-programados e 6 personalizáveis, além de 2 canais independentes que permitem o uso simultâneo em diferentes áreas do corpo. Funções TENS (analgésica), EMS (estimulação muscular) e massagem, oferecendo versatilidade para diferentes necessidades terapêuticas. Temporizador ajustável de 5 a 100 minutos, display LCD retroiluminado para fácil visualização e função inteligente com ajuste automático ("modo médico"). Exige 3 pilhas AAA incluídas. Funciona com eletrodos de encaixe (4 fornecidos).

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: 93/42/EEC

Classificação: Classe IIa/regra 9

Modelo: 838021

Marca: Beurer GmbH

Dimensões: Dimensões 132 x 63 x 27 mm.

Peso 83g

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)
93/42/EEC

Fabricante: Beurer GmbH

Morada do fabricante: Söflinger Straße 218 • 89077
Ulm, Alemanha - www.beurer.com

Distribuidor Europeu: Identites

Morada do Distribuidor Europeu: ZA Pôle, 49

Boulevard de la Chanterie, 49124, Saint-Barthélemy-
d'Anjou, FRANÇA

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,
nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior

2040-357 Rio Maior geral@gerimais.com

Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Limpar o dispositivo com pano seco ou levemente umedecido, não utilizando produtos abrasivos ou solventes. Os eletrodos devem ser mantidos limpos e armazenados em sua película protetora após o uso, a fim de preservar a aderência. Conservar o equipamento em local seco, fresco e protegido da luz solar direta, poeira e umidade. Evitar quedas, impactos e exposição a temperaturas extremas.

Instruções de Utilização: Antes da utilização, verificar a integridade do equipamento e dos acessórios. Inserir as pilhas corretamente, conectar os cabos aos eletrodos e posicioná-los sobre a pele limpa, seca e íntegra, na área a ser tratada. Ligar o dispositivo e selecionar o modo de funcionamento desejado (TENS, EMS ou massagem), bem como o programa terapêutico adequado. Ajustar gradualmente a intensidade de estimulação para um nível eficaz e confortável ao utilizador, sem causar dor ou desconforto. Definir o tempo de tratamento (entre 5 e 100 minutos) e iniciar a sessão. Durante a utilização, a intensidade pode ser ajustada conforme necessário, respeitando sempre a tolerância do utilizador. Ao término da sessão, desligar o dispositivo antes de remover os eletrodos. Após o uso, recolocar os eletrodos na película protetora e armazenar o equipamento conforme as recomendações do fabricante.

Imagens do Artigo:

