

**Finalidade:**

Saco de gelo Kyara destina-se a arrefecer partes do corpo humano. Permite conservar o gelo durante mais tempo, otimizando a sua utilização.

**Características:**

Interior: PVC, Exterior Nylon,

Tampa de rosca

**Dimensões:** 28 cm diâmetro

**Cor:** Azul

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** ST196

**Marca:** Kyara

**Declaração de Conformidade:** Regulamento (UE) 2017/745

**Fabricante:**

Moretti S.p.A.

**Morada do fabricante:**

Via Bruxelles 3 - Meleto

52022 Cavriglia (Arezzo) [www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)

**Distribuidor:**

Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:**

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com) Tel. 243 050 100.

**Manutenção e armazenamento:**

Limpar com água morna e detergente neutro.

Deixar secar naturalmente, sem exposição ao sol ou calor artificial. Para desinfeção, utilizar produto desinfetante adequado. Armazenar em local seco, protegido da luz e de fontes de calor.

**Instruções de Utilização:**

Ideal para utilizar em situações em que é necessário arrefecer uma parte do corpo rapidamente, por exemplo quando existe hematomas ou contusões. Se possível, lave o interior da bolsa. Preencha com gelo. Feche bem utilizando a tampa fornecida, retirando todo o ar em excesso. Confira se está bem fechada e se não há vazamentos. Coloque a bolsa sobre a área desejada, sempre utilizando um pano macio entre a pele e a bolsa

**Imagens do Artigo:**