

**Finalidade:** Dispositivo manuseado com as duas mãos, adequado para apoiar e/ou auxiliar a mobilidade de pessoas com dificuldades de locomoção.

**Características:** Andador dobrável fabricado em alumínio anodizado leve, com punhos anatômicos e pontas de borracha antiderrapantes. Altura ajustável em incrementos de 2,5 cm. Capacidade máxima 130 kg

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:**

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva** Regulamento (UE) 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** DB105M e DB105L

**Marca:** Moretti

**Dimensões:**

DB105M 5 furos – Ajustável a cada 2,5 cm. De 77 a 87 cm. Dimensões da base A: 61 cm - B: 48 cm - C: 59 cm

DB105L 8 furos - Ajustável a cada 2,5 cm. De 83 a 101 cm. Dimensões da base - A: 63 cm - B: 49 cm - C: 60 cm

**Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)**  
Regulamento (UE) 2017/745

**Fabricante:** Moretti S.p.A

**Morada do fabricante:** Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) - [www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda.

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior 2040-357 Rio Maior [geral@gerimais.com](mailto:geral@gerimais.com) Tel. 243 050 100

**Manutenção e armazenamento:** Para a limpeza do dispositivo, utilize apenas um pano húmido para remoção de poeira e sujidade superficial; em caso de sujidade mais persistente, poderá ser utilizado um pano húmido com sabão neutro, não excedendo a temperatura da água de 30 °C, sendo proibido o uso de lavadoras de alta pressão ou equipamentos a vapor. Certifique-se de que o dispositivo se encontra completamente seco antes da sua utilização ou armazenamento. O produto deve ser armazenado em local seco, limpo e protegido de humidade e temperaturas extremas.

**Instruções de Utilização:** Antes da utilização, deve ser ajustado em altura, de forma que as pegadas fiquem ao nível do punho, permitindo uma ligeira flexão do cotovelo. Para a marcha, o utilizador deve posicionar o andador ligeiramente à frente do corpo, assegurando que todos os apoios se encontram em contacto com o solo, avançando de forma progressiva e controlada, um passo de cada vez. O dispositivo deve ser utilizado exclusivamente em superfícies planas, estáveis e secas. Não deve ser utilizado em superfícies inclinadas, irregulares ou escorregadias, nem para subir ou descer escadas.

**Imagens do Artigo:**

