

MA DB100x_DB105x_DB110_DB115x_DB200x_DB205_DB210_DB230_DB25x_DB300_DB305x_DB31x_DB33x_DB35x_DB360 01 A_PT*_11 2025



MOPEDIA®

**Andadores baixos MANUAL
DE INSTRUÇÕES**

ESCANEE O QR CODE
PARA MAIS IDIOMAS



ÍNDICE

| | |
|--|--------|
| 1. CÓDIGOS | PÁG.3 |
| 2. INTRODUÇÃO..... | PÁG.3 |
| 3. FINALIDADE DE USO | PÁG.3 |
| 4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE | PÁG.3 |
| 5. AVISOS GERAIS | PÁG.4 |
| 5.1 Avisos e orientações para o uso correto do dispositivo | pág.4 |
| 6. SIMBOLOGIA UTILIZADA..... | PÁG.4 |
| 7. DESCRIÇÃO GERAL | PÁG.5 |
| 8. ANTES DE CADA USO..... | PÁG.5 |
| 9. ALERTAS DE USO | PÁG.5 |
| 10. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM | PÁG.5 |
| 10.1 DB100x Andador fixo | pág.5 |
| 10.2 DB115x Andador dupla função Fixo/Oscilante | pág.6 |
| 11. MODO DE USO..... | PÁG.6 |
| 12. MANUTENÇÃO | PÁG.7 |
| 13. LIMPEZA E DESINFECÇÃO | PÁG.7 |
| 13.1 Limpeza | pág. 7 |
| 13.2 Desinfecção | pág. 7 |
| 14. CONDIÇÕES DE DESCARTE | PÁG.8 |
| 15. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | PÁG.8 |
| 16. GARANTIA | PÁG.9 |
| 17. REPAROS..... | PÁG.9 |
| 17.1 Reparo em garantia | pág. 9 |
| 17.2 Reparo de produto fora da garantia | pág. 9 |
| 17.3 Produtos sem defeito | pág. 9 |
| 18. PEÇAS DE REPOSIÇÃO..... | PÁG.9 |
| 19. TERMOS DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE | PÁG.9 |

CE Dispositivo médico Classe I
REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de
5 de abril de 2017 sobre dispositivos médicos

1. CÓDIGOS

Andadores com quatro apoios

- DB100x Andador fixo com ajuste de altura
- DB105x Andador dobrável com ajuste de altura
- DB110 Andador dobrável com apoio duplo e ajuste de altura
- DB115x Andador dobrável função dupla fixo/oscilante com ajuste de altura

Andadores dobráveis com ajuste de altura, duas rodas e dois apoios

- DB200x Andador com 2 rodas dianteiras fixas e 2 apoios traseiros
- DB205 Andador com 2 rodas dianteiras fixas e 2 apoios traseiros com sistema autobloqueante
- DB210 Andador com 2 rodas dianteiras giratórias e 2 apoios traseiros
- DB230 Andador com duas rodas dianteiras com trava direcional e dois apoios traseiros
- DB250 Andador com duas rodas dianteiras fixas e dois apoios traseiros
- DB255 Andador com duas rodas dianteiras giratórias e dois apoios traseiros

Andadores dobráveis e ajustáveis em altura, quatro rodas

- DB300 Andador com duas rodas dianteiras giratórias e duas rodas traseiras com sistema de trava automática
- DB305x Andador com quatro rodas giratórias
- DB310 Andador com quatro rodas giratórias, sendo as traseiras com travão
- DB315 Andador desmontável, quatro rodas giratórias sendo as traseiras com travão
- DB330 Andador com quatro rodas giratórias, sendo as traseiras com travão
- DB335 Andador com duas rodas dianteiras giratórias e duas rodas traseiras duplas e com sistema de fricção
- DB350 Andador com duas rodas dianteiras giratórias e duas rodas traseiras duplas e com sistema de fricção
- DB355 Andador com duas rodas dianteiras giratórias e duas rodas traseiras fixas
- DB360 Andador com quatro rodas giratórias

2. INTRODUÇÃO

Agradecemos por escolher um produto da linha MOPEDIA da Moretti. Os andadores Moretti foram desenvolvidos pensando em atender a todas as suas necessidades, proporcionando praticidade, segurança e facilidade de uso. Este manual traz dicas úteis para o uso correto do dispositivo selecionado, além de orientações importantes para sua proteção. Recomendamos a leitura completa deste manual antes de utilizar o aparelho. Se restarem dúvidas, procure o revendedor, que estará pronto para ajudá-lo e orientá-lo da melhor maneira.

3. FINALIDADE DE USO

Os andadores MOPEDIA da Moretti são equipamentos projetados para serem utilizados com ambas as mãos, ideais para oferecer suporte e/ou facilitar a mobilidade de pessoas com dificuldade para caminhar.



ATENÇÃO!

- O uso deste dispositivo para qualquer finalidade diferente da indicada neste manual é proibido.
- A Moretti S.p.A. não se responsabiliza por danos causados pelo uso incorreto do produto ou por sua utilização fora das recomendações deste manual.
- O fabricante reserva-se o direito de realizar alterações no dispositivo e neste manual sem aviso prévio, visando aprimorar suas características.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

A MORETTI SpA declara sob sua exclusiva responsabilidade que os produtos fabricados e comercializados pela própria MORETTI SpA, pertencentes à família de ANDADORES BAIXOS MOPEDIA, estão em conformidade com as disposições aplicáveis do regulamento 2017/745 sobre DISPOSITIVOS MÉDICOS de 5 de abril de 2017.

Para esse fim, a MORETTI SpA assegura e declara, sob sua exclusiva responsabilidade, o seguinte:

1. Os dispositivos mencionados atendem aos requisitos gerais de segurança e desempenho estabelecidos no Anexo I do regulamento 2017/745, conforme previsto no Anexo IV desse regulamento.
2. Os dispositivos em questão NÃO SÃO INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO.
3. Os dispositivos em questão NÃO SÃO DESTINADOS A PESQUISAS CLÍNICAS.
4. Os dispositivos em questão são comercializados em embalagem NÃO ESTÉRIL.

5. Os dispositivos mencionados devem ser classificados como pertencentes à Classe I, de acordo com o que está definido no Anexo VIII do referido regulamento.
6. A MORETTI SpA mantém e disponibiliza às Autoridades Competentes, por no mínimo 10 anos a partir da fabricação do último lote, a documentação técnica que comprova a conformidade com o regulamento 2017/745.

Nota: Os códigos completos dos produtos, o código de registro do Fabricante (SRN), o código UDI-DI base e possíveis referências a normas utilizadas estão descritos na Declaração de Conformidade da UE que a MORETTI SPA emite e disponibiliza por meio de seus canais.

5. ALERTAS GERAIS

5.1 Avisos e instruções para o uso correto do dispositivo

Para garantir o uso seguro e eficaz do dispositivo, recomenda-se seguir cuidadosamente as orientações abaixo:

Consulta ao manual de instruções

- Antes de cada uso, leia atentamente este manual, dando atenção especial às seções sobre manutenção de rotina e avisos de segurança. **Orientação médica**
- O uso do dispositivo deve ser feito após consulta com um médico ou terapeuta qualificado, garantindo total compatibilidade com as necessidades terapêuticas do usuário. **Armazenamento da embalagem**
- Mantenha a embalagem original longe de fontes de calor ou chamas, pois o material é inflamável.

Vida útil do dispositivo

- A vida útil do dispositivo é definida pelo desgaste de componentes que não podem ser reparados ou substituídos e, em qualquer caso, não deve ultrapassar 10 anos a partir da data de fabricação indicada na etiqueta.

Segurança de crianças

- Redobre a atenção quando houver crianças próximas ao dispositivo para evitar acidentes.

Limite de peso

- Nunca ultrapasse o peso máximo permitido conforme especificado pelo fabricante. Exceder esse limite pode comprometer a estrutura do dispositivo e a segurança do usuário. **Comunicação de eventos adversos**
- O usuário ou paciente deve comunicar imediatamente qualquer incidente grave relacionado ao uso do dispositivo tanto ao fabricante quanto à autoridade competente do país em que reside.

6. SIMBOLOGIA UTILIZADA



Código do produto



Identificação única do dispositivo



Certificação CE



Fabricante



Lote de fabrico



Consulte o manual para instruções



Equipamento Médico




Peso máximo suportado



Instruções para descarte

7. DESCRIÇÃO GERAL

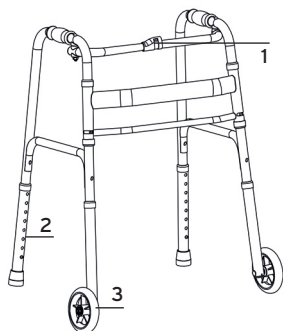

1. Botão de travamento
2. Ajuste de altura
3. Com rodas e/ou ponteiros conforme configuração disponível

(imagem meramente ilustrativa)

8. ANTES DE CADA USO

- Sempre verifique se os travões estão funcionando antes de utilizar o andador, quando houver;
- Não utilize o andador caso esteja danificado ou com defeito;
- Em caso de necessidade de reparo, procure o revendedor;
- Os usuários devem circular por calçadas e áreas de pedestres, evitando ruas movimentadas;
- Considere o risco de prender partes do corpo; evite colocar os dedos entre as partes móveis do andador. Redobre a atenção ao abrir e fechar o equipamento.

9. ADVERTÊNCIAS DE USO

Este equipamento proporciona maior estabilidade, apoio e segurança durante a locomoção. No entanto, não pode ser utilizado por pessoas com força visivelmente reduzida nas mãos e/ou braços ou com dificuldades de equilíbrio. O andador pode ser usado tanto em ambientes externos quanto internos.


- Recomenda-se utilizar o dispositivo apenas em superfícies planas, onde as quatro pernas estejam firmemente apoiadas no chão;
- Não é indicado o uso em terrenos irregulares ou inclinados, pois isso pode comprometer a estabilidade do andador;
- O dispositivo não foi feito para transportar pessoas ou objetos;
- Utilize com cautela em superfícies molhadas ou escorregadias;
- Não ultrapasse o peso máximo do usuário indicado na etiqueta do produto e no capítulo de características técnicas deste manual;
- Evite utilizar em inclinações maiores que 10°; em superfícies inclinadas, o usuário deve ser acompanhado por um responsável durante manobras de giro.
- Verifique periodicamente a estabilidade e resistência do produto, além das condições das ponteiros de apoio e das rodas. Troque-as assim que estiverem desgastadas;
- Em caso de dúvidas sobre uso, regulagem ou manutenção do produto, entre em contato com o revendedor;
- Para evitar riscos, mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças.

10. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


10.1 DB100x Andador fixo

Lista de peças

1. Estrutura principal (1 unid.)
2. Pernas (2 unid.)
3. Estrutura inferior (1 unid.)
4. Kit de montagem (1 unid.)

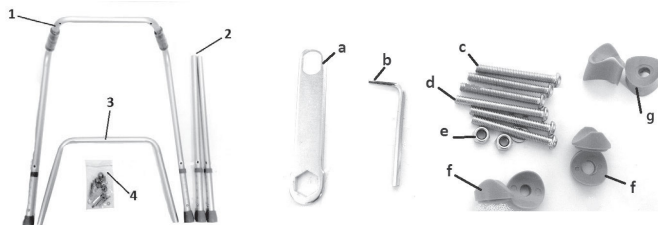

- Abra o kit de montagem e comece pegando o chassi principal (1).
- Prenda as pernas (2) ao chassi principal (1) usando as arruelas tipo sela (f) e os parafusos curtos (c). Não aperte totalmente os parafusos nesta etapa.
- Monte na parte frontal do chassi principal (1) a estrutura inferior (3) utilizando as arruelas tipo sela (g), os parafusos longos (d) e as porcas com arruela (e). Não aperte totalmente os parafusos.
- Fixe a estrutura inferior (3) às pernas (2) com as arruelas tipo sela (f) e os parafusos curtos (c). Também aqui, não aperte totalmente os parafusos.
- Aperte bem todos os parafusos – agora o andador está pronto para ser usado. (Veja a foto abaixo)

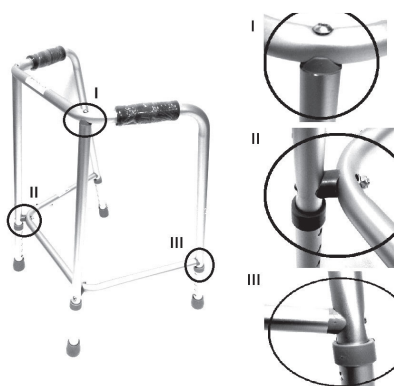

10.2 DB115x Andador dupla função Fixo/Oscilante

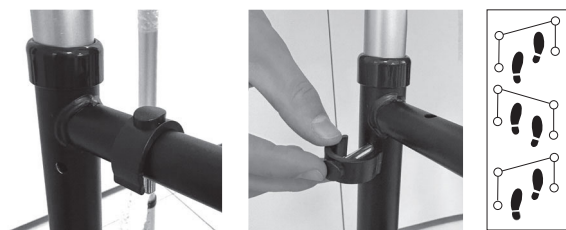


Fig.1

Fig.2

- (Fig.1) O bloqueio está aberto; nesta configuração o andador pode oscilar livremente.
- (Fig.2) O bloqueio está fechado; nesta configuração o andador fica travado e não pode oscilar.

11. MODO DE USO

Nota: Consulte as recomendações de segurança deste manual. Utilize o andador como um recurso de apoio para caminhar. Para isso, segure nas duas alças e empurre o dispositivo para frente, garantindo um suporte prático e confiável durante a caminhada. Caminhe com segurança.




Com o braço estendido, a alça do andador deve estar na altura do pulso. Ao apoiar a mão na alça, o cotovelo deve ficar flexionado entre 20° e 30°.

ATENÇÃO!



Não utilize o andador em locais com fios elétricos no chão, pisos molhados, tapetes, brinquedos ou outros obstáculos, móveis, degraus ou superfícies irregulares. É proibido usar o andador para subir ou descer escadas, inclusive escadas rolantes.

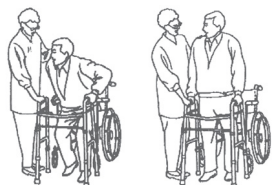

1. Antes de transferir o paciente da cadeira de rodas para o andador, certifique-se de que as rodas da cadeira e do andador (caso possua) estejam devidamente travadas.



ATENÇÃO!

Solicite o auxílio de um profissional para realizar a transferência e os primeiros passos.



2. Andadores com ponteiras: para caminhar com o andador, levante e posicione-o confortavelmente à sua frente, garantindo que os quatro pés estejam firmes no chão. Caminhe com cuidado, avançando um passo de cada vez.

Andadores com rodas: Para caminhar com o andador, empurre-o cuidadosamente à sua frente, certificando-se de que todas as quatro pernas, inclusive as que têm rodas, estejam firmes no chão. Caminhe com atenção, avançando um passo de cada vez.



Andador com dupla empunhadura: desenvolvido para facilitar o movimento de levantar-se da cadeira. As empunhaduras inferiores permitem ao usuário começar a se erguer sem precisar alcançar imediatamente as superiores, que costumam ser mais difíceis de segurar, frequentemente mais complicadas de agarrar.

Nota: O andador deve ser sempre segurado pelas alças.



ATENÇÃO!

Evite empurrar o andador muito para longe do corpo. Isso pode causar quedas e esforços inadequados.

12. MANUTENÇÃO

Os equipamentos da linha MOPEDIA by Moretti passam por rigorosa inspeção e recebem o selo CE antes de serem comercializados. Para garantir a segurança do paciente e do profissional de saúde, recomenda-se que o produto seja avaliado pelo fabricante ou por um laboratório autorizado, pelo menos a cada 2 anos, para confirmar sua aptidão de uso. Considera-se inspeção periódica a análise das seguintes partes:

- Estrutura principal do andador e componentes de conexão;
- Verifique a montagem e funcionamento das rodas e travões, quando houver;
- Inspeccione todos os pontos de solda;
- Avalie o desgaste dos apoios, se presentes.

Em caso de reparo, utilize apenas peças e acessórios originais.

13. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

13.1 Limpeza

Para limpar o dispositivo, utilize apenas um pano húmido para retirar poeira e sujeira superficial. Se houver sujeira mais difícil de remover, use um pano húmido com sabão neutro. Certifique-se de que o dispositivo esteja completamente seco antes de utilizá-lo. A água utilizada não deve ultrapassar 30 °C. Não é permitido o uso de lavadoras de alta pressão ou aparelhos a vapor.

13.2 Desinfecção

Caso seja necessário desinfetar o produto, utilize um detergente desinfetante comum.

Nota: Evite, sob qualquer circunstância, o uso de produtos ácidos, alcalinos ou solventes como acetona ou thinner.







14. CONDIÇÕES DE DESCARTE



Ao descartar o dispositivo, nunca utilize os sistemas convencionais de coleta de resíduos sólidos urbanos. Recomenda-se realizar o descarte em pontos de coleta seletiva disponibilizados pelo município, garantindo a reciclagem adequada dos materiais.

15. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões
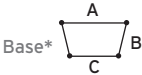
| Códigos |  |  |  |  | Base*  |  Capacidade máxima |
|---------------|---|---|---|---|--|---|
| | | | | | | |
| DB100M | 76÷86 cm | 4 | 5 | - | A: 55/56 B: 43,5/46 C: 45/46 | 130 kg |
| DB100L | 86÷96 cm | | | - | A: 56/57 B: 45/47 C: 45,5/47 | |
| DB105M | 77÷87 cm | 4 | 5 | - | A: 61/62 B: 48/50 C: 59/60 | 130 kg |
| DB105L | 83÷101 cm | | | 8 | A: 63/67 B: 49/53 C: 60/62 | |
| DB110 | 71÷89 cm | 4 | 8 | - | A: 60/62 B: 51/52 C: 58/59 | 130 kg |
| DB115M | 77,5÷87,5 cm | 4 | 5 | - | A: 54/56 B: 47,5/49 C: 52/52 | 130 kg |
| DB115L | 83,5÷101,5 cm | | | 8 | A: 54/56 B: 47,5/49 C: 52/52 | |
| DB200S | 68,5÷78,5 cm | 2 | 5 | 2 x Ø 7 cm | A: 62/63 B: 46/48 C: 59/60 | 130 kg |
| DB200M | 76÷86 cm | | 5 | 2 x Ø 7 cm | A: 63/65 B: 48/50 C: 60/62 | |
| DB200L | 83÷101 cm | | 8 | 2 x Ø 7 cm | A: 63/65 B: 49,5/53,5 C: 60/62 | |
| DB205 | 84÷102 cm | 2 | 8 | 2 x Ø 7 cm | A: 61/64 B: 53/57 C: 62/65 | 130 kg |
| DB210 | 84÷102 cm | 2 | 8 | 2 x Ø 7 cm | A: 61/63 B: 50/54 C: 60/61,5 | 130 kg |
| DB230 | 84÷102 cm | 2 | 8 | 2 x Ø 10 cm | A: 65/67 B: 54/60 C: 59/60 | 130 kg |
| DB250 | 86÷103 cm | 2 | 8 | 2 x Ø 12,5 cm | A: 65/67 B: 54/60 C: 59/60 | 130 kg |
| DB255 | 86÷103 cm | 2 | 8 | 2 x Ø 12,5 cm | A: 65/67 B: 54/60 C: 59/60 | 130 kg |
| DB300 | 84÷102 cm | - | - | 4 x Ø 7 cm | A: 66/69 B: 55/59 C: 62/64 | 130 kg |
| DB305S | 70÷80 cm | - | - | 4 x Ø 7 cm | A: 62/65 B: 55/56 C: 58/60 | 130 kg |
| DB305M | 78÷88 cm | | | 4 x Ø 7 cm | A: 63/65 B: 56/58 C: 60/61 | |
| DB305L | 84÷102 cm | | | 4 x Ø 7 cm | A: 65/67 B: 58/60 C: 62/63 | |
| DB310 | 86÷96 cm | - | - | 4 x Ø 7,5 cm | A: 60/61 B: 54/56 C: 58/59 | 130 kg |
| DB315 | 77÷92 cm | - | - | 4 x Ø 7,5 cm | A: 54/54 B: 54/54 C: 54/54 | 130 kg |
| DB330 | 86÷103 cm | - | - | 4 x Ø 10 cm | A: 65/67 B: 54/60 C: 59/60 | 130 kg |
| DB335 | 86÷103 cm | - | - | 4 x Ø 10 cm | A: 65/66 B: 57/59 C: 60/61 | 130 kg |
| DB350 | 76÷86 cm | - | - | 4 x Ø 12 cm | A: 65/67 B: 54/60 C: 59/60 | 130 kg |
| DB355 | 86÷103 cm | - | - | 4 x Ø 12,5 cm | A: 65/67 B: 54/60 C: 59/60 | 130 kg |
| DB360 | 86÷103 cm | - | - | 4 x Ø 12,5 cm | A: 65/67 B: 54/60 C: 59/60 | 130 kg |

* dimensão medida no ajuste mais baixo e depois no mais alto. As medidas podem variar em ±1 cm

16. GARANTIA

Todos os produtos Moretti possuem garantia contra defeitos de material ou fabricação por 2 (dois) anos, contados a partir da data da venda, exceto pelas exclusões e limitações indicadas abaixo. A garantia não cobre casos de uso inadequado, abuso, alteração do produto ou descumprimento das instruções de uso. O destino correto do produto está especificado no manual de instruções. A Moretti não se responsabiliza por danos, lesões ou quaisquer outros prejuízos causados por instalação e/ou uso do equipamento que não estejam em total conformidade com as orientações dos manuais de instalação, montagem e uso. A garantia não cobre produtos Moretti em situações como: desastres naturais, manutenções ou reparos não autorizados, danos provenientes de problemas na energia elétrica (quando aplicável), uso de peças ou componentes que não sejam fornecidos pela Moretti, descumprimento das recomendações e instruções de uso, alterações não autorizadas, danos de transporte (exceto o envio original feito pela Moretti), ou falta de manutenção conforme previsto no manual. Peças de desgaste natural não estão cobertas por esta garantia quando o dano resultar do uso comum do produto.

17. REPAROS

17.1 Reparos em garantia

Caso um produto Moretti apresente defeitos de material ou fabricação durante o período de garantia, a Moretti avaliará junto ao cliente se o defeito está coberto pela garantia. A Moretti, a seu exclusivo critério, poderá substituir ou reparar o item dentro da garantia, em um revendedor autorizado Moretti ou em sua própria sede. Os custos de mão de obra referentes ao conserto do produto poderão ser por conta da Moretti caso seja determinado que a reparação está dentro da garantia. Um reparo ou substituição não renovará nem prorrogará o prazo da garantia.

17.2 Reparo de um produto fora da garantia

Um produto fora da garantia só poderá ser devolvido para reparo após autorização prévia do atendimento da Moretti. Todos os custos de mão de obra e envio referentes ao reparo fora da garantia serão de total responsabilidade do cliente ou do revendedor. Reparos realizados em produtos fora da garantia terão garantia de 6 (seis) meses, contados a partir do recebimento do produto reparado.

17.3 Produtos sem defeito

O cliente será informado caso, após análise e teste de um produto devolvido, a Moretti conclua que o item não apresenta defeito. O produto será devolvido ao cliente e os custos de envio para devolução ficarão sob sua responsabilidade.

18. PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Os componentes originais Moretti possuem garantia de 6 (seis) meses a partir da data em que o produto de reposição é recebido.

19. CLÁUSULAS DE ISENÇÃO

Exceto pelo que está expressamente previsto nesta garantia e conforme os limites da legislação, a Moretti não oferece nenhum outro tipo de declaração, garantia ou condição, seja explícita ou implícita, incluindo quaisquer declarações, garantias ou condições de comercialização, adequação para um propósito específico, não violação e não interferência. A Moretti não garante que o uso do produto Moretti será contínuo ou livre de erros. A duração de eventuais garantias implícitas impostas pela legislação está limitada ao período da garantia, conforme os limites legais.

Alguns estados ou países não permitem restrições à duração de uma garantia implícita, nem a exclusão ou limitação de danos acidentais ou indiretos relacionados a produtos de consumo. Nestes locais, algumas exclusões ou limitações desta garantia podem não se aplicar ao usuário.

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

Produto _____

Data da compra _____

Revendedor _____

Rua _____ Cidade _____

Vendido para _____

Rua _____ Bairro _____



Rua Bruxelas, 3 - Melegnano 20122 Cavriaglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

FABRICADO NA P.R.C.

** Acesse nosso site para conferir a versão mais recente do manual do usuário disponível*

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com