

Finalidade: Dispositivo de apoio à marcha destinado a pessoas com mobilidade reduzida. Este produto destina-se a ser utilizados no interior e no exterior e são dobráveis para facilitar o armazenamento ou o transporte.

Características: A Travelite Transfer Chair se dobra com dimensões aproximadas de 1/3 em comparação com uma cadeira de rodas padrão. Ideal para viagens curtas. Possui apoios de braço acolchoados e rebatíveis, estrutura de alumínio e bolsa de transporte.

Lote: Ver embalagem

Cor:

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva Regulamento (UE) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 874008

Marca: Identités

Dimensões:

Dimensões totais: Largura 84 cm x Profundidade 57 cm x Altura 95 cm

Dimensões dobrado: Largura 77 cm x Profundidade 29 cm x Altura 29 cm

Dimensões do assento: Largura 45 cm x Profundidade 45 cm x Altura 48 cm

Peso 9,3 kg

Carga máxima: 125 kg

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)
Regulamento (UE) 2017/745

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pôle 49 – Boulevard de la Chanterie 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior 2040-357 Rio Maior geral@gerimais.com Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Limpar com água morna e pano macio. Não utilizar produtos abrasivos, solventes, fenol ou cloro. Secar com pano limpo e seco. Manter rodas e eixos livres de sujeira. Lubrificar as rodas se necessário. Guardar em local seco, limpo e ventilado. Temperatura: -10°C a 40°C | Humidade: ≤ 80%. Evitar exposição ao sol, calor, frio extremo e fontes de faíscas. Proteger contra poeira, areia e ambientes salinos. Armazenar componentes sem carga e, se desmontados, manter identificados.

Instruções de Utilização: Antes de utilizar, verificar se a cadeira está corretamente aberta, estável e com todos os componentes bem fixos. Acionar os travões sempre que a cadeira estiver parada ou durante transferências. Utilizar sempre com acompanhamento de um assistente/cuidador. Não utilizar em escadas, escadas rolantes ou terrenos irregulares sem auxílio. Em inclinações, utilizar com cautela e sempre com apoio de um acompanhante. Não utilizar os apoios de pés para subir ou descer da cadeira. Manter mãos, dedos e roupas afastados das rodas durante o uso. Não realizar modificações no produto.

Imagens do Artigo:

